



Neusreiniger - Made in Sweden

NoseFrida® kan u helpen om uw kind beter te laten ademen, eten en slapen.

Gebruik van de NoseFrida® neusreiniger.

Stap 1: NoseFrida® is verpakt in een speciaal ontworpen opbergsysteem inclusief vier verwisselbare filters. Neem de NoseFrida® uit het opbergsysteem.

Stap 2: Leg uw kind op de rug op een vlakke ondergrond.

Stap 3: Plaats het rode mondstuk van de NoseFrida® in uw mond en plaats de opening van de zuigbuis voor het neusgat van het kind. Plaats de NoseFrida® dicht bij het neusgat (niet in het neusgat), en zuig met lichte zuigkracht. Gebruik je andere hand om het hoofd van het kind stil te houden, zuig niet te hard of te lang.

Stap 4: Als het slijm dik of korstig is, gebruik dan eerst een zoutoplossing en zuig opnieuw. U hoeft zich geen zorgen te maken over het binnen krijgen van slijm of bacteriën via uw mond, als het filter is geplaatst wordt dit voorkomen.

Stap 5: Reinig de NoseFrida® na elk gebruik. Verwijder hiervoor de blauwe zuigbuis en spoel het in heet water met afwasmiddel om en laat de buis drogen. Plaats een nieuw filter voor u de volgende keer de NoseFrida® gebruikt. U zult hier een klik horen als u de zuigbuis correct terug plaatst op de aansluiting.

Stap 6: Plaats de NoseFrida® terug in het opbergsysteem. Het is nu gereed voor nieuw gebruik. Vervang het hygiënefilter na elk gebruik.

Veiligheid: Het ontwerp van NoseFrida® is gepatenteerd en uniek. Volg bovengenoemde instructies goed op, in combinatie met het unieke ontwerp van de NoseFrida® voorkomt het schade aan de gevoelige neus van het kind, zelfs als het kind een plotselinge beweging maakt. NoseFrida® is gedocumenteerd als veilig voor zowel de gebruiker als het kind.

Klinisch getest: NoseFrida® is een origineel ontwikkeld Zweeds product en getest door KNO en kinderartsen

Accessoires: NoseFrida® vervangings hygiënefilters zijn los verkrijgbaar.



Waarschuwing: NoseFrida® mag alleen gebruikt te worden om slijm uit de neus van het kind te halen. NoseFrida® is niet bedoeld voor welk ander doel dan ook. Blaas geen lucht in het NoseFrida® mondstuk, met name niet wanneer het geplaatst is voor het neusgat van de baby.

Laat kinderen niet spelen met de NoseFrida®. NoseFrida® is geen speelgoed. Houd alle onderdelen buiten het bereik van baby's en kinderen. NoseFrida® mag in geen geval worden aangesloten op een mechanische afzuiger of andere vormen van (elektrische) apparaten.

Fabrikant: Nasalprodukter Sverige AB, Adelskatan 21
SE 211 22 Malmö, Zweden www.nasalprodukter.se

Distributeur Nederland: Finmax | Neusvrij
www.neusvrij.nl