

Dealer stempel



Elephantje



GEBRUIKSAANWIJZING ELEPHANTJE ROLLATOR

INSTELLEN VAN ROLLATORS

Vouw de rollator **HELEMAAL** uit een zodat de klemmen aan de onderkant van het zitje over de achterbuis vallen. Steek de duwbuizen met de handgrepen door de driehoek boven het zitje.

Druk de duwbuizen in het frame en stel de duwbuizen in op de gewenste hoogte. Druk de boutjes in het gewenste gaatjes en draai de plastic hand-moeren goed vast. Plaats dan pas de rugleuning en laat de remkabels aan de buitenkant van de rugleuning lopen. Op deze wijze

blijven de remkabels aan de binnenkant van de rollator en kunnen dus niet uitsteken en hierdoor geen beschadiging van de remkabels teweeg brengen.



RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK

De remkabels zijn door de fabriek afgesteld.

Standaard is de Elephantje Licht Gewicht Rollator met modified TPR banden uitgevoerd. Indien er vuil op de modified TPR banden aankomt, dient U dit met een borsteltje te verwijderen.



Verder zijn de E modified TPR banden volledig onderhoudsvrij.

GEbruIK VAN DE REMMEN

Om te remmen, knijp eenvoudig in de twee hendels.

INFORMATIE VOOR HET GEbruIK

In de boodschappenmand kunt U makkelijk boodschappen meenemen en kunt U de mand er zeer eenvoudig afhaken om deze leeg te maken. Het mandje kan zowel aan de voorkant als onder de zitting geplaatst worden.

Op het boodschappenvak kunt U uw boodschappen zetten als U de draagmand niet in gebruik heeft.

In de wandelstok/ellebooghouders kunt U eventueel uw wandelstok of elleboogkrukken plaatsen. De houder is geschikt voor wandelstokken/elleboogkrukken met een diameter van 18 tot 22mm. Elephantje is geschikt voor personen tot maximaal 100 kg en is voorzien van modified TPR banden en is geschikt voor binnen- en buitengebruik.

PARKEREN OM TE GAAN ZITTEN

Druk de twee hendels onder de handgrepen naar beneden tot deze vastklikken zodat de achterwielen geblokkeerd worden. Er kan nu niet meer gereden worden en U kunt op het zitje gaan zitten.

Om de rollator weer te gebruiken knijpt U de 2 hendels naar boven en de parkeerremmen zijn nu ontkoppeld.



OPBERGEN EN WEER GEbruIKEN

Opbergen en in de auto vervoeren:

Klap de zitting omhoog, hiermee maakt u de klapbeveiliging los. Neem de tussen spiraal vast en trek deze omhoog zodat het voorwiel en het achterwiel naar elkaar toekomen. De rollator blijft nu op zijn 4 wielen staan en kan worden weggezet.

Weer gebruiken: klap de voor en achterwielen uit elkaar , druk het zitje omlaag zodat het in de vergrendeling valt. De rollator is weer in gebruiksstand en u kunt de rollator weer gebruiken. Wees voorzichtig met het uit en inklappen van de rollator zodat de handen niet tussen de bewegende delen kunnen komen.

JAARLIJKSE CONTROLE

Het verdient aanbeveling eens per jaar de rollator te laten smeren, alle schroeven en moeren aan te draaien, de remkabels te controleren en af te stellen en de banden op slijtage te controleren.

Hiermee blijft de goede werking van Uw Elephantje Rollator gegarandeerd.

De rollator kan met een zachte vochtige doek worden schoon gemaakt. Eventueel kan er een schoonmaakmiddel gebruikt worden. Schuurmiddelen en agressieve schoonmaakmiddelen tasten de kunststof onderdelen en de chroomlaag aan.



AANVULLENDE TECHNISCHE GEGEVENS

De Elephantje Rollator is een medisch hulpmiddel klasse 1 onder de Europese Richtlijn Medische Hulpmiddelen 93/42/EEC. Doordat het product voldoet aan de van toepassing zijnde eisen uit ISO norm 11199-2, wordt verondersteld dat het product daarmee tevens voldoet aan de Essentiele Eisen uit die richtlijn. Bovendien voldoet het product aan de van toepassing zijnde eisen uit het keuringsvoorschrift L-01 van de Nederlandse stichting KBOH.

Naam fabrikant van het product	CHK B.V. Adres: Puntweg 11, 3208LD Spijkenisse	
Producttype	ELR002 Aluminium rollator	
CE-DIN ISO	11199-2 07.1996	
Maximale belasting	100 kg	
Productnaam	Elephantje lichtgewicht	
Gebruik	Binnenshuis en buitenshuis	
Handvaten in hoogte aanpasbaar	Tussen 83 en 94 cm	
Maximum breedte van de rollator	64 cm	
Diameter van de wielen	200 mm	
Productgewicht	7,34 kg	
Maximale belasting van het mandje	15 kg	
Type banden	Massief	
Remsysteem	Rechtstreeks op de wielen	
Opvouwbaar bij het Vervoer	Ja	
Opvouwbaar wanneer niet in gebruik	Ja	
Belangrijkste onderdelen van het product	Frame Remmen (met kabel) Slotklem Stokhouder In hoogte instelbaar onderdeel	Handvaten Zitje Wielen Rugsteun
Accessoires	Mand Handschoenen (niet meegeleverd)	

Copyright CHK B.V.

Versie: vs14022020v3