

ARKY



Handleiding

ARKY 24V buitenkast

INHOUD


Gebruik ARKY buitenkast	4
Onderdelen	5
Plaatsing en montage	6
Alarm	7
Elektrische installatie	8
Specificaties	10
CE verklaring	11

BELANGRIJK

Lees voor de installatie en gebruik van de ARKY buitenkast deze handleiding volledig door. De aansluiting op het lichtnet dient uit veiligheids-overwegingen uitsluitend uitgevoerd te worden door een daarvoor gekwalificeerde monteur.

De ARKY buitenkast is ontworpen voor de bescherming en bewaring van een AED. De batterijen van een AED verliezen hun capaciteit als ze afkoelen tot beneden de 0 °C en de elektronica en metalen onderdelen van de AED zijn niet waterproof. Daarom dient de AED droog en vorstvrij bewaard te worden.

De ARKY buitenkast is voorzien van een spatwaterdichte neopreensluiting en twee verwarmingselementen met thermostaat om schade aan de AED te voorkomen.

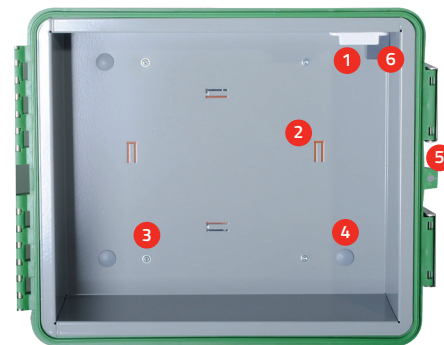

- 1 Magneetblokje voor alarm
- 2 Bevestigingshaak voor elastiek
- 3 Schroef (bevestiging binnenbak in buitenbak)
- 4 Afdekdopje voor schroef
- 5 Oog voor hangslot/breksluiting
- 6 Thermostaat

PLAATSING EN MONTAGE

Monteer de kast op een plaats waar hij beschermd is tegen direct zonlicht en regeninslag. Bevestig de kast met behulp van de meegeleverde schroeven. De schroeven worden geleverd met neopreen ringen voor een waterdichte afsluiting.

BELANGRIJK

De adapter en kabels zijn niet waterbestendig en dienen derhalve op een droge, vorstvrije plaats bewaard te worden.

ALARM

Het alarm is voorzien van een aan/uitschakelaar. Zet, om het alarm te activeren, de schakelaar op 'ON'.

Het alarm wordt geleverd met drie knoopcel batterijen. Om deze te vervangen schuift u het klepje aan de bovenzijde van het alarm naar beneden, zoals aangegeven door middel van het pijltje.



ELEKTRISCHE INSTALLATIE

De kast is voorzien van twee 45W verwarmings-elementen. Deze wordt aangestuurd door een thermostaat waardoor de kast altijd vorstvrij blijft.

De aansluiting op het lichtnet dient uit veiligheidsoverwegingen uitsluitend uitgevoerd te worden door een daarvoor gekwalificeerde monteur. Belangrijk is dat de kast aangesloten wordt op een elektrische installatie met aardlekschakelaar.



De meegeleverde wartel is geschikt voor een twee-aderige kabel met een buitendiameter van 10 mm. Let op het voldoende aandraaien van de wartel. Deze dient tevens als trekontlasting.



Bevestig de bedrading van de kast aan de bedrading van de adapter met behulp van een krimpkous.

SPECIFICATIES

Cabinet

Gewicht: 3,6 kg

Afmetingen buitenzijde: 34 x 40 x 20 cm (HxWxD)

Afmetingen binnenzijde: 28 x 32 x 18 cm (HxWxD)

Elektrische voorziening

Verwarmingselementen: 2x 45W

Voeding AC input: 100-240V, ~1,5A, 50~60 Hz

Voeding DC output: 24V, 3A

Alarm

Voeding: 3x knoopcel batterij LR44



Conformiteitsverklaring

Declaration of conformity

Manufacturer: Defibrion bv
Verlengde Bremenweg 12
9723 JV Groningen

Product: AED Outdoor Cabinet

Dit product is ontwikkeld en geproduceerd volgens en in overeenstemming met de volgende normen en voorschriften:

This product complies with the essential requirements and provisions of following standards and methods:

EN 60950-22 version 2006

en/and



Groningen, 01.05.2012

