



HANDLEIDING VANUIT HUIS TE GEBRUIKEN

GEBRUIK VAN DE LED LAMP

Maak het lampje open aan de achterkant en verwijder het plastic laagje tussen de batterijen. Stop de batterijen weer terug en draai het lampje dicht. Bevestig het lampje aan het meegeleverde bitje.

AANBRENGEN VAN DE GEL

Plaats geleidelijk de gel over beide kanten van het bitje. Gebruik niet te veel gel om een ongelijkmatig resultaat te voorkomen. Plaats het bitje in je mond en pas de positie aan totdat al de tanden goed bedekt zijn. Oefen lichte druk uit door zachtjes op het bitje te bijten. Zo is elke tand volledig bedekt met whitening gel.

BLEKEN VAN DE TANDEN

Druk op het witte knopje zodat de lamp aangaat. Houd het bitje voor 20 minuten in de mond. Je kan de lengte en frequentie van de behandelingen laten toenemen wanneer je tanden gewend zijn aan het proces. Haal het bitje na het uitvoeren van de gehele behandeling uit je mond en spoel deze af met water.

NA ELKE BEHANDELING

Klaar met de behandeling? Zorg ervoor dat alle gel uit de mond is, dit voorkomt irritaties. Gebruik hiervoor je tandenborstel. Vergeet niet om daarna je tandenborstel ook af te spoelen om alle gel resten hiervan te verwijderen. Herhaal de behandelingen tot je het gewenste resultaat hebt behaald.

Gelspuiten op?

De JSJ Whitening Gel is ook verkrijgbaar als navulset (10 spuiten).

Zo hoef jij nooit een nieuwe set te kopen!

VRAGEN OF OPMERKINGEN?
INFO@JSJCOMPANY.NL



SHOW YOUR SMILE!



Snel resultaat

Binnen 20 minuten zichtbaar



Makkelijk bijhouden

Altijd een stralend gebit



100% veilig

0% peroxide



Nieuwe lach

Prachtig witte tanden