



Babeza

Borstkolf

Handleiding



Inhoudsopgave

| | |
|---|-----------|
| Inleiding | 3 |
| Beoogd Gebruik | 4 |
| Het Pakket | 5 |
| ■ Inhoud | 5 |
| ■ Uitpakken | 6 |
| ■ Veiligheid Tijdens het Uitpakken | 6 |
| Technische Gegevens | 7 |
| Product Onderdelen | 8 |
| ■ Het Scherm en de Knoppenfuncties | 8 |
| ■ De Accessoires | 9 |
| Product Eigenschappen | 10 |
| De Montage van de Onderdelen | 10 |
| De Borstkolf Gebruiken | 13 |
| ■ Voorbereiding | 13 |
| ■ Opstarten | 13 |
| ■ Het Scherm | 13 |
| ■ De 4 Modi | 14 |
| ■ De Geheugenfunctie | 16 |
| De Juiste Zitpositie | 16 |
| De Moedermelk Bewaren | 17 |
| ■ Moedermelk Bewaren | 17 |
| ■ Koude Opslag van Moedermelk | 17 |
| ■ Moedermelk Ontdooien | 17 |
| ■ Verwarming van Moedermelk | 17 |
| De Batterij | 18 |
| ■ De Voeding van de Borstkolf | 18 |



| | |
|---|-----------|
| ■ Opladen | 18 |
| Problemen Oplossen | 19 |
| Veiligheidsinstructies | 20 |
| ■ Algemene Apparaat Veiligheid | 20 |
| ■ Personen & Gebruik | 21 |
| ■ Elektronica & USB-Adapter | 21 |
| ■ USB-Kabel | 22 |
| ■ Hitte & Koeling | 23 |
| ■ Water | 23 |
| ■ Batterij Veiligheid | 24 |
| ■ Medische Overwegingen | 24 |
| Reiniging | 25 |
| ■ De Borstkolf | 25 |
| ■ De Accessoires | 25 |
| ■ Reinigingsschema | 26 |
| Onderhoud & Service | 27 |
| Opslag & Transport | 27 |
| Afvalverwerking & Recyclage | 28 |
| ■ Verwijdering van het Apparaat | 28 |
| ■ Verwijdering van de Batterij | 29 |
| ■ Verwijdering van Verpakkingsmateriaal | 29 |
| Garantie & Aansprakelijkheid | 30 |



Deze handleiding hoort bij de **Babeza®** Borstkolf en bevat belangrijke informatie over de veiligheid, gebruik en afvalverwerking. Lees de handleiding zorgvuldig door en volg de instructies en waarschuwingen om te zorgen voor je eigen veiligheid en de veiligheid van anderen.

Bewaar de handleiding voor verdere referentie, zelfs als je bekend bent met het product. Zorg ervoor dat je deze handleiding bijsluit wanneer je dit product doorgeeft aan derden.

De afbeeldingen in de handleiding zijn alleen ter illustratie en kunnen lichtjes afwijken van het product. **Babeza®** is in dat geval niet verplicht de handleiding aan te passen. Gebruik het werkelijke product als referentie.

Inleiding

Gefeliciteerd met je aankoop van de **Babeza®** Borstkolf. We zijn er trots op dit briljante product aan onze klanten te kunnen leveren. Je nieuwe apparaat is een investering die je zorg en aandacht verdient. Deze handleiding is samengesteld om je te helpen je product veilig en met plezier te bedienen.

Ons product voldoet aan de volgende wettelijke nationale en Europese eisen:



CE Certificaat:

De CE-markering (een acroniem voor het Franse “conformité européenne”) bevestigt dat een product voldoet aan de EU-eisen op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu, die de veiligheid van de consument garanderen.



Conform RoHS:

De RoHS-richtlijn 2015/863/EU (van het Engelse Restriction of Hazardous Substances - beperking van gevaarlijke stoffen), is een EU-richtlijn met als doel het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur te beperken. Iedere lidstaat van de EU moet een eigen wet aannemen om deze richtlijn in te voeren. Als een product RoHS-gecertificeerd is, bevestigt dit dat het aandeel gevaarlijke of moeilijk te verwijderen stoffen beperkt is tot het maximaal toegestane.



Conform de EMC richtlijn:

Dit product voldoet aan de (EMC) Richtlijn 2014/30/EU. EMC-conformiteit betekent dat een elektronisch of elektromechanisch product voldoet aan de wetten, richtlijnen en voorschriften van het land waar het wordt verkocht. Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) is het vermogen van een apparaat om te werken zoals bedoeld in een omgeving met andere elektrische apparaten of



bronnen van EMI zonder die andere apparaten te beïnvloeden. Een apparaat is EMC-compatibel als het de elektromagnetische omgeving niet zodanig beïnvloedt dat andere apparaten en systemen negatief worden beïnvloed.



Conform LFGB:

LFGB is de Duitse afkorting van de Wet Levensmiddelen en Waren, die wordt beschouwd als de belangrijkste wet betreffende het beheer van de voedselveiligheid in Duitsland. De LFGB is de leidende wet voor de Duitse hygiënevoorschriften en regelt de veiligheidsnormen voor levensmiddelen en aan levensmiddelen gerelateerde producten in het land.

Alle levensmiddelen en aanverwante producten moeten de overeenkomstige tests doorstaan en voldoen aan de LFGB om op de Duitse markt te mogen worden gebracht.

Over het algemeen is de LFGB strenger dan andere Europese voedselcontactverordeningen, zoals 1935/2004/EG.

Heb je vragen, opmerkingen of problemen bij het gebruik van het product, neem dan gerust contact met ons op via e-mail: ashwan@ash-e-commerce.com.


Wij wensen je veel plezier met je aankoop!

Beoogd Gebruik

Het beoogd gebruik van de **Babeza**® elektrische Borstkolf is om moedermelk uit de borsten van een moeder te halen wanneer je maar wilt of nodig hebt. Vervolgens kun je de melk bewaren voor later.

Onze elektrische Borstkolf gebruikt elektrische stimulatie om de melkstroom op gang te brengen en maakt het mogelijk om efficiënt en comfortabel melk af te kolven. Dit kan handig zijn voor moeders die haastig weer aan het werk moeten of andere verplichtingen hebben, moeders met een overproductie van melk, moeders die de melkproductie willen stimuleren of moeders die hun melk willen doneren aan anderen. Het afkolven van moedermelk met de **Babeza**® Borstkolf biedt flexibiliteit en maakt het mogelijk dat anderen de baby kunnen voeden met moedermelk wanneer de moeder niet beschikbaar is.

Er zijn geen andere toepassingen voor dit product.


 Gebruik dit product alleen zoals beschreven is in deze handleiding. Elk ander gebruik wordt als ongepast beschouwd en kan leiden tot persoonlijk letsel of materiële schade. **Babeza**® is niet aansprakelijk voor schade of letsel die het gevolg is van onjuist of onzorgvuldig gebruik.

Het Pakket

■ Inhoud

De volgende componenten zijn bij de levering inbegrepen:

- 1x **Babeza**® borstkolf ①
- 2x Flesje (180 ml) ②
- 2x Dop voor flesje ③
- 2x Borstschild (24 mm) ④
- 2x fopspeen ⑤
- 2x Kolf slang ⑥
- 1x USB oplaadkabel ⑦
- 1x Handleiding ⑧

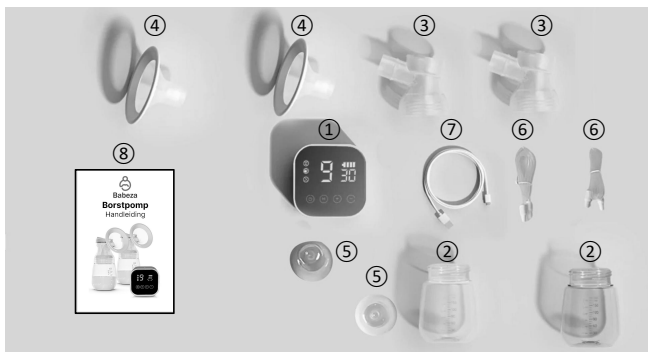

■ Uitpakken


Haal alles uit de verpakking en controleer op beschadigingen. Als dit het geval is, gebruik de Borstkolf dan niet. Wees zeer voorzichtig bij het openen van de verpakking om schade aan het product te voorkomen.

Controleer na het uitpakken van het product of de levering compleet is en of alle onderdelen in goede staat verkeren. Mis je een onderdeel, of je hebt een beschadigd onderdeel, neem dan contact met ons op via e-mail: ashwan@ash-e-commerce.com.


Verwijder voor gebruik alle verpakkingsmaterialen en stickers of etiketten.

■ Veiligheid Tijdens het Uitpakken

Laat het verpakkingsmateriaal, de USB kabel en de kolf slangen niet achteloos rondslingeren tijdens het uitpakken. Het kan gevaarlijk speelgoed worden voor kinderen. Gooi het verpakkingsmateriaal pas weg als de Borstkolf is uitgeprobeerd en werkt.

 **WAARSCHUWING:** Plastic zakken & folies.
Houd plastic zakken en folies uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen! Dunne folies kunnen aan de neus en mond blijven plakken en de ademhaling belemmeren.



 **WAARSCHUWING:** Wurggevaar.
Kabels, snoeren of koorden die langer zijn dan 18 cm (7 inch) kunnen schadelijk zijn voor baby's en zeer jonge kinderen.
Kinderen kunnen verstrikt raken tijdens het spelen met de USB-kabel of met een kolf slang. Laat de kabel en de kolf slangen niet rondslingeren.



Technische Gegevens

| | |
|--------------------------------|---|
| Productnaam | Elektrische Borstkolf |
| Model | RH-318BB |
| Merk | Babeza® |
| Kleur | Roze |
| Materiaal | ABS, Siliconen, PP |
| BPA-vrij | Ja |
| Batterij type | Lithium |
| Batterij vermogen | 2200 mAh |
| Batterij oplaadspanning | 5 V dc / 1 A (USB-voedingsspanning) |
| oplaadpoort | USB-C |
| Batterij oplaadduur | 3,5 uur |
| Batterij gebruiksduur | 1 uur |
| Vermogen | 5 W |
| Zuigkracht | 0,4 kPa |
| Geluid | ≤ 48 dB(A) |
| Gebruikstemperatuur | 5 °C ~ 40 °C |
| Vochtigheid | 10 % ~ 90% RH |
| Gewicht | 0,78 kg |
| Afmetingen | - 105 x 190mm (pomp) - 55 x 47 (borstschild) |
| Certificaten | CE, RoHS, EMC |




OPMERKING:

Vanwege voortdurende verbeteringen aan ons product kunnen de technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.




■ Het Scherm en de Knoppenfuncties

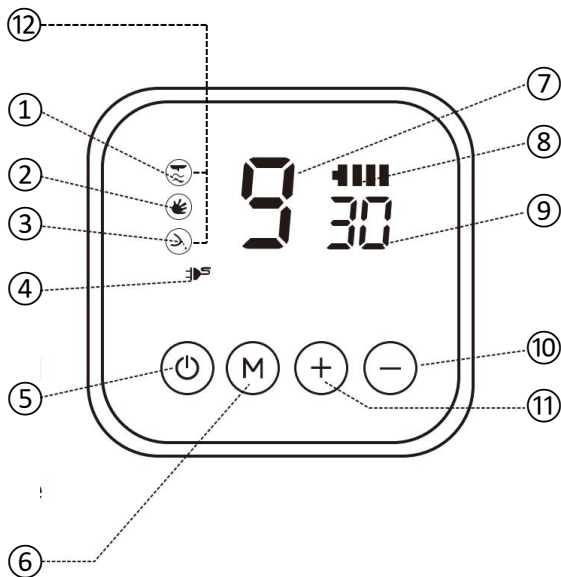

- ① Borstvoeding modus
- ② Massage modus
- ③ Pomp modus
- ④ Plug-in indicatie
- ⑤ AAN/UIT knop
- ⑥ Modus selectie

- ⑦ Zuigniveau weergave
- ⑧ Batterij weergave
- ⑨ Tijdweergave
- ⑩ Omlaag knop
- ⑪ Omhoog knop
- ⑫ Bionische modus

■ De Accessoires

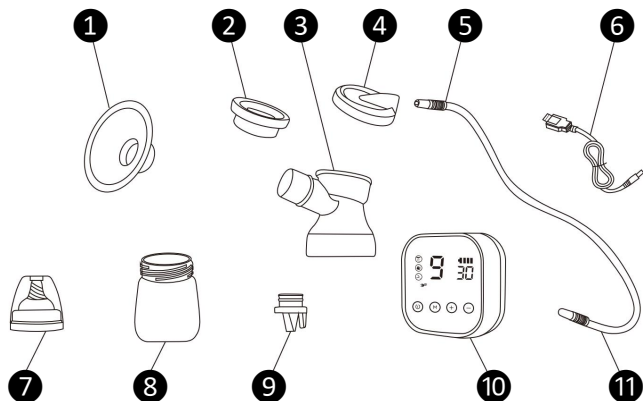

1 Borstschild (Siliconen)

2 Cilinder (Siliconen)

3 Flesaansluiting (PP)

4 Cilinder kop (PP)

5 Slangkoppeling (PP/TPR)

6 USB-kabel

7 Fopspeen kit (Siliconen + PP)

8 Flesje 180ml (PP)

9 Ventiel (Siliconen)

10 Pomp

11 Kolf slang (Siliconen)

Product Eigenschappen


1. Gevoelig aanraakscherm: eenvoudig te bedienen, duidelijke weergave.
2. Er zijn 4 modi met telkens 9 niveau instellingen. Het apparaat kan zuigen en masseren, in de borst knijpen en de lactatie stimuleren tijdens het zuigen.
3. Geen melkretour bij het zuigen.
4. Materiaal van medische kwaliteit. Gebouwd met 100% BPA-vrij materiaal van medische kwaliteit. Alle onderdelen gemaakt van voedselveilige siliconen.
5. Superstil: minder dan 50 dB. Het apparaat maakt zachte geluiden die voor een goede slaapomgeving voor je baby zorgen.
6. Opladen via USB: hierdoor kun je het apparaat altijd en overal gebruiken en opladen met opladers, computers of powerbanks.
7. Gemakkelijk schoon te maken: de accessoires voor de Borstkolfset zijn heel gemakkelijk afneembaar en schoon te houden.



De Montage van de Onderdelen

- ⚠ WAARSCHUWINGEN:**
- Zorg ervoor dat je de pomp en de accessoires reinigt volgens de instructies in deze handleiding voordat je alles monteert (zie het hoofdstuk "Reiniging").
 - Was jouw handen grondig voordat je gereinigde onderdelen monteert.
 - Zorg er altijd voor dat alle onderdelen volledig droog zijn voordat je ze monteert.
 - Zorg ervoor dat je de pomp en de accessoires correct monteert volgens de instructies in deze handleiding.

STAP 1

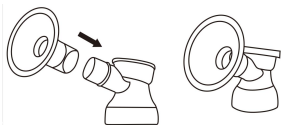


Steek het borstschild in de zijkant van de flensaansluiting. Zorg ervoor dat het borstschild strak op de flensaansluiting zit.



OPMERKING:


Bij het terug verwijderen van het borstschild neem je met de ene hand de flensaansluiting vast. Met de andere hand trek je voorzichtig het borstschild van de flensaansluiting. Niet forceren!

STAP 2

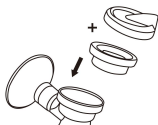

Plaats de cilinder in de bovenkant van de flensaansluiting.
Plaats de cilinderkop op de cilinder en draai de cilinderkop vast.

STAP 3

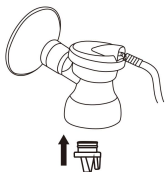

Plaats het ventiel in de onderkant van de flensaansluiting om ervoor te zorgen dat er geen lekkage is.



OPMERKING:


Het ventiel voorkomt terugstromen of overstromen van moedermelk en het anti-terugstroomontwerp voorkomt dat moedermelk wordt besmet.

STAP 4



Schroef de flensaansluiting op de fles.

STAP 5

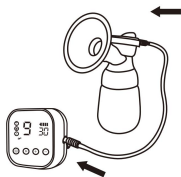

Steek de slangkoppeling van de kolf slang in de cilinderkop en de ander kant van de slang in de slangaansluiting van de pomp.
Zorg ervoor dat er geen luchtlekkage is.



OPMERKINGEN:

- Er zit een stofafdekking in de slangaansluiting van de pomp. Verwijder altijd de stofafdekking voor je de slangkoppeling van de kolf slang aansluit.
- Start nooit de pomp zonder de stofafdekking te verwijderen, anders heeft dit invloed op de levensduur van de pomp.

De Borstkolf Gebruiken



WAARSCHUWING:


Het gebruik van de Borstkolf mag geen pijn veroorzaken. Probeer niet af te kolven met een te hoge of oncomfortabele intensiteitsinstelling. Als je tijdens het kolven overmatig ongemak of pijn voelt, stop dan met kolven.

■ Voorbereiding






Controleer alle onderdelen voor gebruik en zorg ervoor dat de gesteriliseerde onderdelen (onderdelen die in direct contact komen met moedermelk) schoon en waterdicht zijn en dat de flesaansluiting via de kolf slang goed aangesloten is met de pomp.

Reinig, comprimeer en masseer borsten en tepelhof met natte en warme handdoeken voordat je gaat zuigen. Ontspan je lichaam om de pijn van het melken te verlichten.


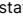
■ Opstarten

- Raak de  knop gedurende 2 seconden aan en dan gaat het apparaat standaard naar de borstvoeding modus.
- Na het opstarten kan je kiezen tussen de borstvoeding modus, massage modus en pomp modus.

■ Het Scherm

- Tijdens het werken brand het lampje:
 -  (als de borstvoeding modus geselecteerd werd)
 -  (als de massage modus geselecteerd werd)
 -  (als de pomp modus geselecteerd werd)
 -  +  (als de bionische modus geselecteerd werd)
- **Borstvoeding modus:** de intensiteit kan in 9 niveaus worden ingesteld. Het scherm zal ook het overeenkomstige nummer weergeven.



- **Massage modus:** de intensiteit kan in 9 niveaus worden ingesteld. Het scherm zal ook het overeenkomstige nummer weergeven.
- **Pomp modus:** de intensiteit kan in 9 niveaus worden ingesteld. Het scherm zal ook het overeenkomstige nummer weergeven.
- **Bionische modus:** de intensiteit kan in 9 niveaus worden ingesteld. Het scherm zal ook het overeenkomstige nummer weergeven.
- Wanneer gevoed door de ingebouwde batterij, is het op het LED-scherm een statische weergave van de batterijspanning  te zien. Wanneer gevoed via de USB-oplaadkabel, zal de laadstatus van de batterij  dynamisch worden weergegeven.
- Wanneer het batterijvermogen tot het laagste punt daalt, knippert de rechterkant van het batterijsymbool. De andere drie delen van het batterij-icoontje zijn niet helder en het LED-scherm gaat na 10 seconden uit.

■ De 4 Modi

- **Borstvoeding modus:** de zuigkracht kan in 9 niveaus worden ingesteld. Druk op de “+” en “-” knop om het niveau aan te passen.
- **Massage modus:** de zuigkracht kan in 9 niveaus worden ingesteld. Druk op de “+” en “-” knop om het niveau aan te passen.
- **Pomp modus:** de intensiteit kan in 9 niveaus worden ingesteld. Het scherm zal ook het overeenkomstige nummer weergeven.
- **Bionische modus:** de zuigkracht kan in 9 niveaus worden ingesteld. Druk op de “+” en “-” knop om het niveau aan te passen.
- Tijdens het gebruik kan door op de M-toets te drukken van werkmodus worden veranderd. Enkel de niveaus (van 1 tot 9) worden onthouden.



Borstvoeding modus (9 niveaus)



100-115 keer per minuut stimulatie van de tepel en tepelhof, hoog rendement om een melkuitstootreflex te bereiken.



Pomp modus (9 niveaus)



De frequentie is in evenwicht met de zuigkracht, en de pulsstimulatie wordt toegevoegd tijdens het kolven. Daardoor kan er meer melk in dezelfde tijd worden afgegeven.



Massage modus (9 niveaus)



Trillingen van 48-84 keer/min raken de borsten diep, stimuleren meer melkstoten en zijn efficiënter.



Bionische modus (9 niveaus)



Simuleert de borstkolfmethode van de baby. Zuigt gelijkmatig en laat los, met matige kracht, om pijnloos borstkolven te bereiken.




■ De Geheugenfunctie

Start borstvoeding modus, massage modus of zuigmodus. Pas het vereiste niveau aan. Als gedurende meer dan 3 seconden het apparaat werkt, dan zal het automatisch de werkende modus onthouden. Bij de volgende start wordt de in het geheugen bewaarde modus gestart.

De Juiste Zitpositie

Ontspan en ga in een comfortabele stoel zitten. Leun iets naar voren (gebruik een kussen voor rugsteun).

-  **WAARSCHUWING:**
- De Borstkolf mag niet gebruikt worden terwijl je rondloopt, ligt, of wanneer je zich bezighoudt met inspannende oefeningen of activiteiten met risico op letsel.



■ Moedermelk Bewaren

1. Bewaar alleen moedermelk die is opgevangen met gesteriliseerde borstkolven.
2. De geëxtraheerde melk kan in een schone en gesteriliseerde melkbewaarzak of een melkfles met afsluiting worden gedaan en moet onmiddellijk in de koelkast worden geplaatst om te koelen of in de diepvries om in te vriezen.

■ Koude Opslag van Moedermelk

1. Vries moedermelk niet herhaaldelijk in.
2. Meng geen verse moedermelk met bevroren moedermelk.
3. Zorg ervoor dat je de moedermelk die na het voeden is achtergebleven, weggooit.
4. De geëxtraheerde melk kan 48 uur in de koelkast worden bewaard of drie maanden in de diepvries worden ingevroren. Voorzie de melkfles of melkbewaarzak van een label waarop duidelijk de melkdatum en -tijd staat vermeld.



Bewaar de moedermelk in het koudste gedeelte van de koelkast: de achterkant van het schap boven het groentevak. Bewaar de moedermelk niet in de deur van de koelkast.

■ Moedermelk Ontdooien

Plaats de bevroren moedermelk een nacht in de koelkast om te ontdooien. In noodgevallen kun je een kom met heet water gebruiken om moedermelk te ontdooien. Na het ontdooien van moedermelk moet deze binnen 24 uur worden geconsumeerd

■ Verwarming van Moedermelk

1. Zet de babyfles rechtop in een kom met heet water of verwarm de moedermelk veilig en snel met een babyfles en voedselverwarmer.
2. Onthoud dit! Controleer altijd de temperatuur van de moedermelk voordat je jouw baby voedt.
3. Gebruik geen magnetron om moedermelk op te warmen, omdat dit belangrijke voedingsstoffen en antilichamen kan vernietigen. Bovendien kan ongelijkmatige verwarming een gedeeltelijke oververhitting van de vloeistof veroorzaken, wat brandwonden kan veroorzaken.
4. Dompel de melkbewaarzak niet onder in kokend water om hem te verwarmen om te voorkomen dat hij breekt of barst.

■ De Voeding van de Borstkolf

Als tijdens het gebruik een USB-adapter is aangesloten, dan wordt het apparaat gevoed door de adapter. Als er geen adapter is aangesloten, gebruikt het apparaat automatisch de ingebouwde batterij om stroom te leveren.

■ Opladen



WAARSCHUWINGEN:

- Laad de batterij van de Borstkolf volledig op voordat je het voor het eerst gebruikt of na een lange periode van niet-gebruik.
 - Om de levensduur van je batterij te verlengen, laat je deze elke maand leeglopen en laadt je deze vervolgens volledig op.
 - Volg altijd de veiligheidsinstructie zoals beschreven in het hoofdstuk "Veiligheidsinstructies - Batterijveiligheid".
- Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld.
 - Sluit de meegeleverde USB-kabel aan op de oplaadpoort van de Borstkolf en steek het andere uiteinde van de oplaadkabel in een 5 V / 1 A USB-adapter (niet meegeleverd). Wij raden het gebruik van een USB-adapter aan, maar het gebruik van de USB-interface van een computer/laptop of een powerbank is ook mogelijk.
 - Om de oplaadtijd te verkorten is de 5 V / 1 A USB-adapter de beste keuze.
 - Sommige USB-uitgangen hebben mogelijk onvoldoende uitgangsstroom, wat de oplaadsnelheid vertraagt of zelfs het opladen belemmert.
 - Wanneer het apparaat wordt opgeladen, knippert het batterij icoontje op het scherm.
 - Wanneer de batterij volledig is opgeladen, stopt het batterij icoontje op het scherm met knippen.
 - Koppel de USB-kabel los wanneer het opladen is voltooid.
 - De oplaadtijd van een lege batterij naar een volle batterij is 3,5 uur.



OPMERKINGEN:

- Wanneer het batterijvermogen tot het laagste punt daalt, knippert de rechterkant van het batterijsymbool, zijn de andere drie gedeeltes van het batterijsymbool niet helder en gaat het LED-scherm na 10 seconden uit.
- Wanneer het vermogen te laag is, stopt het apparaat automatisch met werken.
- Wanneer de batterij vol is, stopt het opladen automatisch om schade aan de batterij te voorkomen.




Problemen Oplossen

| Probleem | Oorzaak | Oplossing |
|--------------------------|--|--|
| Kleine zuigkracht | Er is een luchtlekkage in de verbinding (ventiel, cilinder, cilinderkop, fles aansluiting, slang en pomp). De luchtaansluiting van de pomp is geblokkeerd (zoals een knik in de slang of vuil in de luchtweg van de slang). | Controleer alle verbindingen van de onderdelen, maak alles schoon en plaats alles terug. |
| Geen zuigkracht | Het ventiel is niet geïnstalleerd of vervormd. Verkeerd gebruik van de plastic onderdelen door ze te desinfecteren met de magnetron of snelkookpan, met vervorming en schade tot gevolg. | Installeer het ventiel of vervang de defecte onderdelen. |
| | 1. De slangkoppeling is niet aangesloten op de pomp. 2. De batterij is bijna leeg. | 1. Sluit de slangkoppeling opnieuw aan. 2. Laad de batterij op. |
| Geen melkstroom | Zoek naar melk of water dat de cilinder of slang binnenkomt en controleer of de cilinder beschadigd is of niet is geïnstalleerd. | Stop onmiddellijk. Reinig of vervang de cilinder en installeer deze opnieuw. |



Veiligheidsinstructies

 **LEES** de gebruikersinstructies aandachtig en let vooral op de veiligheidsinstructies. Als je de veiligheidsinstructies en informatie over het juiste gebruik in deze handleiding niet opvolgt, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventueel daaruit voortvloeiend persoonlijk letsel of schade aan eigendommen. In dergelijke gevallen vervalt de garantie.

Elektrische apparaten en batterijen kunnen mensen, vooral kinderen, blootstellen aan gevaren die zowel ernstig letsel als de dood tot gevolg kan hebben. Het gebruik van elektrische apparaten en batterijen kan gevaren opleveren, waaronder, maar niet uitsluitend, letsel, brand, elektrische schokken en schade aan het elektrische systeem. Deze veiligheidsinstructies zijn bedoeld om je de informatie te geven die je nodig hebt om de **Babeza®** Borstkolf te gebruiken en om dergelijke gevaren te voorkomen. Gezond verstand en respect voor het apparaat helpen het risico op letsel te verminderen.

Alle mogelijke gevaren kunnen hier niet worden behandeld, maar we hebben geprobeerd enkele van de belangrijkste te benadrukken. Neem ook de waarschuwingen of veiligheidsvoorschriften in de afzonderlijke hoofdstukken van deze handleiding in acht.

Als je vragen hebt die onbeantwoord blijven door deze waarschuwingen en veiligheidsinstructies, neem dan contact met ons op via onze e-mail:

ashwan@ash-e-commerce.com.

■ Algemene Apparaat Veiligheid

- Gebruik de Borstkolf niet voor een ander doel dan waarvoor het bedoeld is (zie het hoofdstuk "Beoogd Gebruik").
- De Borstkolf is alleen ontworpen en bedoeld voor privégebruik en is niet geschikt voor commerciële doeleinden.
- Gebruik het apparaat niet op plaatsen waar het gebruik van elektronische apparatuur niet is toegestaan.
- De Borstkolf is bedoeld voor gebruik binnenshuis, maar kan bij droog weer ook buiten gebruikt worden (het apparaat is niet waterdicht). Het wordt aanbevolen om het apparaat bij gebruik buitenshuis gedurende langere tijd niet in direct zonlicht te plaatsen. Het apparaat moet na gebruik weer binnen geplaatst worden.
- Ga voorzichtig met het apparaat om. Schokken, stoten of een val, zelfs van geringe hoogte, kunnen het apparaat beschadigen.
- Plaats de Borstkolf niet op een onstabiel oppervlak. Dit kan leiden tot vallen en kan storingen veroorzaken.
- Plaats de Borstkolf niet onder mechanische belasting.



- Alle onderdelen moeten op de juiste wijze gemonteerd zijn om de veiligheid van het apparaat te kunnen garanderen.
- Het apparaat moet goed en veilig zijn aangesloten tijdens het opladen. Volg de instructies om mogelijk schade/letsel te voorkomen.
- Gebruik nooit accessoires die niet door de producent worden aanbevolen. Ze kunnen een gevaar vormen voor de gebruiker en het apparaat beschadigen.
- Steek geen voorwerpen of vingers in welke opening ook.
- Oefen geen overmatige kracht uit bij het gebruik van de knoppen op de Borstkolf.
- Oefen geen overmatige kracht uit op het scherm en raak het scherm niet aan met scherpe voorwerpen.
- Gebruik de Borstkolf niet in de buurt van sterke magnetische velden, bijv. motoren, transformatoren, mobiele telefoons, e.d.
- Als het niet meer mogelijk is om de Borstkolf veilig te gebruiken, stel het apparaat dan buiten gebruik en bescherm het tegen onbedoeld gebruik. Een veilige werking kan niet langer worden gegarandeerd als het apparaat:
 - zichtbaar beschadigd is,
 - niet meer naar behoren werkt,
 - gedurende langere perioden in slechte omgevingsomstandigheden is opgeslagen of
 - is blootgesteld aan ernstig transport gerelateerde belastingen.

■ Personen & Gebruik

- De Borstkolf is geen speelgoed. Houd en bewaar het apparaat buiten bereik van kleine kinderen.
- Het apparaat mag alleen door volwassenen (vrouwen) worden gebruikt.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

■ Elektronica & USB-Adapter

- Je mag de Borstkolf niet reconstrueren, repareren of demonteren. Dit kan het apparaat beschadigen.
- Onderhoud, wijzigingen en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de fabrikant, een door de fabrikant aangewezen professionele werkplaats of een gelijkwaardig gekwalificeerde persoon.
- Controleer het apparaat af en toe op beschadigingen. Gebruik het apparaat nooit als het tekenen van beschadiging vertoont.
- Gebruik alleen een USB-adapter met een 5 V / 1 A uitgang (niet meegeleverd) om de batterij van de Borstkolf op te laden. Een andere adapter met de verkeerde specificaties kan storingen en/of schade veroorzaken. Opladen met een powerbank of het gebruik van een USB-poort van een laptop/computer is toegestaan, maar wordt niet aanbevolen.



- Zorg ervoor dat je stopcontact de juiste voedingsspanning levert voor de USB-adaptor om schade aan de adaptor en/of de Borstkolf te voorkomen.
- Het stopcontact moet zich in de buurt van het apparaat bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Verwijder steeds de USB-adaptor uit het stopcontact wanneer de batterij niet opgeladen wordt en voor het schoonmaken.
- Forceer de stekker van je USB-adaptor nooit in een stopcontact; als hij niet gemakkelijk in het stopcontact past, stop dan met het gebruik. Zorg er altijd voor dat de stekker van je USB-adaptor goed in het stopcontact zit.
- Het is normaal dat de USB-adaptor een beetje warm aanvoelt; een losse passing tussen het stopcontact en de stekker van de USB-adaptor kan echter oververhitting en vervorming van de stekker veroorzaken. Neem contact op met een gekwalificeerde elektricien om het losse of versleten stopcontact te vervangen.
- Om de USB-adaptor los te koppelen, neem je de adapterbehuizing vast en trek je de adaptor uit het stopcontact.
- Als de stroom uitvalt tijdens het gebruik opladen, schakel het apparaat dan onmiddellijk uit en verwijder de USB-adaptor uit het stopcontact.
- Schakel bij rookontwikkeling of ongebruikelijke geluiden of geuren de Borstkolf direct uit en haal de stekker uit het stopcontact. In deze gevallen mag de Borstkolf niet worden gebruikt totdat deze is geïnspecteerd door de fabrikant of een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon. Adem nooit rook in van een potentiële apparaatbrand. Raadpleeg een arts als je rook hebt ingeademd. Het inademen van rook kan schadelijk zijn.
- Koppel om veiligheidsredenen altijd de USB-adaptor los in geval van onweer.

■ USB-Kabel

- Wijzig de USB-kabel niet.
- Controleer de kabel regelmatig op beschadigingen. Gebruik de kabel nooit als er tekenen van beschadiging zijn.
- Forceer nooit een connector in een USB-poort. Als de connector en poort niet gemakkelijk samenkomen, dan komen ze waarschijnlijk niet overeen. Controleer op obstructies en zorg ervoor dat de connector overeenkomt met de poort en dat je de connector correct hebt gepositioneerd ten opzichte van de poort.
- Trek de USB-kabel nooit van de adaptor of Borstkolf door aan de kabel te trekken. Trek altijd aan de USB-connector.
- Zorg ervoor dat je niet over de kabel struikelt.
- De kabel mag niet worden geknikt, bekneld of gedraaid.
- Zorg ervoor dat de USB-kabel niet wordt samengedrukt, gebogen, beschadigd door scherpe randen of onder mechanische belasting komt te staan.
- Leg nooit een knoop in de kabel en bind geen kabels samen.
- Vermijd overmatige thermische belasting van de kabel door extreme hitte of kou.
- Kinderen kunnen verstrikt raken tijdens het spelen met de kabel (wurggevaar). Elektrische kabels zijn geen speelgoed.



■ Hitte & Koeling

- De Borstkolf kan warm worden tijdens gebruik of tijdens het opladen. Dit is normaal.
- Dek het apparaat niet af terwijl het opgeladen wordt, omdat dit kan leiden tot oververhitting van de Borstkolf. Dit vormt een risico op brand, elektrische schokken of letsel.
- Zorg voor een goede ventilatie rondom het apparaat tijdens het opladen.
- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen en uit of weg van gebieden waar de omgevingstemperatuur relatief hoog is (bijv. fornuizen of andere warmtebronnen). Gebruik het apparaat nooit in de buurt van open vuurbronnen (zoals brandende kaarsen) of op hete oppervlakken.
- De Borstkolf is ontworpen om het beste te werken bij normale omgevingstemperaturen tussen 0 °C en 35 °C en te worden bewaard bij temperaturen tussen 0 °C en 45 °C. De Borstkolf kan beschadigd raken en de levensduur van de batterij kan verkorten als het apparaat buiten deze temperatuur bereiken wordt bewaard of gebruikt. Stel je apparaat niet bloot aan dramatische veranderingen in temperatuur. Bewaar je apparaat niet in een hete auto of gedurende langere tijd in direct zonlicht. Plaats het apparaat niet in de buurt van een raam (vooral niet in de zomer).

■ Water

WAARSCHUWING: Dit apparaat is niet waterdicht.

- Gebruik de Borstkolf nooit met vochtige of natte handen. Vocht kan leiden tot elektrische schokken of kortsluitingen.
- Gebruik de Borstkolf niet in of nabij een bad, douche, zwembad of een met water gevulde container, zoals bijv. een wasbak.
- Niet opladen in natte of vochtige omgevingen (zoals de badkamer).
- Niet gebruiken in natte omgevingen en niet onderdompelen in vloeistof. Giet nooit vloeistoffen boven of in de buurt van de Borstkolf. Er bestaat gevaar voor elektrische schokken/kortsluiting! Als er toch vloeistof in de behuizing komt schakel dan de Borstkolf onmiddellijk uit.
- Grijp niet naar het apparaat als het in water is gevallen tijdens het opladen. Koppel het onmiddellijk los van het stopcontact en haal het pas daarna uit het water.
- Let erop dat het apparaat op een droge ondergrond staat of ligt.



■ Batterij Veiligheid

- Plaats de Borstkolf niet in de buurt van vuur of in direct zonlicht. De opwarming van het apparaat kan extra verwarming, breuk of ontsteking van de batterij veroorzaken.
- Laad de batterij niet op bij temperaturen onder 5 °C of boven 40 °C.
- Ga niet door met het opladen van de batterij als deze niet binnen de opgegeven oplaadtijd oplaadt. Als je dit wel doet, kan de batterij heet worden, scheuren of ontbranden. Koppel het apparaat los als het volledig is opgeladen of als het onbeheerd wordt achtergelaten tijdens het opladen.
- Probeer de batterij niet op te laden als de batterij stoffen afgeeft. Neem in dat geval bij brand of explosie direct afstand van de batterij. Laad alleen op met een oplader met de juiste specificaties.
- Laad de batterij niet op in de buurt van ontvlambare materialen (brandgevaar).
- Probeer de batterij niet aan te passen, uit elkaar te halen of te vervangen.
- Gebruik je Borstkolf niet als een batterij geur begint af te geven, oververhit raakt of begint te lekken.
- Raak geen lekkende materialen aan en adem de dampen van de batterij niet in. Een lekkende of beschadigde batterij kan bij contact met de huid bijtend letsel veroorzaken, draag daarom in dat geval geschikte veiligheidshandschoenen.
- De batterij bevat gevaarlijke stoffen. Open de batterij niet en plaats niets in een blootliggende batterij.
- Sta niet toe dat kinderen en dieren een blootgestelde batterij aanraken.
- Gooi de batterij nooit in het vuur.
- Niet kortsluiten. Bij kortsluiting kan de batterij exploderen of lekken.
- Een lege batterij kan nog steeds gevaarlijk zijn.
- Houd de batterij uit de buurt van kinderen, baby's of dieren.

■ Medische Overwegingen

- Het wordt aanbevolen om een arts te raadplegen voordat je de Borstkolf gebruikt als je een actief geïmplanteed apparaat hebt dat beïnvloed zou kunnen worden door een magnetisch veld (bijv. pacemaker, implanteerbare cardioverter defibrillator).
- Stop het gebruik als huidirritatie het gevolg is van direct contact met het product.
- Dit is een product voor één gebruiker. Gebruik door meer dan één persoon kan een gezondheidsrisico opleveren.
- Kolven kan de bevalling opwekken. Niet afkolven tot na de bevalling. Als je zwanger wordt terwijl je borstvoeding geeft of afkolft, raadpleeg dan een bevoegd arts voordat je doorgaat met het gebruik van de Borstkolf.



■ De Borstkolf

 Deel de Borstkolf om hygiënische redenen niet met andere personen.

- Schakel de stroom uit voordat je gaat reinigen. Reinig nooit tijdens het opladen van de batterij. Koppel altijd je USB-adapter los.
- Een schone licht vochtige of droge doek wordt aanbevolen voor het reinigen van de buitenkant van de Borstkolf. Droog af met een zachte doek.
- Pas op dat je tijdens het schoonmaken niet te veel druk op het scherm en de knoppen uitoefent.
- Dompel de Borstkolf niet onder in water of andere vloeistoffen. Het is niet toegestaan om het apparaat met water af te spoelen, om te voorkomen dat het water in het elektrische circuit lekt en storingen veroorzaakt.
- Gebruik in geen geval agressieve reinigingsmiddelen, reinigingsalcohol of andere chemische oplossingen, omdat deze de behuizing kunnen binnendringen of de functionaliteit kunnen aantasten.
- Plaats het apparaat en de accessoires niet in de vaatwasser om te reinigen.
- Gebruik voor het schoonmaken geen schurende voorwerpen.
- Reiniging mag niet worden uitgevoerd door kinderen.

■ De Accessoires

 **WAARSCHUWINGEN:**

- Reinig altijd de onderdelen die in contact komen met melk om de ophoping van droge melkresten te voorkomen, die de groei van bacteriën kunnen veroorzaken die schadelijk kunnen zijn voor jou en jouw baby.
- Wees voorzichtig bij het verwijderen en schoonmaken van het ventiel, als het ventiel beschadigd is zal de Borstkolf niet goed werken.
- Om het ventiel schoon te maken, wrijf het zachtjes in warm water met een paar druppels reinigingsvloeistof. Steek geen voorwerpen in het ventiel die schade kunnen veroorzaken.
- Plaats de accessoires niet in de vaatwasser om te reinigen.

Reinig met de hand:

- Plaats de accessoires in een schoon bassin die alleen wordt gebruikt voor babyvoedingsitems te wassen. Plaats de accessoires niet direct in de gootsteen.
- Voeg een mild afwasmiddel en heet water toe aan het bassin.
- Schrob de onderdelen alleen met een schone borstel voor babyvoedingsitems.
- Spoel af door de onderdelen onder stromend water te houden of ze onder te dompelen in zoet water in een apart bassin.
- Alles grondig aan de lucht laten drogen. Plaats de accessoires, het bassin en de flessenborstel op een schone, ongebruikte theedoek of papieren handdoek in een



ruimte die beschermd is tegen vuil en stof. Gebruik geen vaatdoek om onderdelen droog te wrijven of te deppen.

- Reinig het wasbassin en de flessenborstel minstens om de paar dagen met de hand. Spoel ze goed af en laat ze na elk gebruik aan de lucht drogen.

■ Reinigingsschema



WAARSCHUWING:

De Borstkolf en de accessoires wordt niet steriel geleverd. De accessoires moeten voor het eerste gebruik worden gereinigd en gesteriliseerd.

Voor het eerste gebruik: Steriliseer alle wasbare onderdelen

1. Kook vijf minuten in water
2. Droog volledig af voor montage
3. De pomp: Reinigen met een schone licht vochtige of droge doek en droog volledig af. Dompel de pomp niet onder in water.

Na elk gebruik: Reinig alle wasbare onderdelen

1. Spoelen in koud, helder water (ca. +20°C)
2. Wassen in warm water (ca. +30 °C) met een mild afwasmiddel.
3. Afspoelen met koud, helder water (ca. +20 °C) gedurende 10 tot 15 seconden
4. Droog volledig af voor montage

Een keer per dag: Steriliseer alle wasbare onderdelen

1. Kook vijf minuten in water
2. Droog volledig af voor montage
3. De pomp: Indien nodig reinigen met een schone licht vochtige of droge doek en droog volledig af. Dompel de pomp niet onder in water.



Onderhoud & Service

- De Borstkolf is op reiniging na verder onderhoudsvrij (zie het hoofdstuk "Reiniging").
- Je mag de Borstkolf niet reconstrueren, zelf repareren of demonteren.
- Door veelvuldig gebruik zullen onderdelen slijten. Versleten onderdelen kunnen de prestaties beïnvloeden. Voor een optimaal resultaat moet je tijdig versleten onderdelen vervangen.
- Controleer regelmatig op beschadigingen en ernstige slijtage.



WAARSCHUWINGEN:

- Probeer de Borstkolf niet te openen voor onderhoud. Het verwijderen van de behuizing of een onjuiste hermontage kan elektrische schokken, schade, kortsluitingen of brand veroorzaken.
 - Als je om welke reden dan ook de behuizing opent, vervalt de garantie. De Borstkolf bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. De batterij kan niet vervangen worden.
 - Onderhoud, wijzigingen en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de fabrikant, een door de fabrikant aangewezen professionele werkplaats of een gelijkwaardig gekwalificeerde persoon. Om onderhoud of service te verkrijgen, neem dan eerst contact met ons op via ons e-mailadres ashwan@ash-e-commerce.com.
- Neem voor ontbrekende accessoires zoals de handleiding of andere items contact met ons op via bovenstaand e-mailadres.
 - Stuur in geval van defect het product terug naar **Babeza®** met een beschrijving van het defect, het aankoopbewijs en alle toebehoren.

Opslag & Transport

- We raden aan om de Borstkolf schoon te maken voordat je het apparaat voor lange tijd opbergt.
- Bewaar geen natte of vochtige onderdelen, aangezien er schimmel kan ontstaan.
- Bewaar de Borstkolf op een stofvrije plaats die niet wordt blootgesteld aan zonlicht en vochtigheid.
- Bewaar de Borstkolf niet bij extreem hoge of extreem lage temperaturen. Dit kan het apparaat beschadigen.
- Bewaar het apparaat buiten bereik van kleine kinderen.
- Rol de USB-kabel op maar wikkel hem niet om het apparaat.
- Bescherm het apparaat tijdens transport tegen trillingen en schokken.
- Na transport of opslag bij zeer koude temperaturen, moet de Borstkolf gedurende ca. 30 minuten aan kamertemperatuur wennen in verband met mogelijke condensatie. Daarna kan het apparaat gebruikt worden.



■ Verwijdering van het Apparaat



Dit product voldoet aan de richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur 2012/19/EU (WEEE).

Het symbool met de doorstreepte vuilnisbak op het apparaat geeft aan dat het product op het einde van zijn levenscyclus afzonderlijk van het gewoon huishoudelijk afval moet worden afgedankt en hiervoor naar een centrum voor gescheiden afvalophaling voor de recyclage van elektrische en elektronische apparatuur moet worden gebracht of terugbezorgd moet worden aan de verkoper op het moment waarop een nieuw gelijkaardig apparaat wordt aangekocht.

De gebruiker is er verantwoordelijk voor om het apparaat op het einde van de levenscyclus naar een dienst voor afvalophaling te brengen. De correcte gescheiden afvalophaling met het oog op de daaropvolgende recyclage, verwerking en milieuvriendelijke afdanking van het apparaat draagt bij tot het voorkomen van mogelijke negatieve invloeden op het milieu en de gezondheid en bevordert de recyclage van de materialen waaruit het product is samengesteld. De onrechtmatige afdanking van het product door de gebruiker heeft door de wet vastgelegde administratieve sancties tot gevolg. Voor meer gedetailleerde informatie over de recyclage van dit product en de beschikbare ophaalsystemen, wendt je zich tot de lokale dienst voor afvalophaling of de winkel waar je het product hebt gekocht.

Voldoe aan je wettelijke verplichtingen en draag bij aan de bescherming van het milieu.

■ Verwijdering van de Batterij



De omgang met en in het bijzonder de verwijdering van batterijen en accu's is onderworpen aan gedefinieerde voorschriften, die door de Europese Commissie bindend zijn geworden door de Europese Batterijrichtlijn 2006/66/EC.



Dit apparaat bevat een Lithium batterij die niet met het huishoudelijk afval mag weggegooid worden. De batterij moet worden gerecycled volgens de plaatselijke voorschriften.

Verwijder de batterij uit het apparaat voordat je deze weggooit. Indien het verwijderen van de batterij niet mogelijk is, breng dan het apparaat met de batterij naar een inzamelbak voor elektrische apparaten.

Je bent als eindverbruiker volgens de KCA-voorschriften (Klein chemisch afval) wettelijk verplicht alle lege batterijen in te leveren.

■ Verwijdering van Verpakkingsmateriaal



Volg de aanwijzingen en markeringen op de verpakking.

Zorg ervoor dat plastic zakken, verpakkingen enz. op een juiste milieuvriendelijke manier worden weggegooid. Deponeer deze materialen niet zomaar bij het normale huisvuil, maar zorg ervoor dat ze worden ingezameld voor hergebruik.

Garantie & Aansprakelijkheid

Babeza® garandeert dat dit product gedurende één jaar vanaf de aankoopdatum vrij zal zijn van materiaal- en fabricagefouten. Deze garantie is van toepassing op producten die voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt en niet voor commerciële of verhuurdoeleinden. **Babeza®** zal, naar eigen goeddunken, dit product of enig onderdeel van het product dat defect blijkt te zijn tijdens de garantieperiode vervangen of repareren. Vervanging vindt plaats door een nieuw of gereviseerd product of onderdeel. Als het product niet langer beschikbaar is, kan een vervanging worden gemaakt door een vergelijkbaar product van gelijke of hogere waarde, er wordt geen terugbetaling verleend. Dit is jouw exclusieve garantie. Je vervangende apparaat wordt kosteloos aan je geretourneerd en valt gedurende de rest van de garantieperiode onder deze garantie.

Deze garantie is geldig voor de oorspronkelijke koper vanaf de datum van eerste aankoop en is niet overdraagbaar. Een aankoopbewijs is vereist om ondersteuning onder de garantie te verkrijgen.

Deze garantie dekt geen:

- nalatig gebruik of misbruik van het product;
- opladen met een onjuiste spanning of stroom;
- waterschade;
- gebruik in strijd met de bedieningsinstructies;
- demontage, reparatie of wijziging door iemand anders dan **Babeza®**;
- schade veroorzaakt door ongevallen of rampen, zoals brand, overstroming, aardbeving, oorlog, vandalisme of diefstal;
- verandering van kleur die in de loop van de tijd kan optreden;
- normale slijtage.

Bij beschadigingen veroorzaakt door het niet in acht nemen van deze handleiding, vervalt de garantie! Voor gevolgschade aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid! Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel veroorzaakt door ondeskundig gebruik of het niet opvolgen van de veiligheidsvoorschriften! In dergelijke gevallen vervalt de garantie!

Babeza® behoudt zich het recht voor om op elk moment, zonder kennisgeving of verplichting, wijzigingen aan te brengen in de handleiding, kleuren, specificaties, accessoires, materialen en modellen.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden veelevoudigd, verspreid of verzonden in welke vorm of op welke manier dan ook, inclusief fotokopieën, opnamen of andere elektronische of mechanische methoden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, behalve in het geval van korte citaten belichaamd in kritische recensies en bepaalde andere niet-commerciële toepassingen die zijn toegestaan door het auteursrecht. Voor toestemmingsverzoeken raadpleeg ons op het adres of e-mail op de laatste pagina.





Babeza

ASH E-Commerce (Babeza)
Ogierssingel 259
3076CS Rotterdam
The Netherlands

✉: ashwan@ash-e-commerce.com