



### Bepalen van de juiste maat van je Oval-8 vingerspalk.

Omdat de dikte van een vinger flink kan variëren door zwelling en temperatuurverschillen geeft één maat geen 100% garantie voor een goede pasvorm. Wij adviseren daarom om naast de gemeten maat ook één maat kleiner en één maat groter te bestellen, zodat je altijd een passende Oval-8 vingerspalk tot je beschikking hebt.

Meet met een zacht meetlint de **omtrek** van het **aangedane gewricht** van je vinger. Trek het meetlint hierbij niet te strak aan. Als je geen meetlint hebt, kan je ook een stukje **niet elastisch** touw gebruiken of een strook papier. Bepaal hiermee dan de omtrek van het **aangedane gewricht** en meet vervolgens met een liniaal de lengte van dat stukje touw of papier. Het is altijd verstandig om twee keer te meten.

Zoek in de tabel hieronder de juiste maat Oval-8 vingerspalk bij de omtrek die je hebt gemeten. We adviseren om, indien mogelijk, behalve deze maat ook altijd één maat kleiner en één maat groter te bestellen. De dikte van de vinger kan namelijk gedurende de dag en/of revalidatie variëren. We leveren verschillende setjes Oval-8 vingerspalken met 3 opeenvolgende maten.

Oval-8 maat	Omtrek gewricht	Oval-8 maat	Omtrek gewricht	Oval-8 maat	Omtrek gewricht	Oval-8 maat	Omtrek gewricht
2	4,3 cm	6	5,7 cm	10	6,8 cm	14	8,0 cm
3	4,5 cm	7	5,9 cm	11	7,1 cm	15	8,2 cm
4	4,9 cm	8	6,1 cm	12	7,4 cm		
5	5,3 cm	9	6,4 cm	13	7,7 cm		

De Oval-8 vingerspalk zelf heeft ook nog twee pasvormen: wat losser en wat strakker. Dat is afhankelijk van welke kant van de spalk je als eerst over de vinger schuift. De brug van de spalk is namelijk een beetje schuin en hierdoor zit die net wat ruimer of strakker, afhankelijk van hoe je hem draagt. Zie de afbeelding hieronder.



Heb je de juiste maat bepaald, bestel je Oval-8 vingerspalken dan direct op [www.medimast.nl](http://www.medimast.nl). Kom je er niet uit, of heb je vragen, stuur dan een mail naar [info@medimast.nl](mailto:info@medimast.nl).

Kijk voor actuele prijzen en om direct te bestellen op [www.medimast.nl](http://www.medimast.nl).



Splints designed for comfort, fit and function



### Een goede spalk begint met een goed ontwerp





### Eén spalk. Vele mogelijkheden.

Oval-8 vingerspalken stabiliseren en ondersteunen de PIP en DIP gewrichten. Ze behandelen aandoeningen van pezen en ligamenten, beschermen helende fracturen, ondersteunen instabiele gewrichten, voorkomen contracturen en meer.



#### Oval-8 Kit

Deze Kit bevat 44 spalken in de maten 2 tot 15. Met deze Kit is het heel eenvoudig de juiste maat te bepalen en deze direct te gebruiken. Verpakkingen van 5 stuks per maat zijn leverbaar om de Kit weer aan te vullen.

P1008-K



#### Oval-8 Pediatric Kit

Deze Kit bevat 15 spalken. 3 van elke maat 3-7. Verpakkingen van 5 stuks per maat zijn leverbaar om de Kit weer aan te vullen.

P1008-PK



#### Oval-8 Sizing Set

Deze set bevat van elke maat een spalk.

P1008-S



#### Oval-8 set verpakking

5 spalken van één maat - maat 2-15

P1008-5-02	P1008-5-07	P1008-5-12
P1008-5-03	P1008-5-08	P1008-5-13
P1008-5-04	P1008-5-09	P1008-5-14
P1008-5-05	P1008-5-10	P1008-5-15
P1008-5-06	P1008-5-11	

#### Oval-8 Combo verpakking

3 spalken met opeenvolgende maat

P1008-2-3-4	P1008-8-9-10
P1008-4-5-6	P1008-10-11-12
P1008-6-7-8	P1008-13-14-15

Voor instructies om de maat te bepalen, zie achterzijde.

Kijk voor actuele prijzen en om direct te bestellen op [www.medimast.nl](http://www.medimast.nl).



### 3pp™ Buddy Loops™

Herbruikbare en comfortabele bescherming van vingers. Het lus-ontwerp is eenvoudig en snel in gebruik. Een zachte binnenkant van foam zorgt voor een goede anti-slip. Verkrijgbaar in 3 breedtes.



Verpakking	½" (1,25 cm) zwart	¾" (1,9 cm) grijs	1" (2,5 cm) zwart
5 stuks	P1005-5	P1003-5	P1007-5
25 stuks	P1005-25	P1003-25	P1007-25
50 stuks	P1005-50	P1003-50	P1007-50
100 stuks	P1005-100	P1003-100	P1007-100

Handwas geschikt. Frequent wassen verlengt de levensduur.

## Eenvoudig en comfortabel ontwerp



### 3pp™ Toe Loops™

Herbruikbare en comfortabele bescherming van tenen. Het lus-ontwerp is eenvoudig en snel in gebruik. Een zachte binnenkant van foam zorgt voor een goede anti-slip. Verkrijgbaar in 2 breedtes.



#### 3pp™ Toe Loops®

De zachte, comfortabele oplossing voor het buddy tappen van de tenen.

Het zachte, antislip materiaal geeft ondersteuning bij Hamertenen, fracturen en overlappende tenen. Ze zijn dun en kunnen eenvoudig in schoenen gedragen worden.

Verpakking	Smal (2,2 cm) beige	Breed (3,1 cm) beige
5 stuks	P5001-5	P5002-5
25 stuks	P5001-25	P5002-25

Handwas geschikt. Frequent wassen verlengt de levensduur.



Kijk voor actuele prijzen en om direct te bestellen op [www.medimast.nl](http://www.medimast.nl).