



M. de Ruytersingel 1
4535 AW Terneuzen
Nederland
T +31-(0)115-69 4000
F +31-(0)84-8357 109
E info@ephraimbodytools.nl

Gebruiksaanwijzing EarScratcher

De EarScratcher is zo gemaakt dat u uw trommelvlies niet kunt beschadigen. Oorsmeer laat zich gemakkelijk verwijderen als het eerst verweekt is met water. Gebruik voor de beste resultaten de EarScratcher® om de 14 dagen, een kwartier na het indruppelen van lauw water.

LET OP !

Alléén voor volwassenen. (boven de 18 jaar).

Niet gebruiken bij oorloop, pijn en ontsteking.

Niet gebruiken als je geopereerd bent aan het oor.

Eén EarScratcher per persoon. Dit in verband met de hygiëne. Schoonmaken met alcohol of gewoon water en zeep.

Geén verbetering: ga naar uw arts.

Ephraïm Body Tools BV