

HeltiQ

jeuw eerste hulp

Teekweg

HeltiQ Teekweg docht snel en veilig teken zonder deze aan te raken, waardoor ze gemakkelijk van de huid te verwijderen zijn. Door het spuitbusje 1 cm boven de teek te activeren, bevriest de teek waardoor hij sterft. Als de teek niet vanzelf van de huid valt kan deze voorzichtig verwijderd worden met de bijgeleverde tekenkaart. Het zo snel mogelijk verwijderen van teken na de tekenbeet vermindert het potentiële risico op overdracht van teekgerelateerde aandoeningen. HeltiQ Teekweg kan gebruikt worden vanaf de leeftijd van 4 jaar en is direct klaar voor gebruik. HeltiQ Teekweg is een medisch hulpmiddel, lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.

- Doodt teken zonder aan te raken
- Direct klaar voor gebruik
- Gemakkelijk & effectief

Ingrediënten

Dimethylether (DME)

Bewaaraadvies

Koel en droog bewaren bij maximaal 25 °C.
Beschermen tegen de zon.

Let op!

- Houder onder druk
- Niet gebruiken bij kinderen onder de 4 jaar
- Gebruik bij kinderen vanaf 4 jaar dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren
- Niet geschikt voor mensen met diabetes
- Alleen voor uitwendig gebruik

Inhoud

1 Spuitbusje
1 Tekenkaart
1 Gebruiksaanwijzing



Dit is een medisch hulpmiddel.
Uitsluitend te gebruiken met
gebruiksaanwijzing.

38 ml



0344

