



Opblaasbaar ringkussen voor drukontlasting



VM934B/VM934BB (met pomp)

Gebruiks- en onderhoudsinstructies

Dit bestand kan als PDF worden bekeken en gedownload op www.aidapt.co.uk. Klanten met een visuele beperking kunnen een gratis PDF Reader (zoals adobe.com/reader) gebruiken om in te zoomen en de tekstgrootte te vergroten voor een betere leesbaarheid.

Controleer uw product op zichtbare schade voordat u het gebruikt/installeert. Als u schade constateert of een defect vermoedt, gebruik het apparaat dan niet, maar neem contact op met uw leverancier.

BEOOGD GEBRUIK

Het opblaasbare drukontlastingsringkussen van Aidapt vermindert de druk tijdens het zitten. Het helpt ook om het gewicht gelijkmatig te verdelen en maakt het voor de gebruiker gemakkelijker om de juiste zitpositie te behouden.

Blaas het kussen op met de mond of met een pomp (zoals een handpomp voor luchtbedden of iets dergelijks. Pomp niet meegeleverd).

Let op. Zorg ervoor dat scherpe voorwerpen zoals ritsen en sleutels niet in contact komen met het kussen, omdat dit de hoes of de opblaasbare binnenkant kan beschadigen.

Let op. Gebruik nooit een compressor om het kussen op te blazen.

Let op. Wanneer u dit artikel met de mond opblaast, moet u mogelijk tijdens het blazen op de onderkant van het ventiel bijten om de luchtweg te openen.

SCHOONMAAK

Maak uw opblaaskussen schoon met een mild schoonmaakmiddel en uitsluitend met een licht vochtige, zachte doek. Gebruik uitsluitend een mild reinigings- of desinfectiemiddel; gebruik nooit een schuurmiddel. Veeg het opblaaskussen na het reinigen af met een droge doek voordat u het op een warme, droge plaats laat liggen, maar niet in direct contact met een hittebron.

HERUITGIFTE

Als u dit product opnieuw uitbrengt of op het punt staat dit product opnieuw uit te brengen, controleer dan alles zorgvuldig onderdelen voor hun veiligheid.

Let op. Bij twijfel dient u het product niet uit te geven of te gebruiken, maar dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw leverancier voor serviceondersteuning.

VERZORGING & ONDERHOUD

Voer regelmatig een veiligheidscontrole van het product uit als u zich zorgen maakt.

BELANGRIJKE GEGEVENS

De informatie in dit instructieboekje mag niet worden opgevat als onderdeel van of als vaststelling van een contractuele of andere verbintenis door Aidapt Bathrooms Limited, Aidapt (Wales) Ltd of haar agenten of dochterondernemingen en er wordt geen garantie of verklaring met betrekking tot de informatie gegeven.

Gebruik uw gezond verstand en neem geen onnodige risico's bij het gebruik van dit product; als gebruiker moet u de aansprakelijkheid aanvaarden voor de veiligheid bij het gebruik van het product.

Aarzel niet om contact op te nemen met de persoon die dit product aan u heeft uitgegeven of met de fabrikant (hieronder beschreven) als u vragen heeft over de montage/het gebruik van uw product.

Aidapt Bathrooms Ltd, Lancots Lane, Sutton Oak, St Helens, WA9 3EX

Telefoon: +44 (0) 1744 745 020 • Fax: +44 (0) 1744 745 001 • Web: www.aidapt.com

E-mail: sales@aidapt.co.uk