

Tandenbleekstrips

Met kleurengids

Specificaties

Kleur:	Transparant
Stripgewicht:	3 gram
Peroxide:	0%

Handleiding

1. Was je handen met zeep
2. Open de stripverpakking langzaam de twee strips.
3. Bekijk jezelf in de spiegel onderste strip met de plak tegen je tanden. Zorg ervoor dat de plak gelijk loopt met de rand van de strip. Oefen zachte druk uit om de plak laten sluiten op je tanden. Het resterende deel van de strip kan om ze op hun plek te houden. Vervolgens dit proces met de andere strip.
4. Na 30 minuten verwijder de strips en gooi je ze weg bij het afval.

TLS Commerce B.V.
Graafschap Hornelaan 116B
6004 HT, Weert
Nederland



CE  FCC RoHS