




* **Elektrodenpads plaatsing:** De vlinder elektrodenpads kunnen worden gebruikt op grote gebieden.
Zie de meest gebruikte gebieden hieronder.

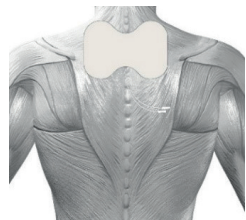


Bovenrug pijn

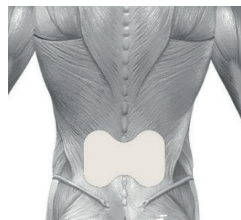

Lage rugpijn of ischias
(optie 1)

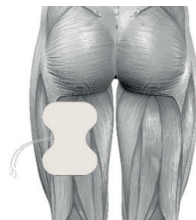

Ischias (optie 2)

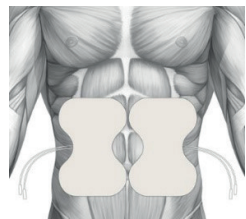

Buikspieren toning



Billen toning

Houdbaarheid

- Elektrodenpads moeten 12 tot 20 keer meegaan, afhankelijk van de huidconditie en vochtigheid.
- Houdbaarheid van een ongeopende verpakking elektrodenpads is 2 jaar. Dit kan worden beïnvloed door zeer hoge temperaturen of zeer lage luchtvochtigheid.
- Oppervlakte: 54 cm²

Waarschuwingen


- Negeer geen allergische reactie op de elektrodenpads: als er huidirritatie optreedt, stop dan met het gebruik van het apparaat, aangezien een klein aantal gebruikers een negatieve reactie op de gel kunnen hebben.
- Alleen voor gebruik met zenuwstimulatoren die zijn goedgekeurd volgens EN 60601-1 en EN60601-2-10.
- De elektrodenpads zijn herbruikbaar, maar voor gebruik bij één patiënt. De lijm is een afpelbare hydrogel op waterbasis.



Instructies voor gebruik
Aandachtig lezen voor gebruik

REF E-BF155

 **Electrodes**
Butterfly 105x155 mm

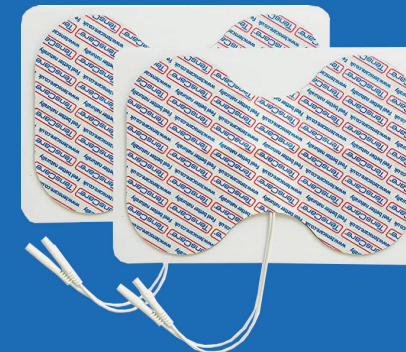

2 Herbruikbare vlinderelektrodenpads voor elektrotherapie unit

TensCare™

Gebruiksaanwijzing

Gebruik met een TENS- of EMS-apparaat zoals TensCare perfect TENS of Sports TENS 2. Gebruik voor pijnverlichting deze elektrodenpads met TENS in de instellingen die u normaal zou gebruiken. Gebruik voor toning deze elektrodenpads met een EMS-programma voor grote spieren.

1. Zorg ervoor dat uw huid voor gebruik schoon en droog is.

! Plaats geen elektrodenpads op huid die niet volledig gevoel heeft of op een beschadigde huid.

2. Duw de pinuiteinden van de geleidingsdraden stevig in de pigtailuiteinden van de elektrodenpads.

i **Opmerking:** Een enkele elektrode werkt als een paar TENS-elektroden. Sluit beide pigtail-kabels aan op dezelfde TENS-kabel.

3. Trek de elektrodenpads van hun beschermende voering door aan een hoek van de pad te trekken.

! Trek niet niet aan de pigtail van de draad.
Controleer altijd of de unit uitstaat voordat u de elektrodenpads plaatst of verwijderd.

4. Breng de kleefzijde van de elektrodenpad aan rond het pijngebied* en druk stevig aan op de huid.

5. Verwijderd de elektrodenpad van uw huid door de aan de pad zelf te trekken.

6. Plaats na gebruik de elektrodenpads altijd terug op de plastic voering en in de hersluitbare zak.

Belangrijk: Neem alle contra-indicaties, waarschuwingen en waarschuwingen in acht die zijn meegeleverd met het apparaat dat u met deze elektrodenpads gebruikt.

Advies

- De elektrodenpads zijn herbruikbaar, maar voor gebruik bij één persoon.
- De elektrodenpads zijn latexvrij Om de beste geleiding door de elektrodenpads te verkrijgen, moet u ervoor zorgen dat ze goed zijn aangebracht.
- Vervang de elektrodenpads als ze uitdrogen en hun kleverigheid verliezen.
- In warm weer kan de gel van elektrodenpads zacht worden.

Gedistribueerd door:

Ydona B.V.

Ydona.

www.ydona.nl



Geproduceerd door:



TensCare Ltd

9 Blenheim Road, Epsom,
Surrey, KT19 9BE, UK
Tel: +44(0) 1372 723434



Advena Ltd

Tower Business Centre,
2nd Flr, Tower Street,
Swatar, BKR 4013, Malta



TensCare Europe BV

Juliana van Stolbergstraat 52,
1723LD Noord-Scharwoude,
Netherlands



I-BF155-NL Rev 1.0 05/23

TensCare™