

Handleiding

Digitale dementieklok met (X)XL beeldscherm



Hoe te gebruiken


Stap 1: Haal de klok en de lichtnetadapter uit de doos.

Stap 2: Sluit de lichtnetadapter aan op de achterzijde van de dementieklok.

Stap 3: Sluit de lichtnetadapter aan op het stopcontact.

Stap 4: Binnen enkele seconden zal het apparaat opstarten en de tijd, datum en dagdeel weergeven.

Stap 5: Zet de klok op een mooi plekje in uw huis, en geniet van uw aankoop.

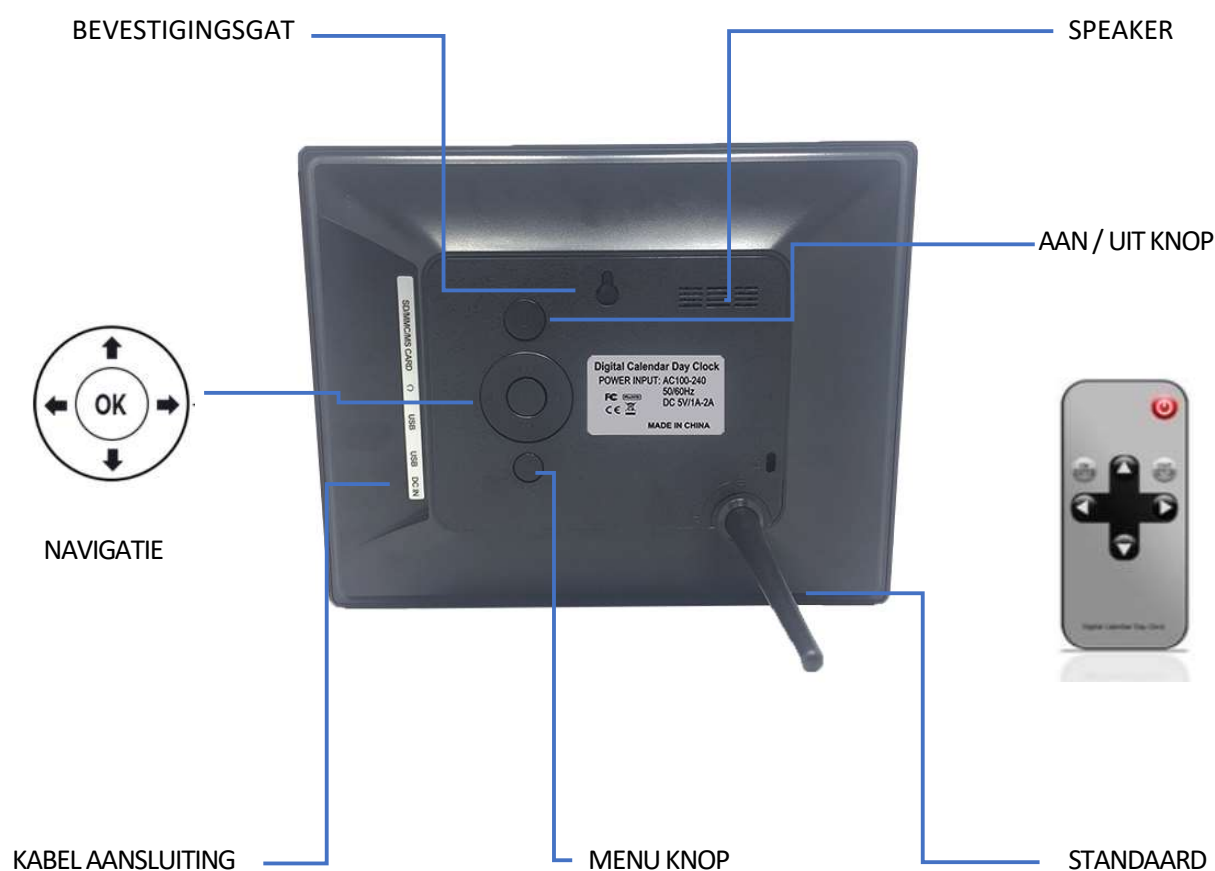

De dementieklok instellen



Scheruweergave wijzigen

Hou de "PLAY/OK" knop ingedrukt op de achterkant van het scherm om van beeldscherm te veranderen. Of hou de "OK" knop ingedrukt op de afstandsbediening. U heeft de keuze uit: digitaal scherm met zwarte achtergrond, digitaal scherm met rood-wit-blauw als achtergrond en de klok met zwarte of witte achtergrond.

Tijd instellen

Druk op de menuknop om naar de instellingen te gaan, en selecteer 'Tijd instellen'. Druk op de pijltoets naar boven of naar beneden om de juiste tijd in te stellen. Wanneer u de juiste tijd heeft ingesteld drukt u op OK. Druk op de menu knop om terug naar het hoofdmenu te gaan.

Datum instellen

Ga naar de regel "Datum instellen", druk op OK om de dag, datum of jaar te onderstrepen. Druk omhoog of omlaag om aan te passen. Druk vervolgens nogmaals op OK om op te slaan en druk op MENU om af te sluiten.

Tijd-modus

Navigeer naar de regel tijd-modus, druk de pijltoets naar rechts of links om te kiezen welke modus ingesteld dient te worden. Er kan gekozen worden tussen 12 uursklok en 24 uursklok. Druk op MENU om af te sluiten.

Datum notatie <dag-maand-jaar> - <maand-dag-jaar> - <jaar-maand-dag>

Er kan gekozen worden tussen Amerikaanse weergave (maand-dag-jaar) of Europese weergave (dag-maand-jaar). Druk op de MENU-toets om naar het hoofdscherm te gaan of druk op de pijltoets naar beneden of naar boven om andere instellingen te bewerken.

Taal

Druk op MENU om instellingen te openen, en navigeer naar de lijn TAAL. Selecteer de juiste taal door naar links op de rechts te drukken, er kan gekozen worden tussen 9 verschillende talen: Nederlands, Svenska, Suomi, English, Français, Italiano, Deutsch, Español, Polski.

Automatische helderheid

Druk op de MENU om te navigeren naar de instellingen. Druk op de pijltoets naar beneden om de lijn tekst "AUTO" te selecteren, als u wilt dat het scherm automatisch dimt. Druk de pijltoets naar rechts of links om te kiezen welke modus ingesteld moet worden. Er kan gekozen worden tussen: niveau 1-2-3-4-5. Niveau 1 is de laagste helderheid van het scherm, niveau 5 is de hoogste helderheid.

Alarm instellen

Navigeer naar de alarm set, druk op OK. Druk de pijltoets naar rechts of links om te kiezen welk veld bewerkt moet worden. Klik op OK. Druk op de pijltoets naar boven of naar beneden om de juiste tijd in te stellen onder 'ingestelde tijd'. De datum kunt u instellen onder 'ingestelde datum'. Hoe vaak het alarm zich moet herhalen kunt u instellen onder het kopje 'Herhaling'.

Om een tag te gebruiken, voor bijvoorbeeld om niet te vergeten dat er een maaltijd gegeten moet worden, heeft u een keuzemenu onder 'Tag' Als u tevreden bent met de gemaakte instellingen drukt u nogmaals op OK om de instellingen op te slaan. Druk op de MENU-toets om naar het hoofdscherm te gaan of druk op de pijltoets naar beneden of naar boven om te navigeren naar andere instellingen.

Geavanceerde Modus

Door de geavanceerde modus te gebruiken wordt er op de klok aangeduid of het ochtend, middag of avond is

Volume

Druk op de MENU om te navigeren naar de instellingen. Druk op de pijltoets naar rechts of links om het volume aan te passen (1-30).

Kleur van het lettertype

Druk op MENU om te navigeren naar de instellingen, kies vervolgens de kleur van het lettertype. De keuzes zijn: wit, geel of blauw.

Specificaties:

Afmetingen: 216 x 171 x 20 mm

Schermgrootte: 8 of 10 inch

Achtergrondlicht: LED

Beeldverhouding: 4:3

Resolutie: 1024 x 768

Lichtnetadapter: 100-240V

Uitgang lichtnetadapter: 5V