



MAJESTIC



IQ-9000 & IQ-9000 Plus
Gebruikershandleiding /Garantie

COMFYGO 
mobility



1. Inhoudsopgave

Voorwoord	2
Product prestatie	3
Veiligheidsinstructies	5
Gebruik en bediening	9
Batterij en oplader	14
Systeem diagnose	17
Controleur	19
Onderhoudsgebieden	23
Leuning	25
Hoofdsteen	27
Koplamp	28
Technische ondersteuning	29
Garantie	30

Een gedetailleerde video-uitleg voor **gebruik en bediening** en **koppelen op afstand** kunt u vinden op onze youtube channel

Dit informatie kunt u vinden op pagina 9.

Ga voor al uw reserveonderdelen naar
www.ComfyGoMobility.eu

Vergeet niet om uw product te registreren, gedetailleerde informatie kunt u vinden op pagina 29.

Als je technische ondersteuning nodig hebt, neem dan contact op met onze klantenondersteuning. Gedetailleerde informatie staat op de achterkant van de gebruikershandleiding en te vinden op pagina 29



Voorwoord



- **Deze Handleiding bevat de bediening, montagemethodes en mogelijke oplossingen als zich een mechanisch probleem voordoet.** de handleiding is van toepassing op onze model: IQ-9000 en IQ-9000 PLUS
- Deze handleiding bevat zowel onderhoudstips voor rolstoelen als probleemoplossingmethoden, dus sla het op waar u het desgewenst kunt openen. **Als u ervoor kiest om iemand anders uw rolstoel te laten gebruiken, geef dan deze handleiding ter referentie.**
- De annotaties en illustraties in deze handleiding kunnen enigszins afwijken van uw werkelijke model omdat we onze componenten voortdurend verbeteren en upgraden en ontwerpen.
- Als u niet zeker bent van een operationeel proces, neem dan contact op met uw dealer onmiddellijk om opheldering te geven.
- Onjuist gebruik van dit voertuig kan leiden tot letsel. Rijden zonder op te letten- blootstelling aan gevaarlijke omstandigheden, zowel u als anderen kan schaden.
- Deze elektrische rolstoel is bedoeld om personen die moeilijk of niet kunnen lopen comfortabel te vervoeren
- Deze elektrische rolstoel is ontworpen om slechts een persoon te vervoeren.



Warning symbol

Volg de instructies naast dit symbool
Let op deze instructies, anders kan dit leiden tot fysieke schade of schade aan de gebruiker, rolstoel of het milieu.





1. Product Prestatie

- Deze serie elektrische rolstoelen wordt aangedreven door Li-ion batterijen en gebruik gelijkstroommotoren. Gebruikers kunnen de richting bepalen en de snelheid aanpassen met behulp van de joystickbedieningen op de arm. Deze rolstoel moet worden gebruikt bij lage snelheden, goede wegomstandigheden, en kan omgaan met een lage helling.

Prestatieparameters en technische specs, IQ-9000 / IQ-9000 Plus

Totale afmeting	980x600x950mm	/ 980x680x990mm
Vouwmaat	800x600x400mm	/ 775x680x400mm
Stoelmaat	445x460mm	/ 510x460mm
Nettogewicht	24,8 kg	/ 25,3 kg (zonder batterij)
Nettogewicht	27,5 kg	/ 28 kg (met 2 x 7.5AH batterij)
Snelheid	Max 6 km/u	/ Max 6 km/u
Zithoogte	460 mm	/ 460 mm
Armleun Hoogte	230 mm	/ 250 mm
Rugleun Hoogte	460 mm	/ 550 mm
Max laadgewicht	130 kg	/ 140 kg
Voorwiel diameter	200 mm	/ 200 mm
Achterwiel diameter	300 mm	/ 300 mm
Batterij	7.5AH Li-ion x 2st	/ 7.5AH Li-ion x 2st
Motor x 2 stuks	DC 24V, 220W x 2	/ DC 24V, 220W x 2
Batterijlading	100-240V, 50Hz, 1,5-5A	/ 100-240V, 50 Hz, 1,5-5A
Controle unit	24V 30A	/ 24V 30A
Maximale bereik*	30 km	/ 40 km
Beschermingsgraad	IPX3	/ IPX3
Max veilige helling	10°	/ 10°
Draaicirkel	≤1.2m	/ ≤1.2m
Statische stabiliteit	10°	/ 10°
Breedte omkeren	≤1,5 m	/ ≤1,5 m
Klimhoek	10°	/ 10°
Bandenspanning	2 kg f/m ²	/ 2 kg f/m ²
Obstakel klimmen	50 mm	/ 50 mm
Framekleur	Zwart & Rood	/ Zwart & Rood

Kussenkleuropties Standaardstof en 4 kleuren leertextiel

* varieert op basis van gewicht, helling, snelheidsfactoren



1. Product Prestatie



Toepassingsgebied

Deze elektrische rolstoel is speciaal ontworpen voor gehandicapten of ouderen met een gewicht van minder dan 140 kg (310 lbs), bedoeld voor gebruik op loopsnelheid. Gebruik dit apparaat niet op snelwegen



WARNING

People with the following conditions should not operate this vehicle:

- Unresponsive upper limbs
- Suffering from senility or dementia
- Unable to take care of themselves
- Use restricted by a medical professional



Veiligheidsinstructies

2.1 Belangrijkste beveiligingsfuncties

- Ingedeeld op basis van het type bescherming: Tegen elektrische schokken, Interne kracht
- Ingedeeld op basis van het type bescherming: tegen elektrische schokken, Type B toepassing.
- Geclassificeerd op basis van de mate van bescherming van de inlaatvloeistof: 1 PX Ingedeeld op basis van veilig gebruik van een ontvlambaar anesthesiemengsel met lucht of gas gemengd met zuurstof of lachgas ontvlambaar als esthetische gassen voorkomen: Niet-AP/APG-type
- Geclassificeerd op basis van bedrijfsmodus: continubedrijf.
- Nominale spanning: DC 24V.
- Heeft geen beschermend effect op de toepassing van defibrillatorontlading sectie
- Geen signaaluitgang of ingangsgedeelte.
- Veiligheid van geïnstalleerde niet-permanente apparatuur.

2.2 Rij aantekeningen

Algemene waarschuwingen tijdens het rijden

- Houd je handen op de armleuning om volledig te kunnen controleren over de rolstoel
- We raden aan om te oefenen in parken of andere veilige en open plekken totdat
- Er zeker van bent dat u uw rolstoel vakkundig kunt gebruiken. Zorg dat je oefent vooruit, stoppen en draaien in cirkels.
- Zorg ervoor dat u, voordat u over de weg gaat rijden, verzorgers bij u heeft en zorg ervoor dat u te allen tijde veilig rijdt.
- Volg alle verkeersregels voor voetgangers, de rolstoel wordt niet als een auto beschouwd
- Blijf op het trottoir en de zebrapaden. Rijd niet in het voertuigwegen
- Rijd met een constante snelheid, vermijd scherpe bochten en zigzaggen.
- Gelieve de juiste bandenspanning aan te houden, hoe lager of hoger dan aanbevolen druk kan onveilig gebruik of overmatig stroomverlies veroorzaken.



2. Veiligheidsinstructies



Vermijd rijden in deze omstandigheden tenzij U wordt begeleid door een supervisor

- Rijden bij slecht weer, zoals een regenachtige dag, zware mist, sterkwind, sneeuw.
- Als uw rolstoel nat wordt, kunnen elektronische functies schadeveroorzaken dus veeg al het water onmiddellijk af.
- Rijden in suboptimale omstandigheden zoals modderige gebieden, paden, zand, grind enz.
- Rijden op drukke wegen.
- Rijden op wegen zonder omheining, of in de buurt van een sloot, vijver, etc.
- Als u de spoorlijn moet oversteken, zet u uw rolstoel uit en inspecteer de rupsbanden om er zeker van te zijn dat uw banden veilig kunnen versteken. Elektrische rolstoel is alleen voor persoonlijk gebruik, draag geen mensen of spullen

Voorzorgsmaatregelen voor bergop en bergaf

- Vermijd het rijden op steile heuvels, plaatsen met oneffen wegen, hogetrappen, kanalen en andere steile hellingen
- Vermijd rijden op steile hellingen, het hellingsbereik moet kleiner zijn dan 9 graden.
- Bedien de controller zorgvuldig tijdens bergopwaarts gebruik.
- Blijf vooruitgaan tijdens bergopwaartse beklimmingen of bergafwaartse hellingen en stop niet
- Gebruik je remmen om je snelheid te verminderen tijdens een afdalingbeweging.
- Vermijd zijwaarts rijden op een steile helling.
- Traplopen wordt niet aanbevolen en vermijd het oversteken van hoge stappen.
- Vermijd het oversteken van brede sloten.
- Houd tijdens het oversteken van een sloot een hoek van 90° tussen de banden aan en de sloot
- Zet de rolstoel niet in de handmatige modus tijdens bergopwaartse en/of bergafwaartse bewegen
- Als de rolstoel niet goed werkt bij een verkeersoversteekplaats, neem dan a.u.b. vraag dan direct een voorbijganger om hulp. Zet de rolstoel ook op: handmatige modus en duw de rolstoel om de scene te verlaten.



2. Veiligheidsinstructies

Voorzorgsmaatregelen voor zorgverleners

- Zorgverleners moeten bevestigen dat de voeten van de gebruikers op de voet-juiste positie van de rugleuning en zorg ervoor dat er geen kleding aan de wielen
- Verzorgers moeten de rolstoel op een steile of lange helling

2.3 Andere belangrijke mededelingen

Reparatie en refit

- Als uw rolstoel een reparatie of refit nodig heeft, neem dan contact op met uw verkoper of serviceafdeling. Probeer uw rolstoel niet aan te passen door uzelf, aangezien dit een ongeval of een storing in de rolstoel kan veroorzaken
- Voeg geen ander gewicht toe aan deze stoel dan de goedgekeurde accessoires, aangezien dit een onbalans kan veroorzaken en de werking van de rolstoel kan beïnvloeden. Houd uw rolstoel te allen tijde droog.
- Bewaar of gebruik uw rolstoel niet op natte plaatsen. Als de rolstoel nat wordt, droog hem dan onmiddellijk af.

Iemand anders in de rolstoel duwen

- Als er iemand op de rolstoel zit, moet u ervoor zorgen dat: gebruik het alleen als de koppeling in de handmatige modus staat en niet in de elektrische modus.

2.4 Levensduur

- De levensduur van dit product is 5 jaar na de productiedatum. Gebruik het product binnen een beperkte periode. Om ongelukken te voorkomen, wordt het niet aanbevolen om het langer dan de aanbevolen periode te gebruiken. Raadpleeg het label op uw toestel om de fabricagedatum van uw rolstoel te vinden.



2. Veiligheidsinstructies



2.5 Elektromagnetische compatibiliteit

- Houd de rolstoel uit de buurt van sterke magnetische velden en grote inductieve elektrische apparatuur, zoals radio- of tv-stations, on aardse radiostations of radiostations die mobiele telefoons uitzenden. Indien hier zijn bronnen van elektromagnetische interferentie in de buurt, blijf alsjeblieft zo ver mogelijk van die bronnen om elektromagnetische interferentie te vermijden, aangezien uw elektrische rolstoel elektromagnetische interferentie moet vermijden.

Notities:

- Deze elektrische rolstoel voldoet aan de elektromagnetische compatibiliteitsvereisten van de YY0505-norm.
- Installeer en gebruik de elektrische rolstoel altijd op basis van de verstrekte informatie over elektromagnetische compatibiliteit.
- Draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur zal de prestaties van de elektrische rolstoel beïnvloeden. Vermijd daarom het gebruik in de buurt van een sterke elektromagnetische storing, zoals een mobiele telefoon of magnetron.
- Raadpleeg de bijlage voor de kennisgeving en de verklaring van de fabrikant.
- Uitschakelspanning voor de batterij is 23V.
- Deze elektrische rolstoel is een D-klasse in GB/T 18029.21-2012, een rolstoel met elektronische differentieelbesturing en handrem.

2.6 Compatibiliteit met andere apparaten

- Elektrische rolstoelen mogen niet worden gebruikt in combinatie met eventuele andere apparaten. Als u er een apparaat op moet aansluiten neem dan alstublieft contact met ons op zodat we kunnen bevestigen dat de rolstoel geen nadelige gevolgen zal ondervinden.






3. Gebruik en bediening

Bezoek YouTube voor een gedetailleerde uitleg over gebruik en bewerkingen. Zoek eenvoudig "**ComfyGo Mobility Lichtgewicht opvouwbaar elektrische rolstoel (Model # IQ-9000)**" op YouTube of scan de QR-code met de camera van uw smartphone.



Bezoek YouTube voor een gedetailleerde uitleg over het koppelen van de afstandsbediening. Zoek eenvoudig naar "**MAJESTIC IQ-9000 Remote Pairing - ComfyGO Mobility**" op YouTube of scan de QR-code met de camera van uw smartphone.

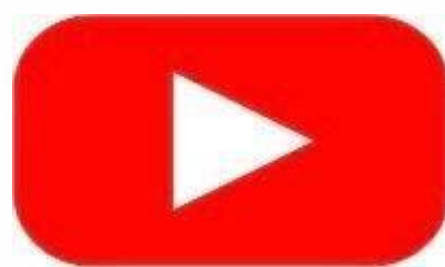

WWW

www.youtube.com/c/ComfyGO



3. Gebruik en bediening



3.1 Rolstoelaanpassingen

Uw rolstoel uitvouwen

Houd de rugleuning met een hand vast en gebruik uw andere hand om de stoel vast te houden en de stoel uit te klappen (Afbeelding 1).



Afbeelding 1




Afbeelding 2

Vouw de rolstoel volledig uit en maak vervolgens de slot onder de rugleuning (Afbeelding 2).

Zorg er voor gebruik voor dat het slot is goed beveiligd, anders zal het vouwen tijdens het rijden.

Uw rolstoel opvouwen

Draai de vergrendeling los (Afbeelding 3), houd met een hand de rugleuning vast en trek met uw andere hand aan de zitting en klap deze in (Afbeelding 4).

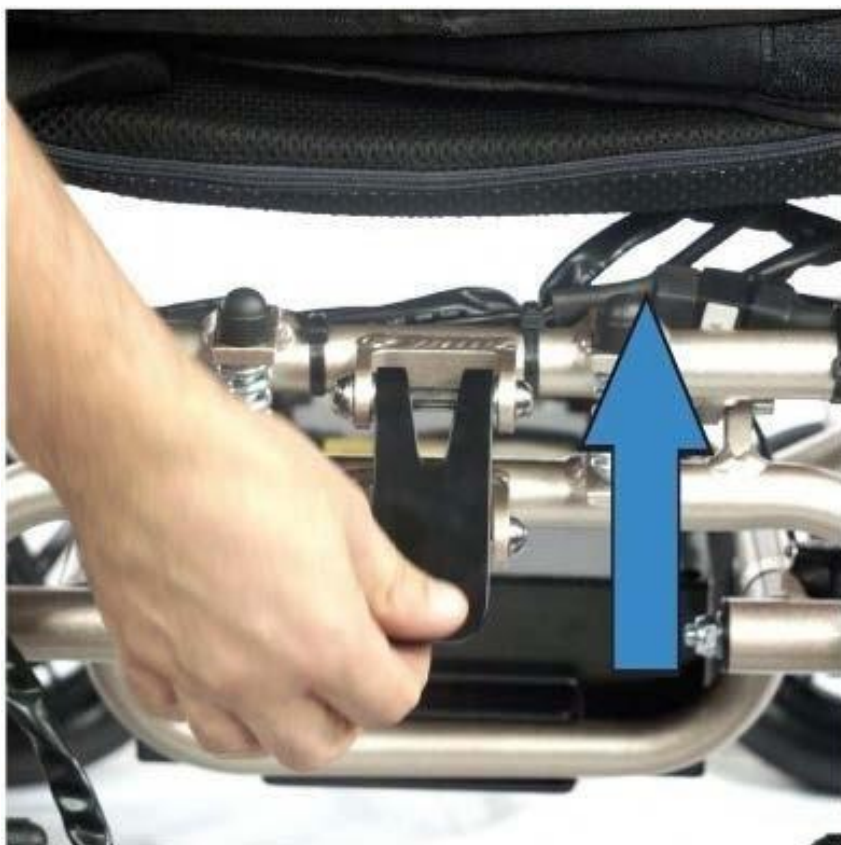

Afbeelding 3



Afbeelding 4



3. Gebruik en bediening

De controller installeren

Steek de controller in de armleuningbuis. Houd de controller in horizontale positie (Afbeelding 5). Vergrendel vervolgens de schroef (Afbeelding 6).



Afbeelding 5




Afbeelding 6

Demonteer de batterij door eerst de batterijstekker en de controllerstekker los te koppelen (Afbeelding 7) en vervolgens de schroef op de batterijhouder los te draaien (Afbeelding 8). Installeer de batterij door de batterijgroef in de achterbuis te plaatsen (Afbeelding 9), draai de schroef los. Verbind vervolgens de batterijstekker met de controllerstekker.



Afbeelding 7

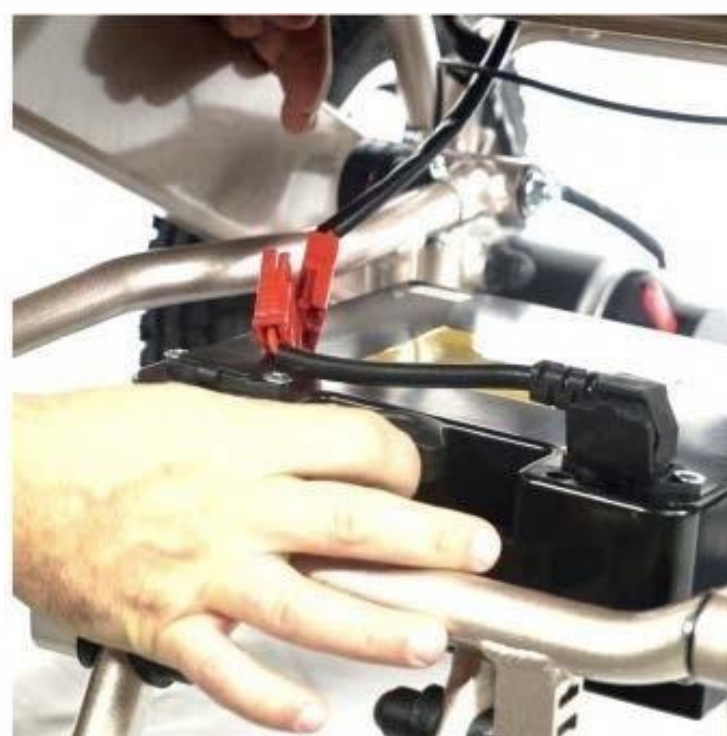

Afbeelding 8



Afbeelding 9



B. Gebruik en bediening



Voetplaat

De voetplaat kan omhoog of omlaag worden getrokken.

De anti-tipper installeren en demonteren

Druk op de knop om de anti-tipper te installeren/demonteren (Afbeelding 10-11).



Afbeelding 10



Afbeelding 11

Uw armleuning omhoogklappen

Druk met een hand op de armsteunknop en klap met de andere hand uw armsteun omhoog (Afbeelding 12). Druk de armsteun naar beneden in de juiste positie om het vast te zetten. (Afbeelding 13).



Afbeelding 12



Afbeelding 13




Gebruik en bediening

Schakelen tussen handmatige modus en elektrische modus

Handmatige modus: Schake! de stroom uit en trek de rem aan, trek dan de koppeling uit de groef en draai hem 30° (Afbeelding 14 - 15).




Afbeelding 14

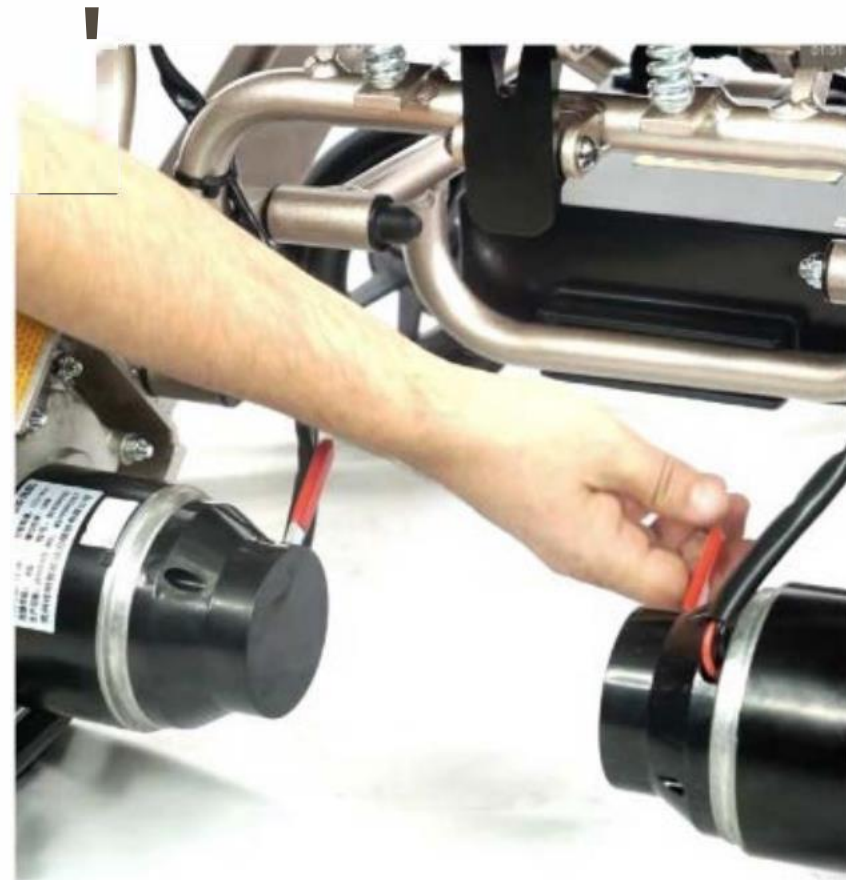

Afbeelding 15

Electrische modus: Draai de rode koppeling en plaats deze terug in de groef, duw de rolstoel lichtjes totdat u een klikgeluid hoort (Afbeelding 16).

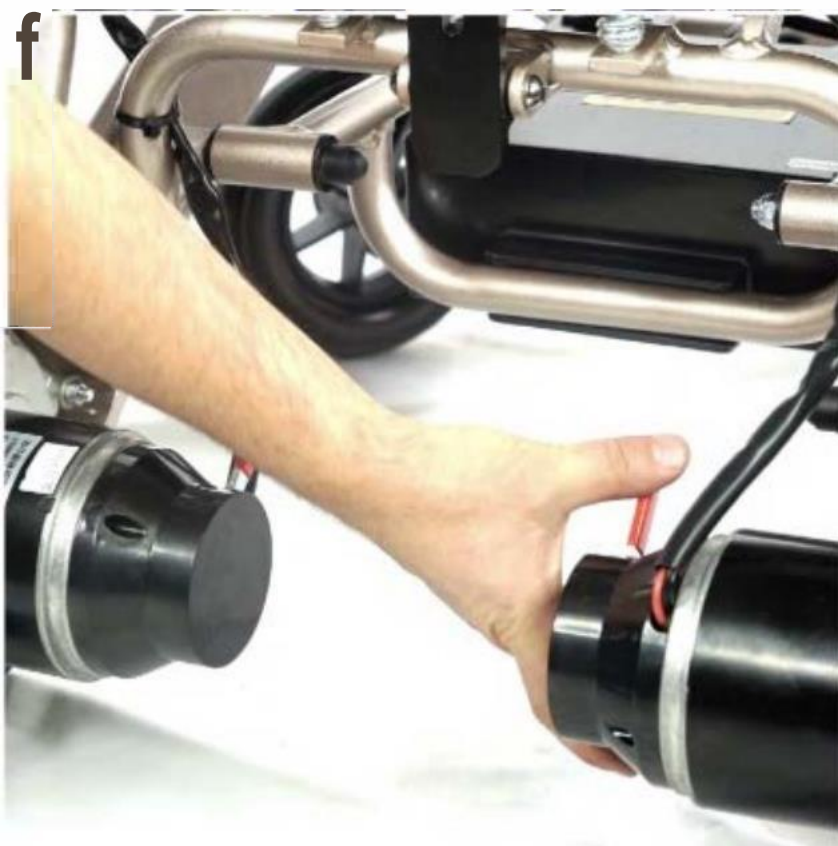

Afbeelding 16

Controleer bij het overschakelen van handmatige naar elektrische modus of beide zijkoppelingen in de groeven zijn geplaatst. Als een van de zijkoppelingen niet volledig in de groef is geplaatst, kan dit ertoe leiden dat de eenheid omvalt.



4. Batterij en oplader



4.1 Opladervereisten

De oplader mag alleen worden gebruikt voor het opladen van de batterijen. Gebruik uw rolstoel niet tijdens het opladen.

Technische gegevens oplader:

Ingangsspanning: AC220V (110V) $\pm 10\%$

Uitgangsspanning: 24V/DC Uitgangsstroom: 1,5 ~ 5A Beschermingsniveau tegen binnendringing: IPX1

Voldoet aan vereiste: GB 4706.1-2005 en GB 4706.18-2005

4.2 Gebruik en onderhoud van de oplader

BELANGRIJK:

- Een volledige lading vereist tussen de 8 - 10 uur, laad niet meer dan 24 uur op.
- Om de levensduur van uw accu niet te verkorten, dient u de accu minimaal een keer per maand op te laden als de rolstoel niet wordt gebruikt.
- Stop niet met opladen totdat het oplaadproces is voltooid.
- Herhaald gebruik van minder dan volledig opgeladen batterijen zal de levensduur van uw batterij verkorten.
- Wanneer de batterij volledig is opgeladen, wordt de stroomindicator groen. Stop niet met opladen voordat deze volledig is opgeladen. Deze indicator brandt.
- Nadat het opladen is voltooid, moet u ervoor zorgen dat u de voedinguitschakelt, anders zal de batterij langzaam ontladen.
- Laad niet langer dan 24 uur op. Overladen is gevaarlijk.

Volg deze regels om problemen met opladers te voorkomen

- De elektrische rolstoel wordt niet geleverd met een oplader. Gebruik een nationale standaard oplader met een uitgangsspanning van 24V/DC 1,5A~5A.
- De oplader moet tijdens het opladen altijd goed geventileerd zijn.
- Stel de rolstoel niet bloot aan zonlicht en vochtigheid.
- Tijdens het opladen moet het temperatuurbereik tussen 10 en 50 graden Celsius liggen. (50 tot 122 graden Fahrenheit)
- Als de batterij wordt opgeladen bij temperaturen buiten dit bereik, kan de batterij beschadigd raken.
- Gebruik of zit nooit op de elektrische rolstoel tijdens het opladen.





4. Batterij en oplader

- Het is normaal dat de ventilator een geluid maakt tijdens het opladen. Dit is om de oplader te koelen en vormt geen probleem.
- Voorkom dat er tijdens het opladen vloeistof in de oplader komt.
- Plaats uw oplader niet op brandbare voorwerpen zoals: brandstof, voetsteun of zitkussen.
- Blijf uit de buurt van vlammen tijdens het opladen van de batterij, aangezien vlammen een batterijbrand of -explosie kunnen veroorzaken.
- Rook niet tijdens het opladen.
- Haal de stekker niet uit het stopcontact als het stopcontact of uw handen nat zijn, omdat dit een elektrische schok kan veroorzaken.

4.2.1 Type 1, Direct opladen in batterij

Om de accu op te laden, sluit u de lader aan met een voeding en accubakstekker. Volg de onderstaande instructies om het laadproces te voltooien:

Stap 1: Zorg ervoor dat de groef van de oplader niet geblokkeerd is.

Stap 2: Zorg ervoor dat de elektrische rolstoel is uitgeschakeld.

Stap 3: Koppel de verbindingen tussen de accubak en de controller los

Stap 4: Sluit de uitgangstekker van de lader aan op de stekker van de accubak

Stap 5: Sluit de stekker van de oplader aan op de voeding, het rode lampje gaat branden.

4.2.2 Type 2, Opladen via je controller

Om de batterij op te laden, sluit u de oplader aan op de voeding.

Volg de onderstaande instructies om het laadproces te voltooien:

Stap 1: Zorg ervoor dat de groef van de oplader niet geblokkeerd is.

Stap 2: Zorg ervoor dat de elektrische rolstoel is uitgeschakeld.

Stap 3: Zorg ervoor dat de batterij en de controller zijn aangesloten.

Stap 4: Sluit de uitgangstekker van de oplader aan op de aansluiting onder de controller

Stap 5: Sluit de hoofdstekker van de lader aan op de stroomvoorzieningen het rode lampje gaat branden.



4. Batterij en oplader



4.3 Gebruik en onderhoud van batterijen

- Het onjuist plaatsen van de batterij kan explosiegevaar veroorzaken. Gebruik alleen batterijen die bij dit apparaat zijn geleverd. Neem contact op met uw verkoper als u vervangende batterijen nodig heeft.
- Let er bij het plaatsen van de batterij op dat de batterijpolen correct zijn geplaatst. Raadpleeg altijd de oplaadinstructies die hier worden gegeven om een optimale levensduur van uw batterijen te behouden.



5. Systeemdiagnostiek

De LED-indicatoren geven diverse technische storingen aan die van invloed kunnen zijn op de volgende onderdelen: de motor, de remmen, de accu, de draadverbindingen. Gebruik de onderstaande tabel om het specifieke technische probleem op te lossen. Technische problemen kunnen meestal worden opgespoord zonder andere service-instrumenten, maar aarzel niet om contact met ons op te nemen als dat toch nodig is:

Raadpleeg de tabel voor audiosignaalindicatie.





5. Systeemdiagnostiek


Getoonde foutcode	Knippertoestand	Alarm geluid	Definitie van fout en waarschuwing	Opiossing
C1	Lange knippering	Langdurig alarm	Communicatiestoring	Controleer of de bedradingsbundel correct is geïnstalleerd
C2	Lange knippering	Langdurig alarm	De joystick staat niet in de uitgangpositie	Schakel de stroom uit, laat de joystick los in de middenstand en schakel de stroom weer in. stand, schakel de stroom weer in.
C3	Lange knippering	Langdurig alarm	Waarschuwing besturingsconflict	Schakel de stroom uit, laat de joystick los in de middenstand en schakel de stroom weer in. stand, schakel de stroom weer in.
C4	Lange knippering	Langdurig alarm	De remhendel is niet in de elektrische stand geschakeld	Controleer of de remhendel in de elektrische stand staat
C5 first stage	Lange knippering	Langdurig alarm	Overbelastingswaarschuwing - De eerste fase	Wanneer de rolstoelbelasting wordt losgelaten of de joystick wordt losgelaten tot de middenpositie, wordt deze hersteld.
C5 second stage	Korte knippering	Langdurig alarm	Overbelastingswaarschuwing - De tweede fase	Wanneer de rolstoelbelasting wordt losgelaten of de joystick wordt losgelaten tot de middenpositie, wordt deze hersteld.
C5 shird stage	Lange gloed	Langdurig alarm	Overbelastingswaarschuwing - De derde fase	Wanneer de rolstoelbelasting wordt losgelaten of de joystick wordt losgelaten tot de middenpositie, wordt deze hersteld.
C6	Lange gloed	Langdurig alarm	Stroomuitval	Start de stroomtoevoer opnieuw.
C7	Lange gloed	Langdurig alarm	Waarschuwing overspanning voor linker- en rechterwiel	De joystick keert terug naar de middenpositie en wacht tot de overdrukwaarschuwing is verdwenen.
C8	Lange gloed	Langdurig alarm	Waarschuwing onderspanning voor linker- en rechterwiel	Laad de batterij op tijd op.
CE	Lange gloed	Langdurig alarm	Storing in systeemp parameters	Start opnieuw op of neem contact op met de dienst na verkoop.
L1	Lange gloed	Langdurig alarm	Linker wiel overstroom foul	Start opnieuw op of neem contact op met de dienst na verkoop.
L2	Lange gloed	Langdurig alarm	Fout in grote stroomafwijking van linkerwiel	Start opnieuw op of neem contact op met de dienst na verkoop.
L3	Lange gloed	Langdurig alarm	Waarschuwing oververhitting linkerwielcircuit	Schakel de stroom uit, na afkoeling moeten de aandrijfwielen opnieuw opgestart worden.
L6	Lange gloed	Langdurig alarm	Storing encoder linkerwiel	Start opnieuw op of neem contact op met de dienst na verkoop.
L7	Lange gloed	Langdurig alarm	Storing encoder linkerwiel	Start opnieuw op of neem contact op met de dienst na verkoop.
L8	Lange gloed	Langdurig alarm	Foul overstroom rechterwiel	Start opnieuw op of neem contact op met de dienst na verkoop.
R1	Lange gloed	Langdurig alarm	Overstroomstoring rechter wiel	Start opnieuw op of neem contact op met de dienst na verkoop.
R2	Lange gloed	Langdurig alarm	Storing door grote stroomafwijking van het rechterwiel	Start opnieuw op of neem contact op met de dienst na verkoop.
R3	Lange gloed	Langdurig alarm	Waarschuwing voor oververhitting van het rechter wielcircuit	Schakel de stroom uit, na afkoeling moeten de aandrijfwielen opnieuw opgestart worden.
R6	Lange gloed	Langdurig alarm	Storing encoder rechterwiel	Start opnieuw op of neem contact op met de dienst na verkoop.
R7	Lange gloed	Langdurig alarm	Storing in de rem van het rechterwiel	Start opnieuw op of neem contact op met de dienst na verkoop.
R8	Lange gloed	Langdurig alarm	Fase-uitval rechterwiel	Start opnieuw op of neem contact op met de dienst na verkoop.





6. Controller

6.1 Controller Paneel

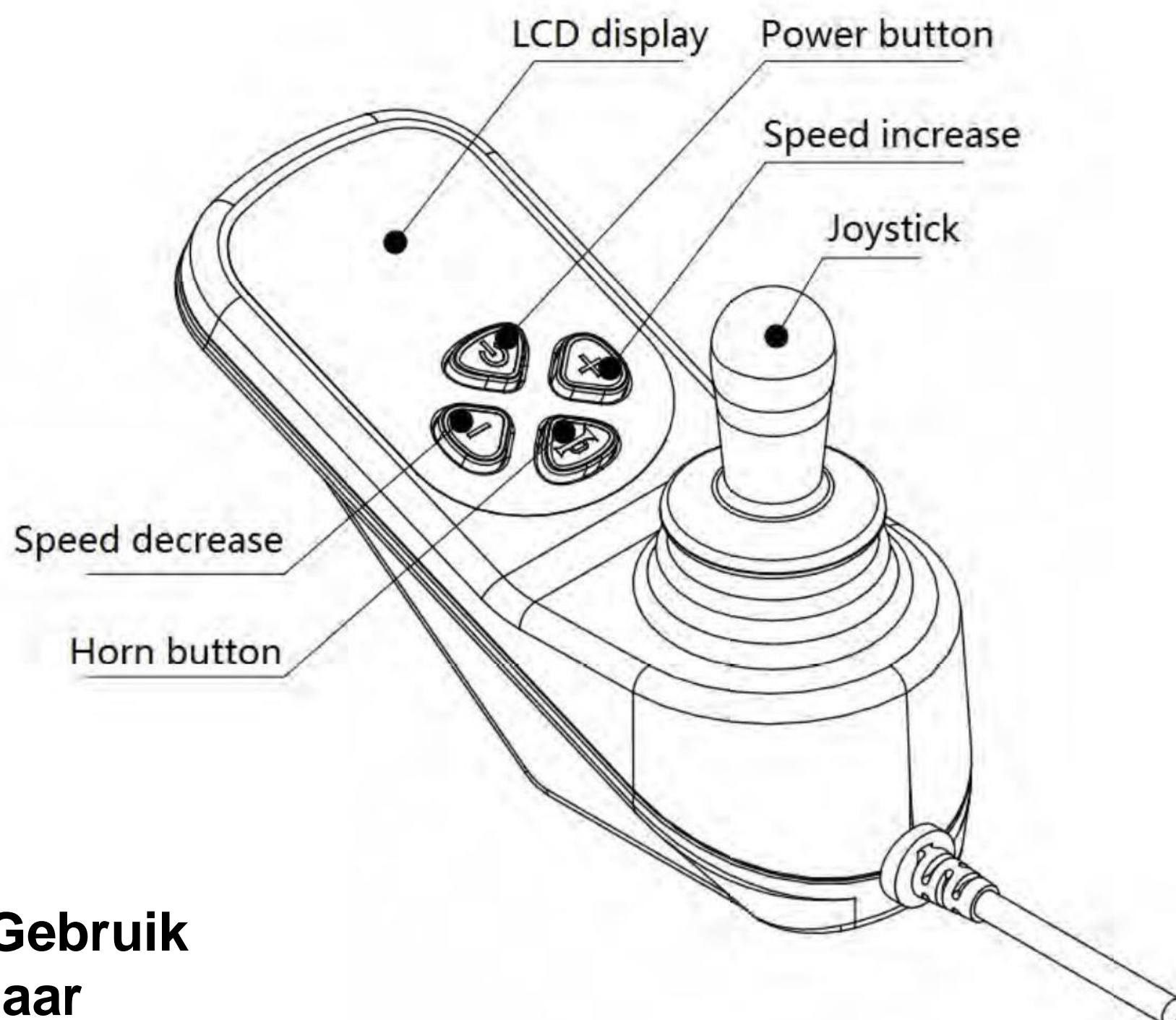

6.2 Controller Gebruik

Stroomschakelaar

Druk op de aan/uit-knop, het scherm licht op en de controller wordt aangezet. Druk op de power switch knop, het scherm gaat uit, en de controller is uitgeschakeld.



In een noodsituatie, kunt u direct macht uitzetten door ook de machtsknoop te drukken.

Slaap modus

Als de joystick langer dan 20 minuten niet wordt gebruikt, schakelt de stroom automatisch uit en gaat het systeem in de slaapstand. Het systeem kan opnieuw worden geactiveerd door op de aan/uit-knop te drukken.

Snelheid aanpassen

De rijnsnelheid van de rolstoel kan worden aangepast aan de voorkeuren en omstandigheden van de gebruiker. Pas de snelheid aan door aan de snelheidsknop te draaien om de snelheid te verhogen of te verlagen.



6. Controller



Toeter knop

Druk op de toeterknop om de toeter te gebruiken.


Weergave batterijcapaciteit

De batterijmeter werkt als de stroom ingeschakeld is. De batterijmeter geeft ook het resterende vermogen aan. In de getoonde afbeelding staat de batterij onder spanning. Wanneer alleen rode of gele LED-lampjes branden, duidt dit op een laagvermogen en moeten de batterijen worden opgeladen. Als u een lange afstandsrit gaat maken, zorg er dan voor dat de batterij volledig is opgeladen. Gebruik het toestel niet als alleen het rode lampje brandt, want dat betekent dat het toestel moet worden opgeladen.

Gebruik van de joystick

Om de snelheid en richting van de rolstoel te regelen, gebruikt u de joystick. De mate waarin u de joystick duwt, bepaalt de bewegingssnelheid. Om het apparaat aan of uit te zetten, moet u de joystick altijd in de middelste stand houden.

Er klinkt een signaal als de joystick niet in de middelste stand staat bij het aan- of uitzetten. Om het signaal te stoppen, plaatst u de joystick in het midden. Als het signaal niet meer stopt wanneer u de joystick in de middelste stand plaatst, kan dit wijzen op een storing, neem dan contact op met uw dealer.

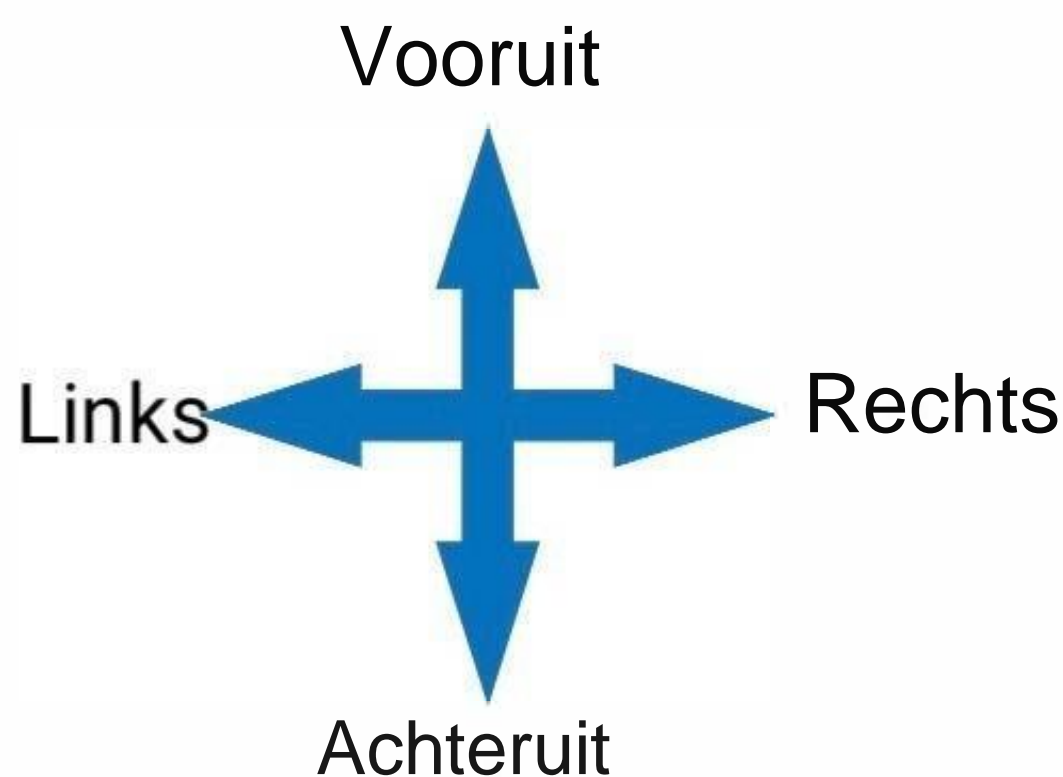



6. Controller

Installatie op afstand

Voor een gedetailleerde video-uitleg over het koppelen op afstand, kunt u terecht op ons Youtube-kanaal. Gedetailleerde informatie vindt u op pagina 9.



Afstandsbediening terminal bediening:

- Plaats de AAA batterijen in de afstandsbediening en zet de afstandsbediening aan door 3 seconden op de "power" knop te drukken.
- De afstandsbediening is ingeschakeld wanneer u de groene lampjes ziet knipperen op de aan/uit-knop van de afstandsbediening.
- Om uw afstandsbediening te koppelen met de rolstoel, drukt u op de "vertragingknop" op de afstandsbediening gedurende 3 seconden, De power maar tons groene lampje zal blijven branden en de matching zoeken is ingeschakeld.



6. Controller



Bediening aan controllerzijde

- a) Wanneer de controller is ingeschakeld, houdt u de vertragingsknop gedurende 3 seconden ingedrukt. Het rode koppelingslampje op de controller zal knipperen.
- b) Druk op de toeterknop op de controller en laat hem los; het rode koppelingslampje stopt met knipperen en blijft branden. Als de koppeling correct is uitgevoerd, schakelt de controller automatisch uit. Als de afstandsbediening niet correct is gekoppeld, herhaalt u de koppelingsprocedure.
- c) Zodra de koppeling is voltooid, start u de controller opnieuw door op de aan/uit-knop te drukken. Druk op de aan/uit-knop van de afstandsbediening om de koppelingsmodus te verlaten en het groene aan/uit-lampje zal knipperen. Het rode koppelingssignaal op de controller zal blijven branden en de afstandsbediening kan nu worden gebruikt om de rolstoel aan te drijven.





7. Onderhoudszones

7.1 Onderhoud van uw rolstoel

Het juiste onderhoud van uw rolstoel omvat het schoonmaken van uw rolstoel, het controleren van het wiel en de accu op defecten, en het opladen van de accu's. Voor meer informatie over onderhoud kunt u contact opnemen met uw verkoper. Wij raden u aan uw rolstoel elke zes maanden te laten controleren en een jaarlijkse onderhoudsbeurt te laten plannen via uw verkoper.

7.2 Uw rolstoel reinigen

U kunt uw rolstoel regelmatig schoonmaken, inclusief de delen die vaak met het lichaam van de gebruiker in aanraking komen (zoals het zitkussen, de armleuning, de controller), met een schone en licht vochtigedoek. Gebruik geen organische/schurende oplosmiddelen om schoon te maken, omdat deze het oppervlak kunnen beschadigen. De rolstoel moet ongeveer een keer per week worden schoongemaakt. Als de rolstoel wordt gebruikt door een besmette patient, moet hij tussen elk gebruik worden schoongemaakt en ontsmet met ontsmettingsmiddelen.

7.3 Banden

Controleer regelmatig de bandenspanning en de slijtagetoestand. Wanneer de profieldiepte van de band tot 1 mm is afgenomen, moeten de banden worden vervangen. (.0393 inches)

7.4 Batterijen

Zorg ervoor dat de batterijen volledig opgeladen zijn. Om de levensduur van de batterijen te verlengen, raden wij sterk aan het toestel niet op te laden tot de batterijen leeg zijn (rode of gele LED-lampjes branden). Raadpleeg ook hoofdstuk 4 van deze handleiding voor gedetailleerde instructies voor het onderhoud en het opladen van de batterijen, die de levensduur van uw batterij kunnen helpen verlengen.



7. Onderhoudszones



7.5 Storingsmeldingen rolstoel

Wanneer er storingen optreden tijdens het gebruik van deze rolstoel, schakel dan eerst de stroom uit voordat u het apparaat controleert.

Symptoom: Verliest de stroom volledig, en alle LED-lampjes op het bedieningspaneel zijn uit.

Instructies:

Stap 1: Controleer of de stekker van de controller los zit.

Stap 2: Controleer of de verbinding tussen de controllerplug en de accubak los

Steek de stekker weer in het stopcontact door de stekker vast te houden wanneer u deze uittrekt.

Trek niet aan de draad om onnodige schade aan de draadlijn te voorkomen. Na het uitvoeren van de bovenstaande stappen en als de stroomvoorziening van de rolstoel niet is hersteld of als u vragen heeft, neem dan contact op met uw verkoper.

- De controller heeft een diagnosesysteem om de controller en de motor te controleren. Elke storing van deze onderdelen wordt door de controller aangegeven. Voor meer details verwijzen wij u naar het hoofdstuk over audiosignaalindicatie.

7.6 Onderhoudscontrole

Uw elektrische rolstoel moet elke zes maanden worden gecontroleerd en jaarlijks worden onderhouden, zoals aanbevolen. Het gebruik van deze rolstoel vereist voortdurende aandacht voor de veelgebruikte elementen die hieronder zijn opgesomd:

Gebied A: Controleer voor elk gebruik of de volgende onderdelen correct functioneren:

1. Ruggleuning
2. Armleuning
3. Controller positie
4. Voetleuning
5. Batterij vermogen
6. Koppeling/stelhefboom voor omschakeling tussen handbediening en elektrische bediening

Gebied B: De volgende onderdelen moeten maandelijks worden gecontroleerd om losraken of sterke slijtage te voorkomen

1. Schroeven
2. Remmen
3. Koppeling/stelhefboom voor omschakeling tussen handbediening en elektrische bediening
4. De voor- en achterwielen en hun profieldiepte
5. Aansluitingen van controller en lader





8. Reclining



8. Leunen



De IQ-8000 kan naar achteren worden gezet met behulp van de hendel aan de rechterkant. Wilt u naar achteren leunen, knijp dan de hendel in en duw de rugleuning naar achteren. Wilt u naar voren leunen, knijp dan in de hendel en duw de rugleuning niet in.



***Rijd NIET met de rolstoel als deze achterover is gekanteld!
Als u dat wel doet, kan dat ernstig letsel veroorzaken.***





9. Hoofdleuning

- Plaats de hoofdsteun bovenaan de rugleuning en lijn de gaten uit. Steek de twee meegeleverde bouten in het hoofdsteunframe en gebruik de meegeleverde moeren om de hoofdsteun aan de rugleuning te bevestigen.
- De hoofdsteun is in hoogte verstelbaar. Om de hoogte van de hoofdsteun aan te passen, houdt u de hoofdsteun gewoon met uw hand vast en oefent u druk uit





10. Hoofdleuning

Om de koplamp en de USB-lader te installeren, steekt u de koplamp in de oplaadpoort van de joystick.





11. Technische ondersteuning

Ga naar <https://www.comfygomobility.eu/product-registration/>



en registreer uw product nu. Wanneer u uw ComfyGO elektrische rolstoel registreert, zorgt u ervoor dat u mogelijk in aanmerking komt voor verlengde garanteservice. U ontvangt dan ook product updates en belangrijk nieuws van ComfyGO producten. (Scan gewoon de QR-code met uw telefoon voor de registratielink)

- De snelste manier om ondersteuning te krijgen, kunt u mailen naar support@ComfyGoMobility.eu

Voor alle garantie- en retouraanvragen kunt u terecht op: <https://www.comfygomobility.eu/warranty-or-return-request>



(Scan de QQR-codemet uw telefoon voor de garantie *Link*)

Hier zijn een paar manieren om uw batterijen gezond te houden.

- Batterijdeskundigen stellen voor dat u de batterijen na 30 ladingen bijna volledig laat ontladen. De stroommeter zal opnieuw worden gekalibreerd.
- Vermijd het volledig ontladen van batterijen, tenzij er voordien 30 gedeeltelijke ladingen hebben plaatsgevonden.
- De prestaties zullen geleidelijk afnemen wanneer de batterij in ontladen toestand is achtergelaten.



12. Garantiebeleid



- Ons doel is ervoor te zorgen dat u blij bent met uw aankoop.
- Volgens onze garantieovereenkomst hebben alle nieuwe producten een beperkte garantie. Alle batterijen hebben een garantie van zes maanden. Reserveonderdelen hebben een garantie van een jaar. De beperkte garantie omvat niet: arbeid of defecten aan het apparaat die te wijten zijn aan verkeerd gebruik of nalatigheid van de eigenaar, niet-duurzame onderdelen en onderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn en vantage tot tijd vervangen moeten worden (bijvoorbeeld rubber materialen, accessoires, wielen of remmen, en plastic onderdelen). Alle garantieclaims vereisen een bewijs van aankoop en het serienummer.

Merk op dat uw garantie deze omstandigheden niet dekt:

- Functionele problemen: Problemen in verband met normaal gebruik en veroudering, zoals oppervlaktecoating en beplating, natuurlijke verbleking van harsen
- Vervanging van verbruiksmaterialen als gevolg van slijtage, zoals banden, zekeringen, plastic onderdelen, glazen onderdelen, smeermiddelen enz.
- Eventuele kosten voor inspectie, afstelling, olie bijvullen, reiniging, enz.
- Vergoedingen voor service en onderhoud uitgevoerd door dealers zoals aangegeven door onze fabriek
- Alle ongeoorloofde wijzigingen
- Onderhoudskosten bij eventuele niet-geautoriseerde servicecentra
- Als u nalaat de zaken regelmatig te controleren zoals gespecificeerd in deze handleiding hoofdstuk 7
- Onjuist of verkeerd onderhoud
- Als er ongeoorloofd onderhoud is uitgevoerd
- Ander gebruik dan beschreven in onze handleiding of als u de rolstoel overbelast
- Ongeoorloofde wijzigingen aan de rolstoel
- Externe factoren zoals: roet, geneesmiddelen, vogelpoep, zure regen, rondvliegende stenen, metaalpoeder, enz.
- Natuurrampen zoals: tyfoons, overstromingen, branden, aardbevingen enz. die de eenheid beschadigen

Bescherm het milieu

- Gooi deze rolstoel of zijn onderdelen en vooral de accu's niet weg. Lever ze in bij ons servicecentrum of volg de plaatselijke afvalverwerkingsvoorschriften.





COMFYGO
mobility


makes life easier



www.ComfyGoMobility.eu



info@ComfyGoMobility.eu

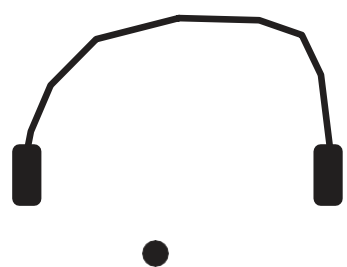

+31 208097031