

## Roege International

### Montagevoorschrift en garantie

#### Product: Rubber drempelhulpen en garantie

#### Belangrijk!

Lees voordat u de drempelhulp gebruikt aandachtig de gebruikershandleiding. Let goed op alle instructies, vooral op deze betreffende de veiligheid, en volg ze altijd op.

De rubber drempelhulp wordt geleverd met of zonder lijmlaag. De lijmlaag is geschikt voor een oppervlakte van tegels, houten vloeren, linoleum. Zorg voor het gebruik van de lijmlaag dat de drempelhulp en de vloer goed wordt ontvet.

Andere vloeren moeten op een andere manier worden gemonteerd. In natte ruimtes kan siliconenkit worden gebruikt. De drempelhulp kan in de breedte worden aangepast door deze in te snijden met een stanleymes of een zaag. Op deze manier kunnen er ook hoekjes uitgezaagd worden zodat de drempelhulp perfect aansluit.



#### Veiligheidsinstructies

Controleer regelmatig of de drempelhulp nog goed vastzit.

Rechte drempelhulpen	400 kg
Drempelhulpen met schuine zijvlakken	2500 kg
Drempelhulpen budget 10 en 15 cm	2500 kg

#### Reinigen

De drempelhulp kan gereinigd worden met standaard schoonmaakmiddelen. Rubber drempelhulpen worden niet glad behalve als ze niet goed schoon worden gehouden.

**Garantie**

De fabrikant geeft u een garantie van 2 jaar. Deze garantie vervalt bij schade door onjuist gebruik van het product. Als u schade constateert neemt u dan meteen contact op met Roege International. De garantie dekt geen ongelukken of andere schade eventueel gerelateerd aan het niet functioneren van het product. Uw factuur is uw garantiebewijs.

Heeft u dit product niet bij Roege International ([www.drempelhulpen.com](http://www.drempelhulpen.com)) aangeschaft dan kunt u voor een garantieclaim contact opnemen met de verkopende partij.

**Roege International b.v.**

Weverstraat 12

9403VJ Assen

[info@drempelhulpen.com](mailto:info@drempelhulpen.com)

[www.drempelhulpen.com](http://www.drempelhulpen.com)