

Beste Klant,

Hartelijk dank voor uw aankoop. Om de handgreep met zuignappen zo veilig mogelijk te gebruiken dienen aan de volgende dingen voldaan te moeten worden:

- De zuignappen werken alleen op een compleet gladde ondergrond. Nerf of voegen etc. zorgen ervoor dat het zuigeffect elk moment weg kan vallen, ook al blijven ze in de eerste instantie hangen.
- Voor gebruik dient de gladde ondergrond en de zuignap te worden ontvet. Dit kan bijvoorbeeld met spiritus.
- Voor optimaal gebruik dienen de zuignappen in warm (niet kokend) water rond de 5 minuten te weken.
- De handgrepen dienen als hulpmiddel en zijn **nooit** bedoeld om het volledige lichaamsgewicht op te vangen.

Zodra aan deze dingen voldaan zijn, dan kunt u lang en veilig gebruik maken van de handgrepen.

Ik wens u veel plezier van uw aankoop en hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Zorgthuiswinkel.nl