

2 timer.  
Kammarnack smärta. Kompresen  
inuti (max + 80 °C) 1-2 min. eller  
en handfull salt med vatten 1-2 min.  
skydd mot frost- / brännskador  
djuk eller lägrade mellan hud och  
för utövers bruk. Förvaras öfr-

### öinen kylma/lämpöpakkaus

#### oljapussilla

hennäs turvotusta ja lievittää kipua  
varmossa. Sopii urheiluvammojen,  
idustun ym kiputilojen hoitoon.  
kaus, jääkaapissa tai pakastimessa  
den turvin ajan.

Tulehdusettomien kiputilojen hoitoon.  
näkään max + 80 °C vesihäuteessä 5 min  
lyhytyssä kulloissa mikroaaltouunissa  
1-2 min.

ettumien / palovammojen välttämiseksi  
pää asettaa paljalle iholle, vaan esim.  
teen päälle tai pyyhkeen sisään. Vain  
nynöön. Ei lasten ulottuville.

og ...

eller kyldekap i minst to timer for bruk.  
**Varm:** Kan brukes ved ikke-betennelsesrelaterte  
strimler. Kompresen skal varmes i vannbad (maks  
+ 80 °C) 1-2 minutter eller i en skål med vann i  
mikrobølgeovn i 1-2 min.

**Advarsel:** For å unngå frostskader / forbrenning skal  
pakningen ikke plasseres direkte på huden. Plasser  
tøyrennetten som medfølger, et håndkle eller lignende  
mellom pakningen og huden. Kun til uterørs bruk.  
Oppbevares utilgjengelig for barn.

**Ingredienser:** Aqua, Glycerin, Carbonem,  
Sodium Hydroxid, Sodium Sulfate,  
Cl Food Blue 5, Phosphatidyl,  
Ethylhexylglycerin, Laurylamine  
Dipropylendianamine

290 x 120 mm

0100001



# Fystoline

Fystoline Oy  
Kantokatu 2  
33040 Tampere  
Finland  
[www.fystoline.fi](http://www.fystoline.fi)  
Made in Finland



9 418029 900791