

Interpretatie



Versijnt er slechts 1 **paarse lijn** (controlelijn) in de bovenste helft van het afleesveld, dan betekent dit dat u de test correct hebt uitgevoerd, maar dat er geen hCG kon worden aangetoond. U kunt ervan uitgaan dat u **niet zwanger** bent. Wanneer uw menstruatie niet binnen één week na de verwachte datum begint, dan raden wij u aan om contact op te nemen met uw huisarts. Vermijd bij een uitblijvende menstruatie potentiële risico's voor het embryo, zoals röntgenfoto's of alcoholmisbruik, omdat er nog steeds een kans bestaat dat u zwanger bent.



Versijnen er 2 **paarse lijnen** (controle- en testlijn) in het afleesveld, dan is het zwangerschapshormoon hCG aangetoond. U kunt ervan uitgaan dat u **zwanger** bent, ook wanneer de onderste lijn slechts in lichte mate zichtbaar is. Indien de testlijn slechts zwak zichtbaar is, kan dit wijzen op een heel vroeg stadium van de zwangerschap.

Neem onmiddellijk contact op met uw arts wanneer uw menstruatie uitblijft. Prenatale zorg is belangrijk! Vermijd potentiële risico's voor het embryo, zoals röntgenfoto's of alcoholmisbruik.

Als uw testresultaat positief is, maar uw menstruatie is nog niet te laat, raden wij u aan om na een paar dagen een 2e test uit te voeren, om het resultaat te bevestigen.

Extra informatie over de testresultaten kan u in de volgende kolom terugvinden.

De test is ongedigd wanneer er in het afleesveld na 15-20 minuten geen enkele paarse lijn verschijnt of wanneer enkel de testlijn verschijnt. Een ongedigd resultaat komt uiterst zeldzaam voor. Een beschadigde folieverpakking, foutief bewaren van de test of fout gebruik, zoals bijvoorbeeld te weinig urine, kunnen daarvoor de reden zijn. Gelieve in het geval van een ongedigd resultaat, het testmateriaal te behouden en contact op te nemen met CARE diagnostica.

Na 20 minuten kan het testresultaat niet meer betrouwbaar worden vastgesteld.

Gooi de teststaaf en de verpakking weg bij het huishoudelijk afval, nadat u het testresultaat heeft geëvalueerd.

Test buiten bereik van kinderen houden. Test na de vervaldatum niet meer gebruiken. Testcomponenten tussen de 4 en 30°C bewaren. Teststaaf niet openen. In-vitrotest voor zelfdiagnostiek.



Informatie bij het testresultaat

Tijdens uw zwangerschap zorgen zwangerschapshormonen zoals hCG, oestrogeen en progesteron ervoor dat uw zwangerschap normaal verloopt en de foetus zich normaal ontwikkeld.

De hoeveelheid hCG in de urine van een gezonde, niet-zwangere vrouw is minder dan 3 IU/L (Internationale Units per Liter). Bij een zwangerschap begint de hCG-concentratie al in de eerste dagen na de bevruchting te stijgen en bereikt rond de 10e week waarden tot wel 230000 IU/L.

Deze test geeft een indicatie van de zwangerschap, zodra de hCG-concentratie in uw urine 5 IU hCG/L bedraagt. Hoewel dit een zeer nauwkeurige test is, kan er in zeer zeldzame gevallen toch een vals resultaat voorkomen.

Redenen voor een vals negatief testresultaat:

- De hCG waarden kunnen tijdens de eerste dagen van de zwangerschap verschillen van vrouw tot vrouw. Ze liggen mogelijk nog te laag om al gedetecteerd te kunnen worden.
- Wanneer uw urine erg verdund is, kan de test ook een negatief resultaat opleveren.

Redenen voor een vals positief testresultaat - wanneer uw arts bevestigt dat u niet zwanger bent:

- Een aanzienlijk deel van de zwangerschappen gaat in de beginfase (eerste 4 weken) van de zwangerschap verloren. Dit kan een vals positief resultaat opleveren.
- De test kan geen onderscheid maken tussen normale en buitenbaarmoederlijke zwangerschappen. Beide gevallen kunnen een positief resultaat geven.
- Niet-zwangere vrouwen, hebben een hCG piek in het midden van hun menstruele cyclus. Deze kan in zeer zeldzame gevallen dicht bij de detectielimiet van deze test liggen.
- Sommige tumoren produceren hCG ("phantom hCG") en kunnen een zwangerschap nabootsen.
- Vrouwen die moeilijk zwanger kunnen worden, krijgen als behandeling injecties met hCG. Deze verhogen de hCG waarde in de urine en kunnen ook voor een vals positief testresultaat zorgen.

Bij peri-menopauzale vrouwen kan het hCG-niveau iets hoger zijn, hoewel de hoeveelheid hCG normaalgezien onder de detectielimiet van deze test ligt. Medicatie of ziekten (b.v. trofoblaste ziekten) kunnen het hCG-niveau beïnvloeden en kunnen tevens tot valse resultaten van deze test leiden. De anticonceptiepil beïnvloedt echter op geen enkele manier het testresultaat.

© CARE Diagnostica Productoren - u. Vertriebsges. mb.H., Roerwiese 8, 2214 Tassenhert, Austria. mail@care.cc.at, www.carediagnostica.com

CE 012888 HL
2476005-NL
REV 02 2016/12