

GEBRUIKSAANWIJZING

MEDICU ® MOBIELE BADGREEP MET ZUIGNAPPEN

De mobiele Medicu wandbeugels zijn speciaal ontworpen voor optimale veiligheid en gebruiksgemak. De veiligheidsgreep kan zonder gaten te boren bevestigd worden op alle gladde geglazuurde tegels (zonder ribbels of oneffenheden), in bad op emaille of op gladde pvc-wanden en op glas. De badgrepen zijn voorzien van een veiligheidsindicator die de hechtkracht controleert. Zodra de veiligheidsindicator op de badgreep rood kleurt, moet deze opnieuw worden vastgezet.

Let op: Deze grepen hechten niet op hout, stucwerk, behang of op tegels die geribbeld zijn of voorzien zijn van versieringen. Verder moeten de tegels groot genoeg zijn (20x20cm) en mogen de rubberen zuignappen niet op een voeg worden geplaatst.

De badgrepen zijn uitgebreid getest voor een hechtkracht van 79 kg (zie deze test video):

<https://www.badgrepen.nl/test-badgreep.mp4>

ALLEREERST: Tegels ontvetten met vochtige allesreiniger doekjes. Rubberen zuignappen aan de onderzijde ook schoonmaken met deze doekjes. Indien u de grepen gaat verplaatsen dan dient u dit nogmaals te herhalen. Wij adviseren u dit, wekelijks bij het schoonmaken van badkamer of toilet, te doen.

AANBRENGEN: Plaats de veiligheidsgreep op de tegels. Druk (stevig) op de handgreep en sluit daarna de clips. De indicatoren wijzigen van rood naar groen.

Blijft de handgreep niet zitten dan heeft u geen gladde tegels zoals hierboven omschreven en zit er niets anders op om gaten te boren en andere grepen met pluggen en schroeven vast te zetten.

De veiligheidshandgreep met zuignappen voor de badkamer, douche en het toilet is perfect om het uitglijden en vallen in de badkamer of toilet te voorkomen. Hecht gemakkelijk en stevig aan de tegels van de badkamer of aan de badkuip waardoor het mogelijk wordt om door de badkamer te bewegen met een grotere autonomie en meer veiligheid. Ideaal voor ouderen, kinderen, mensen met een handicap, beperkte mobiliteit etc.

