

Handleiding Giardia Ag Rapid Test Nederlands


Wieran

Testduur: 5-10 minuten

Monster: Ontlasting


www.wieran.nl

Testprocedure:

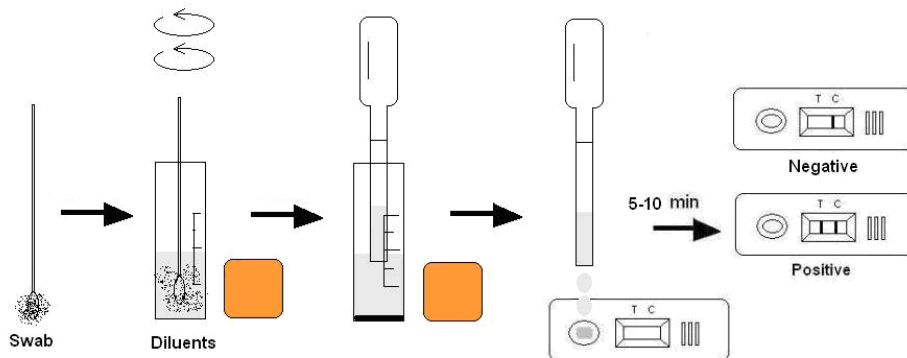

- Neem een heel klein beetje, dus geen schep, van de verdachte ontlasting met de swabstick (direct uit de kattenbak of uit de anus van de kat).
- Plaats de swabstick in de analysebuffer vloeistof. Draai een paar keer rond zodat er een goede menging van de ontlasting met de vloeistof ontstaat.
- Laat dit mengsel gedurende 1 minuut bezinken..
- Indien het monster troebel is, kan de vulopening verstopt raken en de vloeistof niet goed naar het membraan stromen. Gebruik dus alleen de vloeistof, dus niet het bezinksel.
- Neem de giardia test uit de verpakking en zet deze op een horizontale ondergrond.
- Druppel geleidelijk met de pipet 3 -4 druppels van het monster-extract op het testvlak (cirkel). Let er hierbij op dat er geen vaste deeltjes mee komen.
- Soms is het noodzakelijk om nog 1 of 2 druppels meer toe te voegen om de stroming op gang te houden.
- Interpreteer het resultaat na 5-10 minuten. Na meer als 10 minuten wordt het af te lezen resultaat als ongeldig gezien.

Interpretatie van het resultaat:

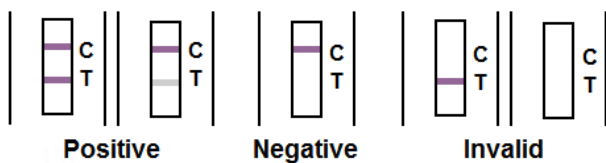

- Positief: zowel de streep onder de C als onder de T zijn te zien. Het maakt niet uit of deze helder of vaag zichtbaar is.
- Negatief: alleen de streep onder de C is zichtbaar.
- Ongeldig: als er geen streep in het C vlak zichtbaar is.

Gebruik:

Zowel de testkit als het monster moeten voor gebruik op kamertemperatuur zijn (niet verwarmen)

- Verwijder de verpakking pas direct voor gebruik
- De testkit kan eenmalig gebruikt worden
- Gebruik de testkit niet nadat de uiterste gebruiksdatum is overschreden
- De bewaartemperatuur voor de testkits is 2-30 graden Celcius
- De testkit mag nooit in de diepvries en ook niet blootgesteld worden aan direct zonlicht

Deze test kit is geen vervanging van een erkende dierenarts, raadpleeg bij twijfel altijd uw dierenarts.