




RUB
pour
de contact

sterile A

 **CE** 0344

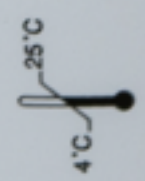

PHMB 0,0001%
info@melleson.nl

03REFUCNB240EF

Eye Fresh No Rub is geschikt voor het desinfecteren, inzetten, verwijderen en reinigen van eiwitafzettingen en vetaanslag van alle zachte contactlenzen.
Samenstelling: Eye Fresh No Rub is een gebufferde, isotonische oplossing welke het volgende samenstellingsbestanddeel bevat: Poloxamer 407.

GEBRUIKSAANWIJZING
De garantiesluiting van de fles wordt verbroken door de dop te draaien. Direct na het uitpakken de lenzen beide zijden van de fles grondig spoelen met Eye Fresh No Rub. Plaats de lenzen in de fles en schud deze gedurende 10 seconden. Om de lenzen te reinigen...