

Productomschrijving van Scholl Stop Wratten:**Toepassing van Scholl Stop Wratten:**

Dit product is bedoeld voor de behandeling van wratten en voetwratten.

Een enkele behandeling is over het algemeen voldoende, maar voor voetwratten kunnen herhalingen van de behandeling nodig zijn. Dezelfde gewone wrat of voetwrat niet meer dan 4 keer in totaal behandelen.

Gebruik van Scholl Stop Wratten:

Na het aanbrengen ontstaat een blaas. De wrat zal er meestal binnen 10 tot 14 dagen afvallen waarna er nieuwe, gezonde huid in de plaats groeit.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden, Niet geschikt voor mensen met diabetes of slechte bloedsomloop of kinderen jonger dan 4 jaar. Niet gebruiken tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Uitsluitend gebruiken volgens de gebruiksaanwijzing.

Uitsluitend gebruiken met de meegeleverde applicators, verkeerd gebruik van het product kan brandwonden, littekens op gezond weefsel of blindheid veroorzaken.

Vermijd contact met de ogen. Uitsluitend voor uitwendig gebruik. Niet inademen en uitsluitend gebruiken in een goed geventileerde ruimte. Gebruik stopzetten als er irritatie optreedt.

Houder onder druk. Verwijderd houden van vuur en gloeiende voorwerpen. Uit direct zonlicht houden en niet blootstellen aan temperaturen boven de 50 graden Celsius.

Voldoend voor 12 toepassingen.

Bevat: 1 spuitbus 80 ml/53 gram (dimetylether, propaan, isobutaan, drijfgas: koolwaterstof) en 12 applicators voor eenmalig gebruik.

Stop Wratten is gebaseerd op de bevroeringsmethode die in de gezondheidszorg wordt toegepast. het is een effectieve en eenvoudige manier om gewone wratten en voetwratten te behandelen.