



Lichtgewicht rollator MultiMotion Double

Artikelnummers: 10050007 Antraciet 10050008 Champagne 10050009 Wit 10050010 Zilver 10050018 Rood



N.B. Deze rollator zal geïnstalleerd moeten worden door een competent persoon. Overschrijdt het maximale gebruikersgewicht van 113 kg niet – hierdoor loopt men groot gevaar.

Beoogde doel en gebruiker

Lichtgewicht rollators zijn uitsluitend bedoeld voor een gebruiker die niet goed meer kan lopen zonder ondersteuning of een beperkte mobiliteit heeft, voor eigen persoonlijk gebruik binnen en buiten op droge, stevige en vlakke ondergronden.

Het maximale gebruikersgewicht (zowel de gebruiker als het eventuele gewicht van de accessoires die op de rollator zijn gemonteerd) staat vermeld op het label, deze zit op het frame van de rollator bevestigd. Garantie kan alleen worden aangegaan als het product is gebruikt onder de gespecificeerde voorwaarden en voor de beoogde doeleinden. Gebruik of monteer GEEN onderdelen van derden op de rollator, tenzij deze officieel zijn goedgekeurd door de fabrikant.

Voor gebruik

- Verwijder zorgvuldig alle verpakkingen. Vermijd het gebruik van messen of andere scherpe instrumenten, omdat dit het product kan beschadigen.
- Controleer het product voor eventuele zichtbare schade. Als u schade of verdachte fouten ziet verzoeken wij u geen gebruik te maken van het product, maar neem contact op met uw leverancier voor ondersteuning.

Onderdelenlijst



Als u het idee heeft dat u een afwijking aan het product ziet neemt u dan aub contact op met uw leverancier.

Montage instructies :

Foto 1



Stap 1:

Til de handgrepen omhoog en druk deze naar voren tot deze in de vergrendeling klikt. Controleer of de vergrendeling aan beide zijden goed vast zit.

Weer inklappen: schuif de rode knoppen aan beide zijden naar voren en trek dan het frame naar de achterwielen toe. De rollator is nu ingeklapt.

Foto 2



Stap 2:

Steek de pin van het voorwiel in het frame totdat hij vastklikt. Wanneer u een duidelijke klik hoort en de rode knop omhoog komt is het wiel goed bevestigd. Zie **foto 2**. Het voorwiel is nu juist gemonteerd. Herhaal dit voor het tweede voorwiel. Controleer of de wielen goed vastzitten door er even aan te trekken.

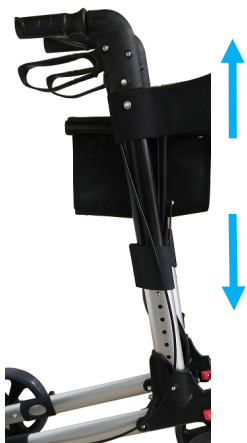


Foto 3

Stap 3:

U kunt de hoogte van de handgrepen eenvoudig aanpassen om een goede loophouding te garanderen. Ga zo rechtop mogelijk achter de rollator staan:

- Houd uw armen straks langs uw lichaam naar beneden
- De vuistregel is dat de handvatten van de rollator op polshoogte moeten zitten.

Druk op de knop en trek de handgreep naar boven of naar beneden. Laat de knoppen los wanneer hij voor het juiste gaatje zit. Deze knop borgt zit automatisch vast in het frame. Herhaal dit proces totdat de gewenste hoogte is bereikt.

(foto 3)



Foto 4

Stap 4:

Bevestig de tas aan de 2 haakjes van het frame. De boodschappentas kan gemakkelijk weer worden verwijderd indien nodig. (foto 4)



Foto 5

Uitklappen en vergrendelen

Klap de rollator uit door de handgrepen van elkaar af te trekken. Vergrendel de rollator vervolgens door de zitting aan beide zijanten omlaag te drukken tot deze in vergrendeling klikt. (Foto 5)



Foto 6

Inklappen:

Om de rollator in te klappen trekt u de zitting naar boven aan de zwarte hendel zoals getoond in foto 6.



Foto 7

Bediening van de remmen

1. Knijp voorzichtig de remhendels in om de rollator af te remmen. Zie **foto 7**

2. De remmen beschikken ook over een parkeeroptie. Druk beide remhendels volledig naar beneden tot ze vast komen te staan. De achterwielen worden op deze manier geblokkeerd en het is dan veilig om op de rollator te zitten. **Foto 8**

3. Om de rollator van de parkeerrem af te halen knijpt u voorzichtig in de remhendels. De rollator is dan weer eenvoudig te gebruiken.



Foto 8

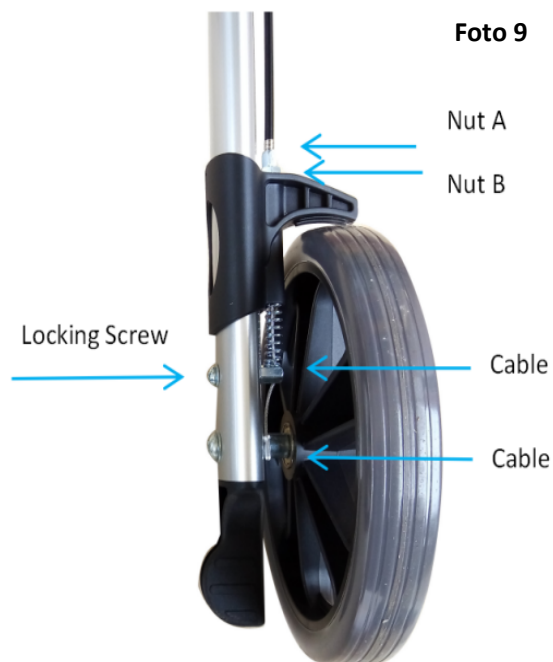


Foto 9

Rem bijstelling

De remmen van uw rollator zullen periodieke bijstelling vereisen.

Om de remmen bij te stellen draait u moer **B** los en draait u moer **A** aan om de rem strakker te zetten (of los om minder strak te zetten). Wanneer dit juist is aangepast (controleer dit door te voelen aan de remmen) draait u moer B weer aan.

Indien verdere bijstelling noodzakelijk is, draai de sluitschroef los (locking screw) en trek vervolgens met een tang de kabel ongeveer een millimeter naar beneden. Draai de sluitschroef weer vast. De remmen kunnen dan verder aangepast worden door het losmaken van moer B en moer A zoals voorheen aangegeven. (**Foto 10**)

Rem

Remmen tijdens het lopen: Trek de remhendels omhoog.

Parkeerrem tijdens stilstand of gebruik van de zitting: Duw de remhendels omlaag.

Hulp bij stoepranden (Hellinghulp)

Indien u achter op het verlengde frame met uw voet op de hellinghulp duwt (langs het achterwiel), maakt u het makkelijker de voorwielen te liften.

Veiligheidsinstructies

- Overschrijdt nooit de minimum en maximum toegestane hoogte van de handvatten.
- Hang niet op de handvaten, gevaar om te kantelen!
- Gebruik de remmen tijdens het lopen op steilere hellingen (trek de hendels omhoog).
- Gebruik de rollator op een vaste en stevige ondergrond.
- Gebruik de rollator nooit om voort te bewegen wanneer deze nog is ingeklapt. Er bestaat een gevaar dat de rollator kantelt.
- Bij het in- en uitklappen van de rollator kunnen kleding of lichaamsdelen bekneld raken.
- Gebruik voor doeleinden anders dan lopen, zoals het transporteren van zware goederen, is niet toegestaan en gevaarlijk.

Schoonmaak











Het schoonmaken en desinfecteren zou regelmatig uitgevoerd mogen worden. Gebruik een milde zeep zonder schuurmiddelen. De standaardmethoden voor desinfectie kunnen gebruikt worden. Gebruik in geen geval stoomreinigers of schoonmaakmiddelen met bijtende stoffen.

Technische Specificatie:

- Maximaal gebruikersgewicht: 113 kg
- Totale gewicht: 6.9 kg
- Maximaal gewicht boodschappentas: 5 kg

Label en symbolen

Dit is een voorbeeld label. Het label op uw product kan er anders uit zien.

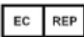		 MAX. XXX KG	LOT XXXXXXXXXXXX	
TYPE: XXXXXX		REF XXXXXXXXXXXX		   
		 XXXXXX	<div style="border: 2px solid red; padding: 10px; text-align: center;"> Barcode </div>	
 DD-MM-YYYY	 XXXXXX			
GARANTIE: X jaar garantie (uitgezonderd de onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage) WARRANTY: X year warranty (parts subject to normal usage wear and tear are excluded from warranty) GARANTIE: X Jahre Garantie mit Ausnahme der Teile, die dem Verschleiß unterliegen GARANTIE: X ans de garantie à l'exclusion des pièces sujettes à l'usure			VERSION: XXXXXX	
 MultiMotion B.V. Weezenhof 61-58, 6536 AM Nijmegen The Netherlands www.multi-motion.nl				



Maximale gebruikersgewicht



CE keurmerk



Medisch hulpmiddel



Lot/Batch nummer



Let op, instructies bijgevoegd



Adresgegevens importeur



Adresgegevens fabrikant



Handleiding raadplegen voor gebruik



Adresgegevens Authorized representative



Artikelnummer



Productiedatum

Achter "TYPE:" staat wat voor een product het is.

Achter "VERSION" staat het versienummer van het label.

In het vak "Barcode" staat de scanbare barcode.

Service en Garantie

De importeur stelt zich niet verantwoordelijk voor verwondingen aan de gebruiker of schade aan eigendommen, indien bij het gebruik van de rollator de aanbevelingen en waarschuwingen niet zijn opgevolgd. De rollator is, indien de omgangsregels zoals deze beschreven staan in deze handleiding worden opgevolgd, een uiterst veilig en stabiel product. Het is echter wel mogelijk dat, wanneer de gebruiksaanwijzingen niet correct wordt nageleefd, er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.

Op deze rollator zit een garantietermijn van 24 maanden. Neem voor garantie en service contact op met de gemachtigde dealer waar u uw product hebt gekocht. Hebt u na deze termijn van 24 maanden toch (technische) problemen met het product dan kunt u ook de gemachtigde dealer benaderen voor een eventuele oplossing.

Als het voorkomt dat u niet naar tevredenheid wordt geholpen wat betreft de garantie en service, stuurt u dan alstublieft een email naar MultiMotion afdeling klantenservice op onderstaand adres: info@multi-motion.nl

Importeur:

MultiMotion B.V.
Weezenhof 61-58
6536 AM Nijmegen
Nederland
Tel. 024-6794583

Authorized representative:

Sungo Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7
2909 VA Capelle aan den IJssel
Nederland

Fabrikant:

Foshan Oscar Medical Instrument CO.,LTD
Add:No. 2 (Workshop C), Nanhai National Eco-industrial Demonstration Park
Danzao Town, Nanhai District
Foshan city, Guangdong Province
China



Medical Device