

Montage

Quickramps kunnen eenvoudig geïnstalleerd worden met Quicktape of Quickpads. Quickpads maken het mogelijk dat de ramps eenvoudig gemonteerd en gedemonteerd kunnen worden, zodat eronder schoongemaakt kan worden.



Meten met de RampOmeter

Het is belangrijk dat de ramp in de juiste hoogte besteld wordt. Het beste resultaat bereikt u door het gebruik van onze rampmeter, [die hier besteld kan worden](#).



Schoonmaak

Om de best mogelijke hechting van ofwel Quicktape of Quickpads te bereiken, moet u de ondergrond grondig reinigen.



Gebruik van Quickpads

Monteer Quickpads vooraan de kleine pijltjes op de ramp.



Verwijder de ramp, en zet hem weer terug

Bij het gebruik van Quickpads kan de ramp verwijderd, en weer teruggezet worden, zodat eronder schoongemaakt kan worden.



Gebruik van Quicktape

Het beschermingspapier wordt van de voorgemonteerde tape verwijderd, en de ramp wordt stevig vastgedrukt op de gewenste plek.