

Handleiding oorreiniger

Ook zo'n last van oorsmeer en vuil in uw oorgangen? Zoekt u een snel en veilig apparaat om dit goed en secuur te verwijderen? Misschien bent u het wel beu om steeds met een pijnlijk staafje in uw oren te draaien?

Met de Jokenz Earscratcher kan u makkelijk en pijnloos zonder uw oorkanaal te beschadigen uw oren reinigen. De oorsmeer verwijderaar is van zeer hoge kwaliteit en is ontworpen voor het schoonmaken op een pijnloze, veilige en prettige manier van de oren van baby's, kinderen en volwassenen.

Hoe te gebruiken

Voor het gebruik van deze oorreiniger moet u deze opladen zodat het optimaal kan gebruikt worden. Eens deze opgeladen is kan u hem heel makkelijk gebruiken.

Vooraleer u deze in gebruik neemt zorgt u steeds dat het opzetstukje bevestigd is (in de doos zitten 2 extra opzetstukjes).

Door op de aan/uit knop te klikken kan u de oorreiniger aanzetten en zal u een led licht zien branden over het volledige opzetstukje.

Nadat u deze heeft aangezet kan je deze makkelijk gebruiken door met een vlotte ronddraaiende beweging het oorspuut te verwijderen. Tijdens het gebruik moet je steeds opletten dat je het apparaat niet te diep in de oren duwt zodat je geen schade veroorzaakt.

Na enkele vlotte draaiende bewegingen is oor volledig oorspuut vrij.

Na het gebruik van de oorreiniger neemt u steeds het opzetstukje er af zodat u deze kan reinigen, nadien is dit gebruiksklaar voor het volgende gebruik.

