



# Mat.Care

## Gebruiksaanwijzing Mat Care Zwangerschapstest Ultra

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat je de test uitvoert

### Test uitvoeren:

- Haal de test uit het witte sachet.
- Verwijder de dop
- Houd het absorptiegedeelte minimaal 5 seconden in de urinestraal (afbeelding 1) of 10 seconden in een bakje opgevangen urine. De test heeft voldoende urine opgenomen als testvlak T C roze begint te kleuren.  
Let op: gebruik ochtendurine als je vóór de menstruatiedatum test.
- Leg de test plat neer (afbeelding 2).
- Wacht 5 minuten totdat de verkleuring in de test weggetrokken is en er 1 of 2 lijnen zichtbaar zijn.
- Nu kun je het resultaat aflezen.

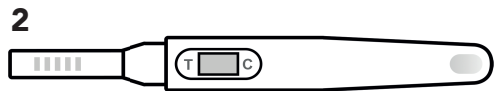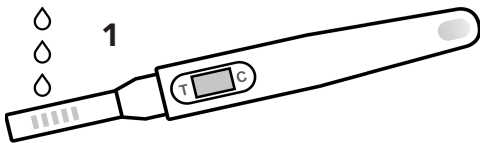


### Resultaat aflezen:

#### Negatief resultaat



Als alleen de controlelijn (C) verschijnt, geeft de test aan dat je niet zwanger bent. Het kan zijn dat je te vroeg getest hebt. Bij twijfel kun je over 1 of 2 dagen nogmaals een test uitvoeren.

#### Positief resultaat

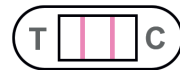

Als er 2 lijnen verschijnen, geeft de test aan dat je zwanger bent. Ook een bij een licht gekleurde testlijn (T) is de test positief.

**Ongeldig resultaat:** Als er binnen 5 minuten geen lijnen verschijnen dan is het resultaat ongeldig en dien je een nieuwe test uit te voeren. Zorg ervoor dat je de gebruiksaanwijzing nauwkeurig volgt.

Let op: resultaat aflezen binnen 20 minuten! Interpreteer geen resultaten voordat de controlelijn verschenen is. Indien je korter dan 8 weken geleden bent bevallen of een miskraam hebt gehad, kan het zijn dat er hCG waargenomen wordt, maar je niet zwanger bent.

### Hoe werkt de test?

De test detecteert het zwangerschapshormoon hCG (Human Chorionic Gonadotropin) in urine. Dit hormoon is aanwezig vanaf 1 week na de conceptie en verdubbelt elke 1,5 à 2 dagen. Op de 1e dag van de gemiste menstruatie (2 weken na conceptie) is dit gestegen tot boven 100 mIU/ml. De piek ligt bij 10 - 12 weken tussen 30.000 en 200.000 mIU/ml.

Deze zwangerschapstest heeft een gevoeligheid van 10 mIU/ml en kan vanaf 6 dagen voor de verwachte menstruatie worden uitgevoerd. Het is afhankelijk van het hCG-gehalte in je urine of de test hCG kan waarnemen op dat moment, daarom is het aan te raden de test uit te voeren vanaf de eerste dag van je gemiste menstruatie.

## In de verpakking:

Afhankelijk van aantal per verpakking:  
3/6/12x Sachet met midstream test  
1x Gebruiksaanwijzing

Extra benodigheden:  
Opvangbakje voor urine  
Klok of timer voor de wachttijd

## Vragen en antwoorden:

**Wat te doen bij een negatief resultaat?** Als het resultaat negatief is (1 lijn), is er geen hCG waargenomen en ben je waarschijnlijk niet zwanger. Het kan zijn dat je te vroeg getest hebt of je kunt je hebben vergist in de menstruatie datum, zeker als je een onregelmatige cyclus hebt. Als je menstruatie langer dan een week uitblijft en je nog steeds een negatief testresultaat ondervindt, is het verstandig contact op te nemen met je huisarts.

**Wat te doen bij een positief resultaat?** Indien de uitslag van de test positief is (2 lijnen), dien je contact op te nemen met je huisarts. Tijdige prenatale zorg is belangrijk voor de gezondheid van jou en je baby.

**Wat te doen als je twijfelt aan het resultaat?** Als je denkt dat je de testlijn ziet, maar twijfelt, raden wij je aan na 2 dagen opnieuw een test uit te voeren, bij voorkeur met ochtendurine. Indien je daadwerkelijk zwanger bent, zal de concentratie van hCG dan aanzienlijk verhoogd zijn. De testlijn zal dan duidelijker zijn.






**Wat als ik een kleurloze testlijn zie?** De test is positief als de testlijn gekleurd is. Deze is met het blote oog dan gemakkelijk te zien, zonder moeite. Als de testlijn zo vaag en kleurloos is, dat je deze alleen onder een felle lamp kunt zien, dan is het resultaat negatief.






**Wanneer kan de test worden uitgevoerd?** Als je vóór de menstruatiedatum test, dan is je eventuele zwangerschap nog heel pril en kan de hCG concentratie in de urine nog laag zijn en kun je het beste met ochtendurine een test uitvoeren, dan is de hCG concentratie het hoogst. Vanaf de dag waarop je menstruatie zou moeten beginnen, kun je op ieder moment van de dag een test uitvoeren.

**Hoe betrouwbaar is deze zwangerschapstest?** Laboratoriumtesten hebben aangetoond dat de Mat Care Zwangerschapstest Ultra meer dan 99% betrouwbaar is, als de test wordt gebruikt vanaf de dag waarop je menstruatie zou moeten beginnen.

## Belangrijk:

Na openen van het witte sachet, test direct gebruiken / Buiten bereik van kinderen houden / Niet gebruiken na houdbaarheidsdatum / Mat Care is niet aansprakelijk voor het onjuist uitvoeren van de test of het onjuist interpreteren van het testresultaat.

|  |                               |
|--|-------------------------------|
|  | Lees instructies voor gebruik |
|  | Bewaren tussen 2 ~ 30 °C      |
|  | Droog bewaren                 |
|  | Batch nummer                  |
|  | Fabrikant                     |
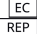
|   |                             |
|---|-----------------------------|
|  | In-vitro diagnosticum       |
|  | Voor eenmalig gebruik       |
|  | Niet blootstellen aan hitte |
|  | Houdbaarheidsdatum          |
|  | Europese vertegenwoordiger  |



Mat Care  
De Populieren 5  
9781MH Bedum, Nederland  
info@matcare.nl  
050-2340443

Revisiedatum 4 april 2022



Hangzhou Biotest Biotech Co., Ltd.  
17# Futai Road, Zhongtai Street, Yuhang District  
311121 Hangzhou, P.R. China



Shanghai International Holding Corp. GmbH  
Eiffelstrasse 80, D-20537, Hamburg, Germany

CE 0123