

Gedistribueerd door:

Ydona B.V.

**Ydona.**

www.ydona.nl



Geproduceerd door:



**TensCare Ltd**

9 Blenheim Road,  
Epsom,  
Surrey, KT19 9BE,  
UK  
Tel: +44(0) 1372  
723434



**Advena Ltd**

Tower Business  
Centre,  
2nd Flr, Tower  
Street,  
Swatar, BKR 4013,  
Malta



**TensCare Europe BV**

Juliana van  
Stolbergstraat 52,  
1723LD  
Noord-Scharwoude,  
Netherlands




I-CM50100PM-NL Rev 1.0 05/23

**TensCare™**

 **Electrodes**  
Perfect mama

4 Herbruikbare elektrodenpads

**REF** E-CM50100PM

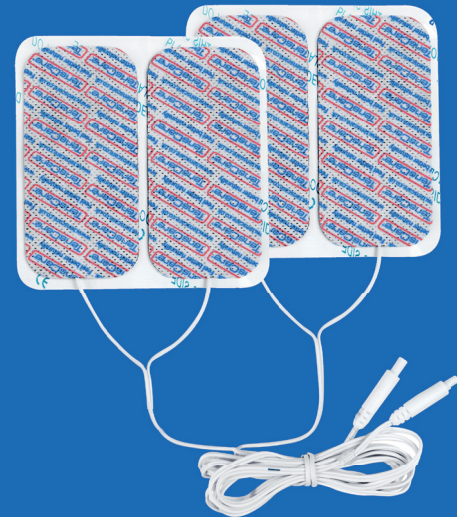

Instructies voor gebruik  
Aandachtig lezen voor gebruik

**TensCare™**

### **Toepassing van de elektrodenpads:**

1. Haal de elektrodenpads uit hun opbergtas. Ontrafel de geleidingsdraden.
2. Nadat u er eerst zeker van bent dat de perfect mamaTENS of perfect mama+ is uitgeschakeld, met de elektrodenpads nog op de plastic voering, steekt u de twee stekkers van de aansluitdraden in het apparaat.
3. Stel vast waar de elektrodenpads moeten worden geplaatst. Dit zal zijn zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing of in overeenstemming met het advies van uw verloskundige of arts.
4. Waar de elektrodenpads moeten worden aangebracht, reinig de huid en droog grondig af. Zorg ervoor dat de huid vrij is van op olie gebaseerde crèmes/lotions, omdat dit de zelfklevende gel kan aantasten.
5. Plaats het midden van de elektrodenpads op de huid en strijk het glad langs de randen van het elektrodenpads. Bewaar de verpakking zodat de elektrodenpads na gebruik kunnen worden opgeborgen zonder zichzelf te beschadigen.
6. Zorg er tijdens het gebruik voor dat de geleidingsdraden naar alle vier de elektrodenpads slap blijven en dat geen enkele onder spanning staat. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot defecte elektrodenpads

### **Elektrodenpads verwijderen:**

1. Zorg er na gebruik voor dat de perfect mamaTENS of perfect mama+ is uitgeschakeld voordat u de elektrodenpads van de huid verwijdert.
2. Verwijder de elektrodenpads door ze van de rand af te trekken. Trek NIET aan de geleidingdraad.
3. Plaats de elektrodenpads tussen gebruik door op hun verpakking en plaats ze terug in de opbergtas en sluit ze af.

### **Belangrijk:**

1. Neem alle contra-indicaties, waarschuwingen en waarschuwingen in acht die zijn meegeleverd met het apparaat dat u met deze elektrodenpads gebruikt.
2. Elektrodenpads zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik bij één patiënt.
3. Breng geen elektrodenpads aan op een beschadigde huid of op een huid zonder normaal gevoel.

### **Waarschuwingen**

Negeer geen enkele allergische reactie op de elektrodenpads: Als er huidirritatie optreedt, stop dan met het gebruik van het apparaat, aangezien een klein aantal gebruikers een negatieve reactie op de gel kan hebben.

Alleen voor gebruik met zenuwstimulatoren die zijn goedgekeurd volgens EN 60601-1 en EN60601-2-10

