



Medisch hulpmiddel CE 0481

## Uitwendige Aambeien Spray

- **Behandelt uitwendige aambeien**
- **Verzacht pijn en verlicht jeuk veroorzaakt door uitwendige aambeien**
- **Vermindert irritatie, zwelling, bloeden, jeuk, pijn, branden en beschermt de geïrriteerde huid**

**Algemeen advies:** Lees de instructies voor gebruik zorgvuldig door voordat u Lucovitaal® Aambeien Spray gaat gebruiken, óók als u dit medisch hulpmiddel al eerder heeft gebruikt. De informatie kan zijn aangepast aan de laatste inzichten en gegevens wanneer u aan een nieuwe verpakking begint. Dit medisch hulpmiddel is vrij verkrijgbaar. Desondanks moet u Lucovitaal® Aambeien Spray zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te bereiken. Bewaar deze instructies voor gebruik, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.

**Toepassing:** Lucovitaal® Aambeien Spray is een medisch hulpmiddel voor de behandeling van uitwendige aambeien en andere kleinere aandoeningen in het gebied rondom de anus en de endeldarm zoals anale jeuk en kloofjes. Deze beschermende gel spray vermindert irritatie, zwelling, bloeding, jeuk, pijn en een branderig gevoel. Het voorkomt dat de geïrriteerde huid in aanraking komt met vocht of ontlasting uit de endeldarm, waardoor de aandoening kan verergeren.

**Dosering en gebruik (voor volwassenen):** Zorg dat de spraykop verticaal omhoog staat alvorens het aanbrengen van de gel spray. Schud zachtjes alvorens gebruik. Bij het eerste gebruik kan het voorkomen dat er meerdere malen gedrukt moet worden om de sprayer te activeren. Breng vervolgens de gel spray aan en zorg dat de uitwendige aambeien(en) met een dun laagje is bedekt. Doe dit 2 tot 4x per dag gedurende 7-14 dagen, bij voorkeur na de stoelgang. Gebruik de spray niet langer dan 30 dagen aaneengesloten.

**Werkingsmechanisme:** Het werkingsmechanisme van Lucovitaal® Aambeien Spray is gebaseerd op een fysiek principe waarbij een hechtende, beschermende film op de aambeien wordt geplaatst. Deze barrière biedt verlichting van irritatie, zwelling, bloeden, jeuk, pijn, branden en beschermt de geïrriteerde huid.



**Bijwerking(en):** Tot op heden zijn er geen bijwerkingen waargenomen, mits gebruikt volgens de gebruiksaanwijzing, echter is er een kleine kans op irritatie.

**Gebruik tijdens zwangerschap en/of borstvoeding:** Over het gebruik van Lucovitaal® Aambeien Spray zijn geen gegevens bekend. Raadpleeg eerst uw arts of apotheker wanneer uw zwanger bent of borstvoeding geeft.



### Waarschuwingen:

- Buiten het bereik van jonge kinderen houden;
- Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum die op de verpakking staat.

Gebruik Lucovitaal® Aambeien Spray niet bij:

- Overgevoeligheid voor één of meer van de ingrediënten;
- Als u twijfelt of u Lucovitaal® Aambeien Spray kunt gebruiken in combinatie met medicatie raadpleeg dan eerst uw arts of apotheker.

**Ingrediënten:** Aqua, Glycerin, Betaine, Laureth-9, Phenoxyethanol, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Allantoin, Ethylhexylglycerin, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Sodium Hydroxide, Sodium Hyaluronate.

**Inhoud:** 40 ml met sprayer



**Wijze van bewaren:** Bij (5-25°C) op een droge, donkere plaats bewaren, in de originele verpakking, buiten het bereik van jonge kinderen.



Voor vervaldatum zie onderzijde van de verpakking.

**Medisch hulpmiddel:** Lucovitaal® Aambeien Spray is een medisch hulpmiddel Klasse IIa, volgens de Europese richtlijn voor medische hulpmiddelen 93/42/EEC.

Datum waarop deze gebruiksaanwijzing voor het laatst is herzien: Oktober 2021 • 092157 V1.0



PK Benelux BV  
Vluchttoord 17, 5406 XP Uden, NL



NL: 0900 582 68 48 • B: 0800 731 83

[lucovitaal.nl](http://lucovitaal.nl)

CE 0481