

# Mat.Care


## Gebruiksaanwijzing Mat Care Multi-Drug Panel

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat je de test uitvoert


### Test uitvoeren:

- Vang wat urine op in een schoon, droog bakje (afbeelding 1/2).
- Haal de cassette uit het witte sachtet.
- Verwijder de dop.
- Houd de test met de absorberende strips gedurende 10-15 seconden in de urine (afbeelding 3). Zorg dat het plastic van de cassette de urine niet raakt. De test heeft voldoende urine opgenomen als testvlak T C roze begint te kleuren.
- Leg de test plat neer (afbeelding 4).
- Wacht 5 minuten totdat de verkleuring in de test weggetrokken is en er 1 of 2 lijnen zichtbaar zijn op de teststrips.
- Nu kun je het resultaat aflezen.


1

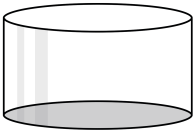


2

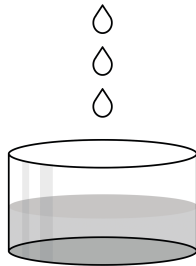

3

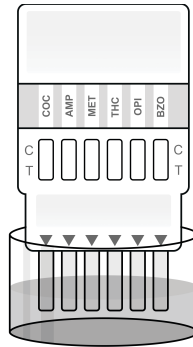

4

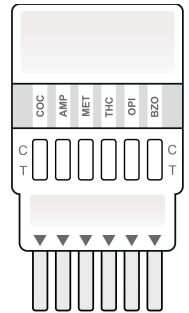

### Resultaat aflezen:

De C staat voor Controlelijn. Deze lijn verschijnt altijd indien de test goed is uitgevoerd.

De T staat voor Testlijn, deze verschijnt altijd wanneer er geen drugsstoffen worden waargenomen.

#### Negatief resultaat



Als er 2 lijnen verschijnen is het resultaat negatief. De geteste drug is niet aangetroffen of de concentratie is lager dan getest kan worden met deze test. De kleur van testlijn (T) kan variëren. Ook een lichtgekleurde lijn is een negatief resultaat.

#### Positief resultaat



Als alleen de controlelijn (C) verschijnt en geen testlijn (T) zichtbaar is, dan is het resultaat voor die specifieke drug positief. De drug is aangetroffen in een concentratie die boven de grenswaarde ligt (zie tabel op achterzijde).

**Ongeldig resultaat:** Als er binnen 5 minuten geen lijnen verschijnen dan is het resultaat ongeldig en dien je een nieuwe test uit te voeren. Zorg ervoor dat je de gebruiksaanwijzing nauwkeurig volgt.

Let op: resultaat aflezen binnen 10 minuten! Interpreteer geen resultaten voordat de controlelijn verschenen is.

## In de verpakking:

Afhankelijk van aantal per verpakking:  
2/4/8/25x Sachet met testcassette  
1x Gebruiksaanwijzing

Extra benodigheden:  
Opvangbakje voor urine  
Klok of timer voor de wachttijd

## Hoe werkt deze test?

Deze test detecteert de aanwezigheid van afbraakstoffen van drugs, indien deze in hogere mate aanwezig zijn dan de aangegeven grens in onderstaande tabel. Als er drugs of afbraakstoffen in de urine aanwezig zijn, breken deze de kleurstof af, waardoor de testlijn niet verschijnt of na korte tijd verdwijnt. De test is positief als er geen testlijn zichtbaar is. Als de test positief is, dan heeft de testpersoon recent de desbetreffende drug gebruikt.

Code	Drug	Gevoeligheid
AMP	Amfetamine	300 ng/ml
BZD/BZO	Benzodiazepine (Oxazepam)	100 ng/ml
COC	Cocaïne	100 ng/ml
MET	Metamfetamine (Crystal, Meth, Yaba)	300 ng/ml
OPI	Opiaten	100 ng/ml
THC	Marihuana, Hasj	20 ng/ml

### Wanneer kan de test worden uitgevoerd?






Hoewel ochtendurine de hoogste concentratie drugs afbraakstoffen bevat, is de Mat Care Drugs test gevoelig genoeg om op ieder moment van de dag te worden uitgevoerd. Wanneer de test niet direct wordt uitgevoerd, kan het monster worden ingevroren. Laat voor het testen de urine op kamertemperatuur komen.






### Hoe betrouwbaar is deze test?

Laboratoriumtesten hebben aangetoond dat de Mat Care Drugs test meer dan 99% betrouwbaar is.

## Belangrijk:

Na openen van het witte sachet, testcassette direct gebruiken / Buiten bereik van kinderen houden / Niet gebruiken na houdbaarheidsdatum / Mat Care is niet aansprakelijk voor het onjuist uitvoeren van de test of het onjuist interpreteren van het testresultaat.

	Lees instructies voor gebruik
	Bewaren tussen 2 ~ 30 °C
	Droog bewaren
	Batch nummer
	Fabrikant

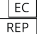	In-vitro diagnosticum
	Voor eenmalig gebruik
	Niet blootstellen aan hitte
	Houdbaarheidsdatum
	Europese vertegenwoordiger



Mat Care  
De Populieren 5  
9781MH Bedum, Nederland  
info@matcare.nl  
050-2340443

Revisiedatum 5 april 2022



Hangzhou Biotest Biotech Co., Ltd.  
17# Futai Road, Zhongtai Street, Yuhang District  
311121 Hangzhou, P.R. China



Shanghai International Holding Corp. GmbH  
Eiffestrasse 80, D-20537, Hamburg, Germany

CE 0123