

FR La technologie hydrocolloïde COMPEED® est un gel constitué de particules absorbant l'humidité. Le pansement COMPEED® agit comme une seconde peau pour préserver l'hydratation naturelle de votre peau et pour :

- Soulager instantanément la douleur.
- Protéger contre les frottements par un effet coussinet.
- Aider la peau à cicatriser plus vite.

Reste en place plusieurs jours. La durée peut varier en fonction des individus.

NL COMPEED® hydrocolloïde technologie is een actieve gel met vochtabsorberende deeltjes. De COMPEED® pleister werkt als een tweede huid om de natuurlijke vochtbalans te ondersteunen, het:

- Verzacht onmiddellijk blarenpijn.
- Beschermt en vormt een kussentje tegen wrijving.
- Biedt snel wondherstel.

Blijft meerdere dagen zitten. De individuele ervaring kan variëren.



COMPEED® - Rien ne vous arrête !
COMPEED® - Niets houdt je nog tegen!

2x
4,2 x 6,8 cm

2x
2,0 x 6,0 cm

1x
1,7 x 5,1 cm

ASSORTIMENT
PANSEMENTS AMPOULES | BLAREN PLEISTERS



Appliquez le pansement sur une peau propre et sèche. Evitez de toucher la partie adhésive du pansement. Laissez-le en place jusqu'à ce qu'il se décolle de lui-même. Peut rester en place plusieurs jours. Diabétiques : consultez un médecin avant utilisation. Lire les instructions et précautions à l'intérieur.

Maak voor gebruik de huid schoon en droog. Raak de kleefzijde niet aan. Laat de pleister zitten totdat hij vanzelf begint los te laten. De pleister mag meerdere dagen blijven zitten. Diabetici: raadpleeg vóór gebruik uw arts. Zie volledige gebruiksaanwijzing en waarschuwingen op de kaart aan de binnenzijde.

Bei Diabetes vor der Benutzung mit dem Arzt Rücksprache halten. Ausführliche Anwendungshinweise & Warnungen in der Innenkarte.



0459 LOT:



Laboratoire HRA Pharma
200 avenue de Paris
92320 Châtillon - France

Made in EU

55710159

www.compeed.com

55709775

Rev. Date:
04/2018