



Importeur:
Koninklijke
Utermöhlen NV
De Overweg 1
8471 ZA Wolvlega,
Nederland
www.heltiq.nl

Suzhou
Emy Medical Co., Ltd.
Changbang Road
Renyang Town
Changshu City
Jiangsu Province
China

CE REP. SUINGO
Europe B.V.
Olympisch Stadion 24
1076 DE Amsterdam
The Netherlands

REF 1111010
554053
V4.20210621



STERILE R

HeltiQ

jouw eerste hulp

Niet Verklevend Wondkompres

HeltiQ Niet Verklevend Wondkompres is een hoog absorberend wondkompres dat dankzij zijn gladde uitvoering niet verkleeft met de wond. Het wondkompres absorbeert het wondvocht tot in de kern en zorgt voor voldoende wondventilatie. Vanwege de sterk absorberende eigenschap is het van belang het wondkompres regelmatig te vervangen. Dit product is een medisch hulpmiddel.

- Verkleeft niet aan de wond
- Hoog absorberend
- Per stuk steriel verpakt

Bewaaraadvies

Koel en droog bewaren.

Let op!

- Vervang het wondkompres regelmatig
- Het wondkompres is voor éénmalig gebruik
- De steriliteit van het wondkompres is gewaarborgd, tenzij de houdbaarheid is verstreken, de verpakking geopend of beschadigd is

Hoe te gebruiken bij:

SNIJWOND

1 REINIGEN

Spoel de snijwond schoon met HeltiQ Oog & Wond Spray. Dep droog met een steriel gaaskompres. Of maak de huid rondom de snijwond schoon met een HeltiQ Wondreinigingsdoekje.


2 AFDEKKEN

Staan de wondranden uit elkaar? Breng ze dan samen door de HeltiQ Wondhechtstrips te gebruiken. Dek het af met het niet verklevend wondkompres.

3 FIXEREN

Verbindt het met een HeltiQ Elastisch Fixatiewindsel. Zet vast met een HeltiQ Hechtpleister. Of gebruik een HeltiQ Zelfhechtend Fixatiewindsel. Gebruik bij een snijwond aan de vinger een HeltiQ Vingerbob.

LOT AM251121

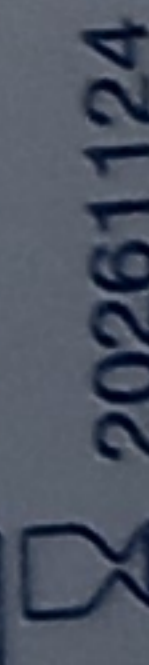

20261124



20211125

SCHAAFWOND

1 REINIGEN

Spoel de schaafwond schoon met HeltiQ Oog & Wond Spray. Dep droog met een steriel gaaskompres. Reinig de huid rondom de schaafwond met een HeltiQ Wondreinigingsdoekje. Dep droog met een steriel gaaskompres.

2 AFDEKKEN

Dek de schaafwond af met het niet verklevend wondkompres.

3 FIXEREN

Verbindt het met een HeltiQ Elastisch Fixatiewindsel. Zet vast met een HeltiQ Hechtpleister. Of gebruik een HeltiQ Zelfhechtend Fixatiewindsel. Of een HeltiQ Wondsnelverband.

BRANDWOND

1 KOELEN

Koel een 1e of 2e graads brandwond met HeltiQ Brandwondengel of een HeltiQ Brandwondenkompres. Koel een 3e graads brandwond alleen met een HeltiQ Brandwondenkompres. Let op! Raadpleeg altijd een huisarts bij grote en diepe 2e of 3e graads brandwonden.

2 AFDEKKEN

Dek een 2e graads brandwond af met het niet verklevend wondkompres.

3 FIXEREN

Verbindt het lichtjes met een HeltiQ Elastisch Fixatiewindsel. Zet vast met een HeltiQ Hechtpleister. Verbindt het niet te strak in verband met eventuele blaren die intact moeten blijven.

EN
Non adherent
wound compress
To cover cuts, abrasions
and burns

FR
Pansement non
adhérent
Pour recouvrir la coupe
et abrasions ou brûlures

DE
Nicht haftende
Wundkompresse
Zum Abdecken von
Schnitten und
Abrieb oder
Verbrennungen



Scan de code voor
meer informatie over
het gebruik van dit
product.



8