



**NL** Oplossing zonder bewaarmiddel voor het bevochtigen en smeren van ogen en contactlenzen.  
**ABAK®-flacon.**

**SAMENSTELLING:**

Natriumhyaluronaat.....	0,15 g.
Natriumchloride, trometamol, zoutzuur, Water voor injecties.....	q.s.p. 100 mL.

**NAAM EN ADRES VAN DE FABRIKANT:**

Laboratoires Théa, 12 rue Louis Blériot, 63017 CLERMONT-FERRAND CEDEX 2 - France.

**TOEPASSINGEN:**

HYABAK bevat een oplossing die op de ogen of contactlenzen dient te worden aangebracht. Het product wordt aanbevolen voor:

- het bevochtigen en smeren van droge of vermoeide ogen als gevolg van externe factoren zoals wind, rook, luchtvervuiling, stof, droge warmte, airconditioning, vlieggreizen of lang achter een computerscherm werken;
- het smeren en bevochtigen van contactlenzen, zodat deze gemakkelijker kunnen worden ingezet en men onmiddellijk draagcomfort ondervindt.

Dankzij het ABAK®-doseersysteem, levert HYABAK druppels zonder bewaarmiddel. De vloeistof kan voor elk type contactlens worden gebruikt. Doordat de vloeistof geen bewaarmiddel bevat, is deze niet schadelijk voor de oogweefsels.

**SPECIALE WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN:**

- Zorg dat u met de dop van de flacon het oog niet aanraakt.
- Niet inspuiten of inslikken.

In geval van beschadiging van de veiligheidsring mag u het product niet gebruiken.

**BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN.**

**WISSELWERKING:**

Het volstaat 10 minuten te wachten tussen de toediening van twee oogproducten.

**HOE HYABAK GEBRUIKEN:**

**DOSERING:**

1 druppel in elk oog gedurende de dag, zo vaak als nodig is. Voor contactlensdragers: 1 druppel op elke lens bij het inzetten en uitnemen, zo vaak als nodig is.

**MANIER EN PLAATS VAN TOEDIENINGSWIJZE:**

**IN DE OGEN DRUPPELEN.**

**STERILE[A]** Voor een goed gebruik van het product moet u de volgende voorzorgsmaatregelen nemen:

- was zorgvuldig uw handen alvorens de vloeistof aan te brengen,
- zorg dat de dop van de flacon niet in contact komt met het oog of de oogleden. Laat 1 druppel van het product in de onderste bindvlieszak vallen terwijl u het onderste ooglid lichtjes omlaag trekt en omhoog kijkt. De duur dat er met HYABAK één druppel verschijnt is langer dan die in vergelijking met een gewone flacon. Hersluit de flacon na gebruik. Voor het inzetten van contactlenzen: laat een druppel HYABAK in de holle kant van de lens vallen.

**HOE VAAK EN WANNEER TOEDIENEN:**

De instillaties over de dag verdelen, naar gelang de behoeften.

**ONGEWENSTE EN HINDERLIJKE EFFECTEN (BIJWERKINGEN):**

Zeldzame mogelijkheid van lichte oogirritaties.

**BEWARING VAN DE VLOEISTOF:**

BEWAAR HET PRODUCT NIET LANGER DAN DE UITERSTE GEBRUIKSDATUM, DIE OP DE VERPAKKING STAAT VERMELD.

**SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET BEWAREN:**

Bewaar de vloeistof bij een temperatuur onder de 25°C. Bewaar een geopende flacon niet langer dan **8 weken**.

**DATUM WAAROP DEZE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN:** 04/2009.