



Glory of White

Handleiding

Tandenbleek strips



Glory of White

Gefeliciteerd!

Met de aankoop van uw **Glory of White tandenbleek strips!**
In deze handleiding vind je waardevolle tips en informatie die jou helpen
het meeste uit de tandenbleek strips te halen.

Merkvisie

Glory of White combineert wetenschap en technologie in slimme
whitening oplossingen. Onze missie? Ervoor zorgen dat iedereen
tevreden is over zijn of haar gebit en waarmee iedereen kan genieten
van mooie witte tanden.

Inhoud van de verpakking

- 14x Tandensbleek strips
- 1x Gebruiksaanwijzing
- 1x Tintengids

Gebruiksaanwijzing



Stappenplan

Stap 1

Vorbereiding

- Was je handen zorgvuldig en zorg ervoor dat je handen goed gedroogd worden.
- Spoel grondig uw mond met lauw water.
- Maak uw tanden droog met een stuk keukenpapier of een theedoek.

Tip! Gebruik de strips binnen 2 weken voor het beste resultaat.



Let op! Gebruik de strips niet direct na het poetsen. Dit kan ervoor zorgen dat het tandvlees gaat irriteren.

Stap 2

Aanbrengen

- Bepaal aan de hand van de tintengids welke kleurtint je tanden nu hebben, en bepaal je doel welke je wil bereiken.
- Haal de strips voorzichtig uit de verpakking.
- Breng de plakzijde van de strips aan op de tanden en druk de strips één voor één goed aan. Met je nagels druk je de strips goed tussen de spleetjes van de tanden. Afhankelijk van de grootte van het gebit vouw je het uitstekende deel om, achter de tanden en druk deze ook goed aan.

Stap 3

Verwijderen

- Laat de strips gedurende 30 minuten op je tanden zitten. Het speeksel kan je gewoon doorslikken.
- Nadat de 30 minuten verstreken zijn kan je de tandenbleek strips verwijderen (er kunnen restanten blijven zitten op je tanden).
- Poets de restanten met een tandenborstel zonder tandpasta van je tanden af.

Tip! Maak tussen de kuur duur foto's van je gebit, zo kan je beter het verschil zien.



Let op! Wij raden aan om de tandenbleek strips in de avond te gebruiken nadat je hebt gegeten. De reden hiervoor is dat je dan minder kleurstoffen binnen krijgt. Kleurstoffen hebben effect op je tanden. Om optimaal resultaat te behalen met de tandenbleek strips is het dus verstandig om het pas te gebruiken op het moment dat je geen kleurstoffen meer binnen krijgt.

Waarschuwing

- Gebruik de tandenbleek strips niet wanneer u last heeft van: mondzweren, tandinfecties, beschadigd tandvlees of na een mond/gebit operatie.
- Wanneer u gevoelige tanden heeft zal de tijdsduur van het gebruik van de tandenbleek strips moeten verkorten of gebruiken onder begeleiding van tandarts/mondhygiënist.
- In het geval dat de tandenbleek strips in contact is geweest met je ogen, is het aangeraden om dit uit te spelen met voldoende water.
- dit product wordt afgeraden voor zwangere vrouwen en kinderen met een leeftijd t/m 12 jaar.
- Bijwerkingen van dit product zijn zeldzaam. Stop met het gebruik wanneer dit wel het geval is en neem direct contact op met uw huisarts.
- Wanneer de tandenbleek strips te lang op uw tanden zitten kan dit ervoor zorgen dat je tanden gevoelig worden, ga hier dus zorgvuldig mee om.

Gebruik

- Zeer gebruiksvriendelijk en veilig.
- Zelf bepalen wanneer u het gebruikt.
- Gedoseerd bleken met minimale gevoeligheid.
- Lage kosten in vergelijking met een bleekbehandeling in de kliniek.
- Verbeterd bij regelmatig gebruik de mondhygiëne en een frisse adem.

Houdbaarheid

bewaar de strips op een koele en droge plaats, niet langer dan 24 maanden.

Optimaal resultaat

Om uw tanden zo wit mogelijk te houden probeer de volgende producten te verminderen/vermijden: roken, koffie, thee, cola en rode wijn.

Vragen of hulp nodig?

Wij zijn 24/7 bereikbaar via de mail op: ecommerce.jands@gmail.com

Of van maandag t/m vrijdag op whatsapp of via de telefoon op:

+31 6 20005163