

# GEBRUIKSAANWIJZING ZWANGERSCHAPSTEST MIDSTREAM (10mIU/ml)



## Zelftest en alleen voor in-vitro-diagnostisch gebruik

De zwangerschapstest van Telano is eenvoudig thuis uit te voeren. De test detecteert het humaan choriongonadotrofine (hCG) in je urine. Je lichaam begint met het produceren van het hCG-hormoon zodra je zwanger bent. Bij een vroege zwangerschap neemt het zwangerschapshormoon in de eerste dagen snel toe. Het hormoon verdubbelt zich elke 2 à 3 dagen en bereikt zijn piek tussen de 7 à 12 weken zwangerschap (100.000 mIU/ml tot 288.000mIU/ml). De Telano-zwangerschapstest is erg gevoelig waardoor u al 6 dagen voor de verwachte menstruatie voor het eerst kan testen. De Telano zwangerschapstest geeft een positief resultaat bij een hCG-gehalte vanaf 10mIU/ml. Wanneer u test op de dag van de uitgebleven menstruatie, dan kunt u op elk gewenst moment van de dag de test uitvoeren. Test u eerder, dan raden wij aan om ochtendurine te gebruiken omdat de concentratie hCG dan hoger is. Vermijd het te veel drinken, voordat u start met testen.

De resultaten van deze test zijn zeer betrouwbaar (>99%) en gemakkelijk af te lezen van het controlevenster. Lees voor gebruik aandachtig deze handleiding door.

## Testprocedure

1. Haal de test uit de verpakking.
2. Verwijder de plastic dop van de midstreamzwangerschapstest zodat de absorberende strip zichtbaar wordt.
3. Houd de midstream zwangerschapstest vast bij de duimgreep. Urineer tenminste 10 seconden over de absorberende strip met de punt naar beneden.  
**Let op:** urineer niet over het weergavescherm. Eventueel kunt u ook, wanneer u dat prettiger vindt, wat urine opvangen in een schoon bakje. Hier kunt u de absorberende strip voor 10 seconden inhouden zodat de strip voldoende urine bevat.
4. Plaats de dop meteen over de absorberende strip, zodra u klaar bent met het opvangen van de urine.
5. Leg de test op een vlakke ondergrond met het testvenster naar boven.
6. U ziet nu dat er in het testvenster 1 of 2 lijnen tevoorschijn komen. Lees binnen 5 minuten het testresultaat af. Let op: wacht niet langer met beoordelen van de testresultaten dan 5 minuten. Deze uitslag kan namelijk ongeldig zijn.



## Resultaat

**Positief (zwanger):** Er verschijnt één roze lijn in het testvenster (T) en één in het controlevenster (C).

**Let op:** De kleurintensiteit van de (C) en (T) lijn kan variëren. Ook een licht gekleurde (T) lijn is positief. De kleurintensiteit van de (T) lijn kan variëren omdat de concentratie van het hCG-hormoon in verschillende stadia van de zwangerschap anders is.

**Negatief (niet zwanger):** Er verschijnt één roze lijn in het controlevenster (C). Er verschijnt geen lijn in het testvenster.

**Ongeldig:** Er verschijnt geen lijn in het controle(C)venster. Herhaal de test met een nieuwe test. Het kan zijn dat er niet genoeg urine is geabsorbeerd. Blijft het probleem aanhouden, neem dan contact op met Telano.

## Verpakkingsinhoud

1. Telano-midstreamzwangerschapstest
2. Droogmiddel
3. Bijsluiters

## Benodigdheden

1. Klok of timer
2. Schoon bakje (wanneer u de urine eerst wilt opvangen)

## Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

1. Lees deze bijsluiters goed door voordat u begint met testen.
2. Alleen voor in-vitro diagnostisch gebruik
3. Alleen voor extern gebruik, niet doorslikken

4. Gebruik deze test niet na de houdbaarheidsdatum.
5. Open het foliezakje pas wanneer u klaar bent om te testen. Gebruik de test niet wanneer u ziet dat het foliezakje is beschadigd of al open is.
6. Deze test is niet geschikt voor hergebruik. Na gebruik kan de test bij het afval.
7. Raak de absorberende strip van de test niet aan. Houd de test vast bij de duimgreep.
8. Houd deze test buiten het bereik van kinderen.

## Bewaren

De Telano-zwangerschapstest moet worden bewaard in het ongeopende foliezakje bij een kamertemperatuur tussen de 4 en 30°C en uit de buurt van hitte of vocht. Vries de test niet in.


## Beperkingen


1. Vermijd veel drinken voordat u de test uitvoert.
2. Met deze zwangerschapstest kunt u 6 dagen voor de verwachte menstruatie voor het eerst beginnen met testen. Echter bij een zeer vroege zwangerschap is het Hcg-hormoon in een zeer lage concentratie aanwezig in de urine. Hierdoor kan het resultaat negatief zijn. Wanneer u vermoedt toch zwanger te zijn, herhaal dan de test na 2-3 dagen.
3. Heeft u negatief resultaat, maar vermoedt u toch zwanger te zijn, neem dan contact op met een arts.
4. Vruchtbaarheidsmedicijnen met hCG kunnen misleidende resultaten geven.
5. Na een bevalling, buitenbaarmoederlijke zwangerschap of miskraam kan het ongeveer 8 weken duren voordat het HCG-hormoon volledig uit je lichaam is verdwenen. Hierdoor kunt u positief testen, terwijl u niet zwanger bent. Raadpleeg in dit geval een arts voor het interpreteren van het testresultaat.
6. Alcohol kan een versturende werking hebben op het resultaat van de test. Vermijd daarom het drinken van alcohol voordat u de test uitvoert.
7. Een buitenbaarmoederlijke zwangerschap geeft net als een gewone zwangerschap een positief resultaat.
8. Een vroege miskraam of missed abortion kan leiden tot een licht positief resultaat en later een negatief resultaat.
9. De zwangerschapstest kan een negatief resultaat geven bij een zeer hoge concentratie Hcg (>500.000 mIU/ml). Dit heet het 'prozone effect'. De gemiddelde waarden hCG tijdens een zwangerschap zijn 5 mIU/ml tot 288.000 mIU/ml van week 3 t/m 12. Daarna nemen de Hcg waarden weer af tot ongeveer 117.000 mIU/ml in week 40. Het prozone effect is daarom erg zeldzaam. Wanneer u toch het prozone effect vermoedt, kunt u de test nomaals uitvoeren. U dient de urine op te vangen in een beker en die te verdunnen met evenveel water als er urine in de beker zit. Er zou nu weer een lijn tevoorschijn moeten komen wanneer het het prozone effect betreft.

## Prestatiekenmerken

10mIU/ml = extra vroege zwangerschapstest

## Betekenis symbolen

			
Houdbaar tot	LOT nummer	Deze verpakking bevat een test	Alleen voor in-vitro gebruik
			
Niet opnieuw gebruiken	Bewaren tussen 2°C en 30°C	Buiten bereik van kinderen bewaren	Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing

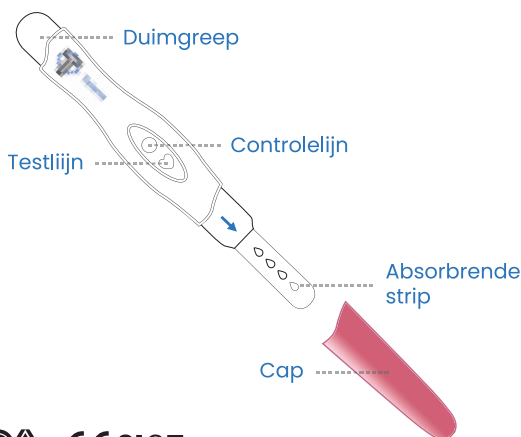

FDA CE 0197



Fabriek: W.H.P.M. Bioresearch & Technology Co., Ltd.  
No. 2 Zhongxin Street, Louzizhuang, Jinzhan Xiang,  
Chaoyang District, Beijing, 10018 P.R. China

EC REP

Medical Device Safety Service GmbH  
Schiffgraben 41, 30175 Hanover, Germany



Telano