



# Glucodr<sup>TM</sup>. auto

Blood Glucose Monitoring System

## AGM-4000

For Blood Glucose Self Test


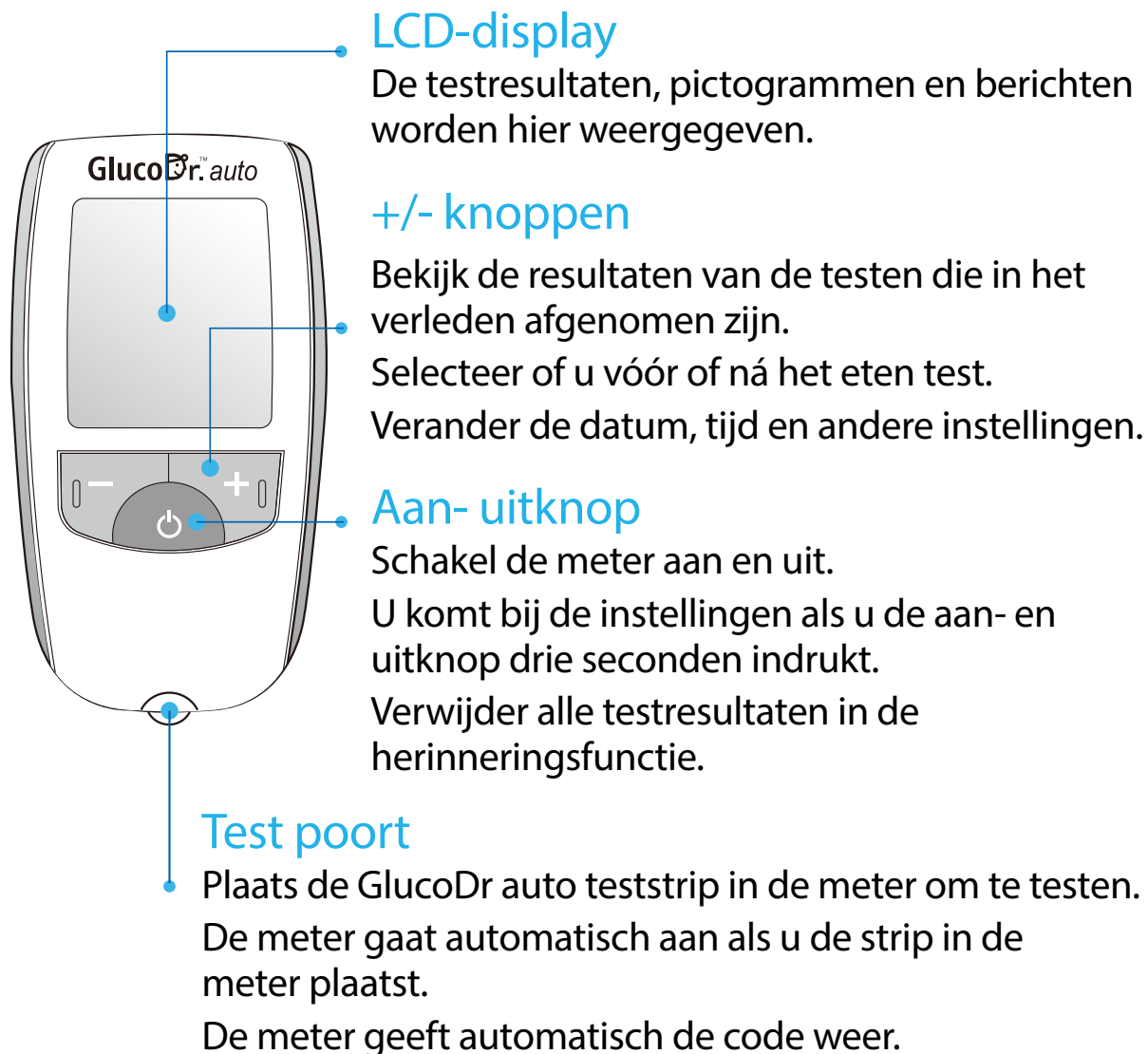


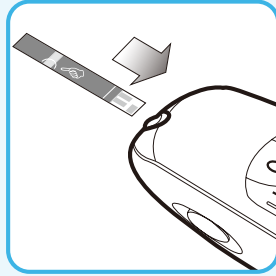

1

## Plaats de GlucoDr auto teststrip



Plaats de teststrip in de meter, de meter gaat dan automatisch aan. Wanneer de meter aan is zullen de pictogrammen van de teststrip, bloedhoeveelheid en de code in beeld verschijnen.

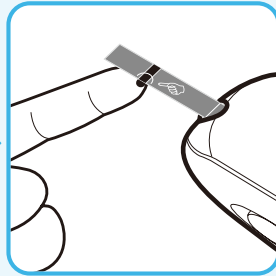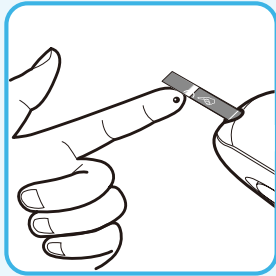

2

## Het bloed testen

De druppel bloed dient u tegen de gele zijkant van de teststrip te houden. Het bloed zal dan opgezogen worden door de teststrip, de meter geeft aan of er al voldoende bloed is opgenomen door de teststrip. Wanneer de meter niet op tijd voldoende bloed heeft opgenomen zal de meter gaan piepen. Voordat de piep afgaat zal de meter eerst aftellen.

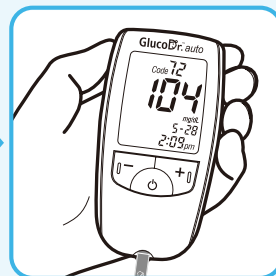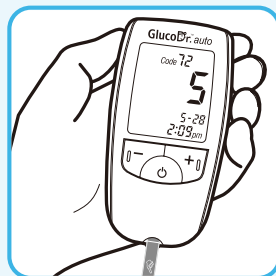

3

## Resultaat

Nadat de meter afgeteld heeft van 5 tot 1 zal het testresultaat in beeld komen. Als u de reststrip verwijderd zal alleen het testresultaat automatisch opgeslagen worden in het geheugen van de meter. Om het tijdstip van testen (voor of na het eten) ook op te slaan moet u zowel de + als de - button ingedrukt houden vóór het verwijderen van de teststrip.