



Importeur:  
Koninklijke Utermöhlen NV  
De Overweg 1, 8471 ZA  
Wolvega, Nederland  
www.heltiq.nl

Changzhou Hualian  
Health Dressing Co., Ltd.  
No. 55 Yuejin Road,  
Zouqu Town 213144  
Changzhou  
PEOPLE'S REPUBLIC  
OF CHINA

**EC REP** Shanghai  
International Holding  
Corp. GmbH (Europe)  
Eiffestraße 80, 20537  
Hamburg, Germany

REF 1200218 - 554017  
V10.20200716



**CE**  
0123

**MD** Medical  
Device



**STERILE** **EO**

**HeltiQ**

jouw eerste hulp

**Eilandpleister  
Small**

HeltiQ Eilandpleister Small biedt een comfortabele verzorging van wonden na een operatieve ingreep. Daarnaast is de eilandpleister ook geschikt om te gebruiken voor kleine schaaf- en snijwonden. Dit product is een medisch hulpmiddel.

- Elastische kleefrand
- Hecht niet aan de wond
- Per stuk steriel verpakt

Hoe te gebruiken bij:

### Snijwond

#### 1 REINIGEN

Maak de wondranden rondom de snijwond schoon met een wondreinigingsdoekje. Dep droog met een steriel gaaskompres.

#### 2 AFDEKKEN

Dek de snijwond af met de eilandpleister.

### Schaafwond

#### 1 REINIGEN

Maak de huid rondom de schaafwond schoon met een wondreinigingsdoekje. Dep droog met een steriel gaaskompres.

#### 2 AFDEKKEN

Dek de schaafwond af met de eilandpleister.

### Operatiewond

#### 1 REINIGEN

Maak de huid rondom de operatiewond schoon met een wondreinigingsdoekje. Dep droog met een steriel gaaskompres.

#### 2 AFDEKKEN

Dek de operatiewond af met de eilandpleister.

**Let op!**

Vervang de eilandpleister regelmatig.

#### Gebruiksaanwijzing

1. Verwijder de papieren bescherm laag waardoor de kleef laag vrijkomt.
2. Houd de eilandpleister boven de wond en breng het folie aan.
3. Druk de kleef laag stevig aan om het goed aan de huid te laten hechten.

**LOT** HL2108321

2026 12 14

2021 12 15

**EN**

**Absorbent adhesive  
dressing small**

For small cuts and  
grazes or operative  
wounds

**FR**

**Pansement  
couvrant  
adhésif small**

Pour protéger les petites  
blessures telles que  
coupures, éraflures ou  
opératives.

**DE**

**Wundverband klein**

Für kleine Schnitte und  
Schürfwunden oder  
Operationswunden

**Bewaaradvies**

Koel en droog bewaren.  
Houd de eilandpleisters  
uit de zon



Scan de code voor  
meer informatie over  
het gebruik van dit  
product.

