

Wat is Formule W Wrattenpen en hoe werkt het?

Formule W Wrattenpen mag alleen op gewone wratten op handen en voeten gebruikt worden.

Een gewone wrat is een harde, eeltachtige vergroeiing van de opperhuid in de vorm van een (klein) bloemkoolvormig knobbelte. Meestal treft u ze aan op handen en voeten. Voetwratten treft u enkel aan op de voetzool. Als u er niet 100% zeker van bent dat het om een gewone wrat gaat, raadpleeg dan uw arts alvorens u Formule W Wrattenpen gebruikt.

Formule W Wrattenpen is een medisch hulpmiddel voor de behandeling en het verwijderen van wratten door middel van een penapplicator met een gepatenteerde gel. Deze gel (met Trichloorazijnzuur) stimuleert de celvernieuwing, waardoor de huid vervelt. Op die manier zal nieuwe, gezonde huid gevormd worden en zal de wrat krimpen en verdwijnen.

Formule W Wrattenpen mag niet gebruikt worden op:

- plekken met dunne of gevoelige huid zoals gezicht, hals, oksels, borsten, billen of geslachtsdelen;
- geïrriteerde huid of op wratten (plaatsen) die geïnfecteerd zijn, roodheid of symptomen van ontsteking zoals jeuk of zwelling vertonen;
- donker gekleurde, behaarde of op andere wijze vreemd uitzijende wratten;
- moedervlekken;
- wijnvlekken;
- zwarte huidvlekken, pigmentvlekken;
- elk lichaamsdeel met haarfollikels of in geval van andere ongewone huidcondities;
- steelwratten/draadwratten;
- waterwratjes, bolhoedwratjes of luchtpukkels;
- ouderdomswratten;
- genitale of venerische wratten/ venuswratten;
- kinderen jonger dan vier jaar.

LET OP: kijk op de website voor meer informatie www.formulew.nl

Formule W Wrattenpen is uitsluitend voor uitwendig gebruik. Personen met een gebleken overgevoeligheid voor Trichloorazijnzuur mogen Formule W Wrattenpen niet gebruiken.

Wanneer moet u uw arts of apotheek raadplegen?

- Bij wratten die spontaan gaan bloeden of plotseling van kleur of grootte veranderen.
- Bij wratten op of rond de geslachtsorganen.
- Bij wratten in het gezicht.
- Als de wrat binnen 14 dagen niet verbetert.
- Wanneer u zwanger bent of borstvoeding geeft.
- Wanneer u diabetes heeft.
- In geval er bijwerkingen optreden welke u als ernstig ervaart.

Waar moet u verder speciaal op letten bij het gebruik van Formule W Wrattenpen?

- Gebruik een kleine hoeveelheid gel (1 druppel). Te grote hoeveelheden van de gel kunnen irritaties veroorzaken.
- De beschreven rustdagen in het behandelingschema zijn essentieel voor het doorwerken van de werkzame stof en het herstel van de huid.
- Sluit de Formule W Wrattenpen goed af met het dopje om uitdroging te voorkomen.
- **LET OP:** Formule W Wrattenpen is pijnloos in gebruik, waardoor u de werking niet zult voelen. Breng de gel met behulp van de pen nauwkeurig op de wrat aan om onnodige beschadiging van andere huiddelen te voorkomen.
TIP: Om te voorkomen dat de inhoud van de Wrattenpen in direct contact komt met uw huid, hetgeen tot pijnlijke plekken op de huid kan leiden, adviseren wij u rondom de (bloemkool) wrat een laag vaseline aan te brengen. De laag dient zodanig dik te zijn, dat hij dezelfde hoogte heeft als de wrat, tot ± 2 cm in de omtrek van de wrat.
- Vermijd te allen tijde contact met de ogen of slijmvliezen.

• Gebruik de Formule W Wrattenpen niet op likdoorns. Voor likdoorns zijn gespecialiseerde producten ontwikkeld door Formule W met een aangepast concentraat. Zie voor meer informatie www.formulew.nl

• Ter voorkoming van overdracht van wratten, adviseren wij de Wrattenpen te laten gebruiken door één persoon.

• Bij behandeling van meerdere wratten tegelijkertijd adviseren wij de pen na beëindiging van de behandeling weg te gooien.

Welke bijwerking heeft Formule W Wrattenpen?

Met de pen kunt u Formule W nauwkeurig aanbrengen waardoor de kans dat de gel op de gave huid terecht komt verwaarloosbaar is. Mocht Formule W Wrattenpen toch met de gave huid in aanraking komen, dan dient u de gel direct af te vegen en de plek met water en zeep af te wassen. Bij contact met de gave huid wordt deze huid aangetast. Dit kunt u vermijden door vooraf vaseline aan te brengen op de huid rondom de wrat(ten). In geval er bijwerkingen optreden die u als ernstig ervaart of die niet in de gebruiksaanwijzing worden genoemd, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Waar moet u op letten als u geneesmiddelen gebruikt?

Voor zover bekend zijn er geen bijwerkingen met geneesmiddelen.

Hoe lang en op welke wijze kunt u Formule W Wrattenpen bewaren?

Formule W Wrattenpen bewaart u op kamertemperatuur (15-25°C). Sluit de pen na gebruik goed af om uitdroging te voorkomen. De uiterste gebruiksdatum staat aangegeven op de verpakking en op de Wrattenpen. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Gebruiksaanwijzing**Bij het eerste gebruik:**

draai de onderzijde van de applicator totdat de gel zichtbaar is.

Bij de volgende behandelingen:

voorzichtig draaien totdat een kleine hoeveelheid van de gel zichtbaar is.

Behandelschema

1. Gebruik de Formule W Wrattenpen 2 keer per dag gedurende 4 dagen. Indien het om een hele kleine wrat gaat, gebruik dan de pen 1 keer per dag. Breng de gel zorgvuldig aan op de wrat(ten) zonder de omliggende huid te beschadigen en laat deze inwerken. Een kleine hoeveelheid gel is afdoende, 1 druppel werkt snel en effectief.
TIP: Breng vooraf vaseline aan op de omliggende huid om beschadiging te voorkomen.
2. Staak de behandeling vervolgens gedurende 4 dagen. Gedurende deze rustdagen zal de huid vervellen, de huidlaagjes van de wrat laten los, en huidherstel wordt gestimuleerd. Een eenmalige behandeling werkt effectief voor kleine wratjes of voor wratjes die niet zijn ontstaan.
3. Indien de wrat na de eerste behandelingsperiode van 4 dagen nog niet (geheel) verdwenen is, herhaal dan de behandeling zoals genoemd in punt 1 en 2 van het behandelingschema. De rustdagen zijn essentieel voor het doorwerken van de werkzame stof en het herstel van de huid.
4. Het behandelingschema kan in totaal 4 keer toegepast worden met de Formule W Wrattenpen. Als na 4 behandelingen de wrat nog niet verdwenen is, vraag dan uw (huis)arts om advies.

Deze gebruiksaanwijzing is voor het laatst herzien in april 2012.

Voor meer informatie over wratten ga naar www.formulew.nl

Fabrikant:
Medical Brands
Veembroederhof 96
1019 HC Amsterdam

Distributeur:
Remark Pharma
Industrieweg 24
7949 AK Meppel

