

## **Nederlands**

**Hartelijk dank dat u voor TORBOT Skin Tac™ zelfklevende doekjes hebt gekozen!**

De Skin Tac™ zelfklevende doekjes versterken en hernieuwen de kleefkracht van alle pleisters en barrières. Deze unieke formule is anti-allergisch en bevat geen latex! De handige, gemakkelijk te gebruiken doekjes zijn ideaal voor op reis en vormen een uitstekende barrière tussen uw huid en de pleister.

### **Gedetailleerde lijst met mogelijke toepassingen:**

*Infuussets voor insulinepompjes*

*Tracheotomiehulpmiddelen*

*Stomahulpmiddelen*

*Prothesen*

*Steunkousen*

*Alle pleisters en verbanden*

*Elektroden*

*Geneeskundige pleisters*

**Gebruiksaanwijzing:** Breng Skin Tac™ zelfklevende doekjes aan op een schone, droge huid. Aan de lucht laten drogen. De huid wordt kleverig. Hulpmiddel en/of pleister aanbrengen. Verwijderen met TacAway™ hechtmiddelremoverdoekjes of ontsmettingsalcohol. Bij irritatie gebruik onmiddellijk stopzetten.

### **UITSLUITEND VOOR UITWENDIG GEBRUIK**

*Fabrikant: Torbot Group, Inc., 1367 Elmwood Ave.,*

*Cranston, RI 02910, USA*

*EU: MG Healthcare, Unit 24, Grimsby Business Centre,*

*King Edward St., Grimsby, DN313 JH United Kingdom*