

Kalknagel Laserapparaat van JT Beauty Care

Instructies

Schimmelnagel, kalknagel of zoals bedoeld in de biologische term Onchyomycose, is een schimmelinfectie van de nagels. Tot 20% van de gehele bevolking lijdt aan schimmelinfecties. Schimmelinfecties zijn gebonden aan de tenen of de vingers. Schimmelinfecties van de tenen komen vaker voor en vormen een ernstig esthetisch probleem. Het aantal teennagelschimmelinfecties ligt momenteel tussen de 6 en 8% onder de volwassen bevolking.

Hier hebben we een goede oplossing voor: een laag niveau lasertherapieapparaat voor kalknagels, dat puls laserstraling en blauwlichtenergie combineert, wat resulteert in een synergetisch therapeutisch effect.

Het Kalknagel Laserapparaat zal schimmelinfecties (Onychomycose) behandelen zonder gebruik van enige vorm van medicijnen of zalven. Laserstraling zal de geïnfecteerde nagelplaat binnendringen en zal zich richten op veroorzakende ziekteverwekkers die zich op het nagelbed bevinden. Als gevolg hiervan zal de infectie worden geëlimineerd.

*** Non-invasieve behandeling**

*** Geen bijwerkingen**

*** Pijnloos**

*** Eenvoudig in gebruik**

*** Veilig**

*** Compact om mee te nemen**

Gebruiksaanwijzing

- 1 Knip de nagel kort met het schaartje of de nagelkniptang
- 2 Druk alle huid naar achteren met de nagelriemduwer
- 3 Knip alle losse (huid) velletjes met de nagelriem kniptang
- 4 Verwijder alle viezigheid onder de nagel met de excaveerlepel
- 5 Vijl de nagel glad met de nagelvijl, met name waar er zich schimmel bevindt
- 6 Plaats het apparaat op de geïnfecteerde nagel en druk op de bedieningsknop
- 7 Het behandelingslampje begint te branden en het apparaat straalt zichtbaar blauw licht uit
- 8 Het apparaat werkt 7 minuten en schakelt automatisch uit

Opmerking: Het apparaat mag niet worden gebruikt tijdens het opladen. Laat het apparaat voor gebruik volledig opladen.

Behandelinstructies

- Behandeling van geïnfecteerde nagels moet dagelijks uitgevoerd worden.
- Elk geïnfecteerde nagel moet minstens één keer per dag behandeld worden.
- Per nagel mag er maximaal 3 behandelingen per dag uitgevoerd worden.

In het geval van meer dan één geïnfecteerde nagel, moeten alle geïnfecteerde nagels behandeld worden om verspreiding van schimmels te voorkomen.

Voorkomen dat een kalknagel terugkomt

Het is belangrijk om nieuwe infecties te voorkomen. Het dragen van te strakke of kleine schoenen kunnen ervoor zorgen dat er een nieuwe schimmelinfectie ontstaat. Daarnaast kunnen ontwikkelingen van blaren en wondjes aan de voeten en kloven op de hielen ook voor een nieuwe schimmelinfectie zorgen.

Veiligheid

Het apparaat moet worden gebruikt met strikte naleving van de veiligheids- en bedieningsvoorzorgsmaatregelen die in deze handleiding worden gegeven. Raadpleeg de handleiding voor het eerste gebruik. Het is belangrijk deze handleiding bij de hand te houden.

Geen bijwerkingen

Directe of gereflecteerde laserstraling moet worden voorkomen bij directe oogcontact. Zwangere vrouwen mogen het laserapparaat niet dichtbij de baarmoeder gebruiken. Houd het apparaat buiten bereik van kinderen. Kinderen onder de 18 jaar moeten worden behandeld onder toezicht van een volwassene.

Verzorging en reiniging

De buitenkant van het apparaat kan worden schoongemaakt met een vochtige doek. Eens in de paar behandelingen wordt aanbevolen om de rubberen bekleding aan de binnenkant van het apparaat te verwijderen en deze te reinigen met medische alcohol. Het apparaat mag niet door andere mensen worden aangeraakt zonder voorafgaande reiniging van de rubberen bekleding.

Opslagtemperatuur: -20°C tot 50 °C

Probleem oplossen

Fout	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Batterij licht brandt rood	De batterij is leeg	Laad het apparaat op. Het licht brandt groen. Het apparaat mag niet gebruikt worden tijdens het opladen.
Apparaat werkt niet	Technische fout	Contacteer verkoper

Veelgestelde vragen

Wat voel ik tijdens het gebruik van de Kalknagel Laserapparaat?

Mensen voelen meestal niets. In zeldzame gevallen zullen sommige mensen een licht verwarmend effect voelen. Ook al voel je misschien niets, tijdens de behandeling werkt de laserstraling in op de geïnfecteerde nagel.

Wanneer zal er verbetering zichtbaar zijn?

De duur van de behandeling kan per persoon verschillen, afhankelijk van de variabelen zoals leeftijd en ernst van de geïnfecteerde nagel. Geschatte behandelingsduur is 3-6 maanden.

Kan ik me aan het laserapparaat branden?

Helemaal niet. Er wordt gebruik gemaakt van klasse 1M laser.

Technische informatie

Laser golflengte: 905nm

Blauw licht golflengte: 470nm

Laser intensiteit: 25W

Maximum puls intensiteit: 22W

Klasse II apparatuur, toegepast onderdeel type B laser type 1M (IEC60825-1)

Adapter specificatie

Voltage: 5V

Rating: 5VDC

Max: 0.5A

Oplaadtijd: 3-4 uur

Input: 100-240V 50/60Hz 0.2A

Bedrijfsgegevens

Taat Shop, merk JT Beauty Care
3072AP ROTTERDAM NL