



Itemnummer 1000021319



## Broekjes, ABENA Pants, S2, gele kleurcode, Premium

- ✓ Superzacht voor optimaal comfort
- ✓ Stevige pasvorm door het grote aantal lycra-elastieken
- ✓ Hoogwaardige kern met Top-Drytechnologie
- ✓ Ondersteunt een gezonde huidbalans
- ✓ Volledige bescherming tegen lekkage



### Productomschrijving

ABENA Pants is ons premium assortiment wegwerpbroekjes die als normaal ondergoed kunnen worden gedragen. Geschikt voor matig tot zwaar urineverlies en verlies van (dunne) ontlasting. De producten zijn gemaakt van ademend en superzacht materiaal voor optimaal comfort. De tailleband met een groot aantal lycra-elastieken biedt een veilige en nauwsluitende pasvorm, waardoor het ideaal is voor een actieve levensstijl. De hoogwaardige kern met Top-Drytechnologie zorgt voor een gezonde huid en houdt de huid droog en fris, zelfs na herhaaldelijk urineren. De combinatie van anti-lekrandjes (over de lengte en dwarsranden) en elastieken zorgt voor volledige bescherming. Beschermt de huid en helpt de natuurlijke pH-balans van de huid te behouden. Het speciale geurfilter beperkt nare luchtjes tot een minimum. De urineverzadigingsindicator met blokverdeling (met uitzondering van maat XS1) helpt de gebruiker en verzorger het product met het juiste absorptieniveau te vinden.



### Specificaties

Basisnaam	Broekjes
Merk	ABENA
Submerk	Pants
Formaat	S2
Kleur	Wit
Functies	Gele kleurcode
Materiaal	BTBS, ECF fluff, elastaan, nonwoven, PE, PP, hars, SAP
Lengte/diepte	780 mm
Breedte	550 mm
Heupomvang	60-90 cm
Tolerantie	+/- 10%
Absorptie Rothwell	1900 ml
Geslacht	Unisex
Kwaliteitsniveau	Premium
Certificaten	CE, FSC Mix Pulp, MD, Nordic Swan-milieukeurmerk, UKCA
CE-klasse	Class I
Product- of testnormen	ISO 11948-1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Richtlijnen, voorschriften en wetten	MDR (EU) 2017/745
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen	Buiten bereik van kinderen houden.
Houdbaarheid	5 jaar.
Bewaarinstructies	Opslag: droog, kamertemperatuur en geen zonlicht.

**Instructies voor productverwijdering** Afvoeren met huishoudelijk afval.

**Instructies voor verwijdering van de verpakking** Kan worden gerecycled of verbrand.

## Gebruiksaanwijzing/toepassing

Wegwerpbroekjes voor lichte, matige en zware incontinentie die als normaal ondergoed gedragen kunnen worden. Met name gericht op zelfstandige en actieve gebruikers, maar ook geschikt voor mensen die leiden aan dementie, reuma of voor onrustige gebruikers. Trek het broekje aan als een normale onderbroek en raak de binnenkant niet aan. Na gebruik en bij het verwisselen kunt u de zijanten openscheuren. Als het broekje aan beide zijden opengescheurd is, kunt u het oprollen, dichtplakken met de plakstrip (met uitzondering van maat XS1) en weggooien. Productafmeting te herkennen aan kleurcodes, productnamen en maat-/absorptieaanduidingen.

## Verpakkingsgegevens

Einheid	Bevat	Lengte	Breedte	Hoogte	EAN
cil	96 st	67.6 cm	30.1 cm	35.2 cm	5713571000816
pak	16 st	23 cm	18 cm	21 cm	5713571000809
st	1 st				



Het Nordic Swan Ecolabel is een officieel Scandinavisch milieulabel. Producten met het Nordic Swan Ecolabel voldoen aan strenge milieueisen met betrekking tot grondstofproductie, gebruik, documentatie en veiligheid.



FSC™ (Forest Stewardship Council) is een internationale niet-gouvernementele organisatie die zich inzet voor de promotie van verantwoord bosbeheer wereldwijd. FSC™-gecertificeerde producten zijn gemaakt van grondstoffen afkomstig uit goed beheerde bossen en van verantwoorde bronnen. De traceerbaarheid en integriteit van het label worden gehandhaafd door strenge controlemaatregelen. Door te kiezen voor FSC™-gecertificeerde producten helpt u te zorgen voor bossen en de mensen en wilde dieren die er leven. Ga voor meer informatie naar [www.fsc.org](http://www.fsc.org).



Producten die zijn gelabeld met MD, worden geclassificeerd als medische hulpmiddelen.



De CE-markering garandeert dat een product veilig te gebruiken is en voldoet aan alle veiligheidsmaatregelen. CE staat voor Conformité Européenne (Europese conformiteit) en komt vooral voor op elektronische apparatuur, veiligheidsuitrusting, bouwproducten en medische apparaten.



De UKCA-markering garandeert dat een product veilig is te gebruiken en voldoet aan alle veiligheidsmaatregelen in overeenstemming met de productnormen en wetgeving van het VK.



Anti-lekrandjes in de beuuitsnijding en rond de absorberende kern helpen doorlekken te voorkomen en zorgen voor een optimale pasvorm.



Het product is volledig ademend voor het comfort van de gebruiker, ook bij langdurig gebruik. Voor een intacte en gezonde huid.



Uw garantie dat onze producten zijn getest op ingrediënten die mogelijk huidirritatie kunnen veroorzaken. Tests zijn uitgevoerd door een onafhankelijk extern laboratorium.



De unieke structuur van onze hoogwaardige kern is ontworpen voor de snelle verspreiding en inkapseling van urine, waardoor het oppervlak droog blijft, zelfs na herhaaldelijk plassen.



Het Odor Control-geurfilter is een cruciaal voor de discretie van de gebruiker. De incontinentieproducten van ABENA zijn ontworpen en ontwikkeld om ervoor te zorgen dat er een minimale geur vrijkomt uit het product.



Unieke Top-Dry-technologie die zorgt voor een snelle absorptie en een droog oppervlak, zelfs na herhaaldelijk plassen.



De urineverzadigingsindicator is een vloeistofgevoelige strip die van kleur verandert of vervaagt wanneer het tijd is om het product te verschonen.



Een combinatie van 100% ademend vermogen, Top-Dry en lekbescherming zorgt voor een droog oppervlak en een gezonde huid, zelfs na herhaaldelijk plassen, waardoor de natuurlijke pH-balans van de huid behouden blijft.



Het product bevat geen latex.



Druppelsysteem dat absorptie aangeeft. Hoe meer druppels, hoe hoger de absorptie. Loopt van 1 tot 9 druppels.

