

VINGER COHESIVE

NL Zelfhechtende vingerbandage voor het fixeren van verband.

FR Bande auto-adhésive pour fixer les compresses sur les doigts.

HECHT AAN ZICHZELF, NIET AAN HUID OF HAAR

ADHÈRE À ELLE-MÊME, PAS À LA PEAU NI AUX POILS

- Laat na verwijdering geen plakresten achter
- HACCP geschikt
- Met de hand afscheurbaar
- Ademend
- Waterbestendig
- Latexvrij
- *Lengte zonder rek ongeveer 2,5m

- Ne laisse pas de résidu de colle après le retrait
- Adaptée aux normes HACCP
- Déchirable à la main
- Laisse respirer la peau
- Résistant à l'eau
- Sans latex
- *Longueur non étirée d'environ 2,5m

Gebruiksaanwijzing: Maak de aangetaste oppervlakte schoon en droog. Dek de wond af met een wondkussen of verbandje vóór het aanbrengen van de bandage. Om de bloedtoevoer niet te beperken, het verband niet te strak vastmaken en regelmatig controleren. Wanneer gevoelloosheid of tintelingen ontstaan, de bandage verwijderen en opnieuw, minder strak, aanbrengen.

Instructions : Nettoyer et sécher la zone affectée. Couvrir la plaie avec une compresse ou un pansement avant d'appliquer le bandage. Pour éviter des problèmes de circulation sanguine, ne pas trop serrer le bandage et vérifier régulièrement. Si vous ressentez un engourdissement ou des picotements, enlevez et réappliquez le bandage en le serrant moins fort.


DE Selbsthaftender Fingerverband zur Fixierung von Wundauflagen. Rückstandslos ablösbar. Im HACCP-Bereich nutzbar · Per Hand abreißbar · Atmungsaktiv · Wasserabweisend · Latexfrei · *Länge ungedehnt ca. 2,5m **Hinweis:** Betroffene Region reinigen und trocknen. Wunde vor Anlegen der Bandage mit Wundauflage oder Verband abdecken. Die Bandage nicht zu fest anlegen und regelmäßig kontrollieren, um Durchblutungsstörungen zu vermeiden. Wenn sich ein taubes oder kribbelndes Gefühl einstellt, die Bandage entfernen und erneut mit weniger Zug anwenden.

Beiersdorf

Beiersdorf AG
20245 Hamburg, Germany
Hansaplast / Hansaplast Logo
- reg. tm. of Beiersdorf AG, Germany

Distributed by
NL Beiersdorf NV, NL-1101 AX, Amsterdam, Tel: 0900-2075020
FR Beiersdorf S.A.S, 75214 Paris Cedex, 13
BE SA Beiersdorf NV, B-1070 Brussels

www.Hansaplast.com

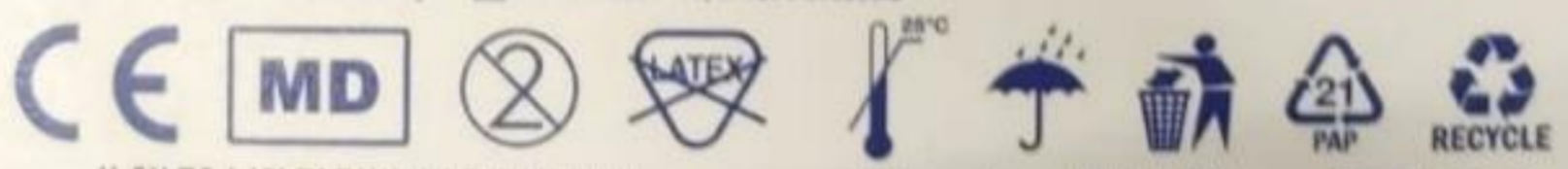

Exp. Dat / LOT
2024-06
12450206
JN
Made in China
DRV23175.02
 REF 48654
 CNK 3921-962