


# VULPES GOODS

## OOGMASSAGE APPARAAT

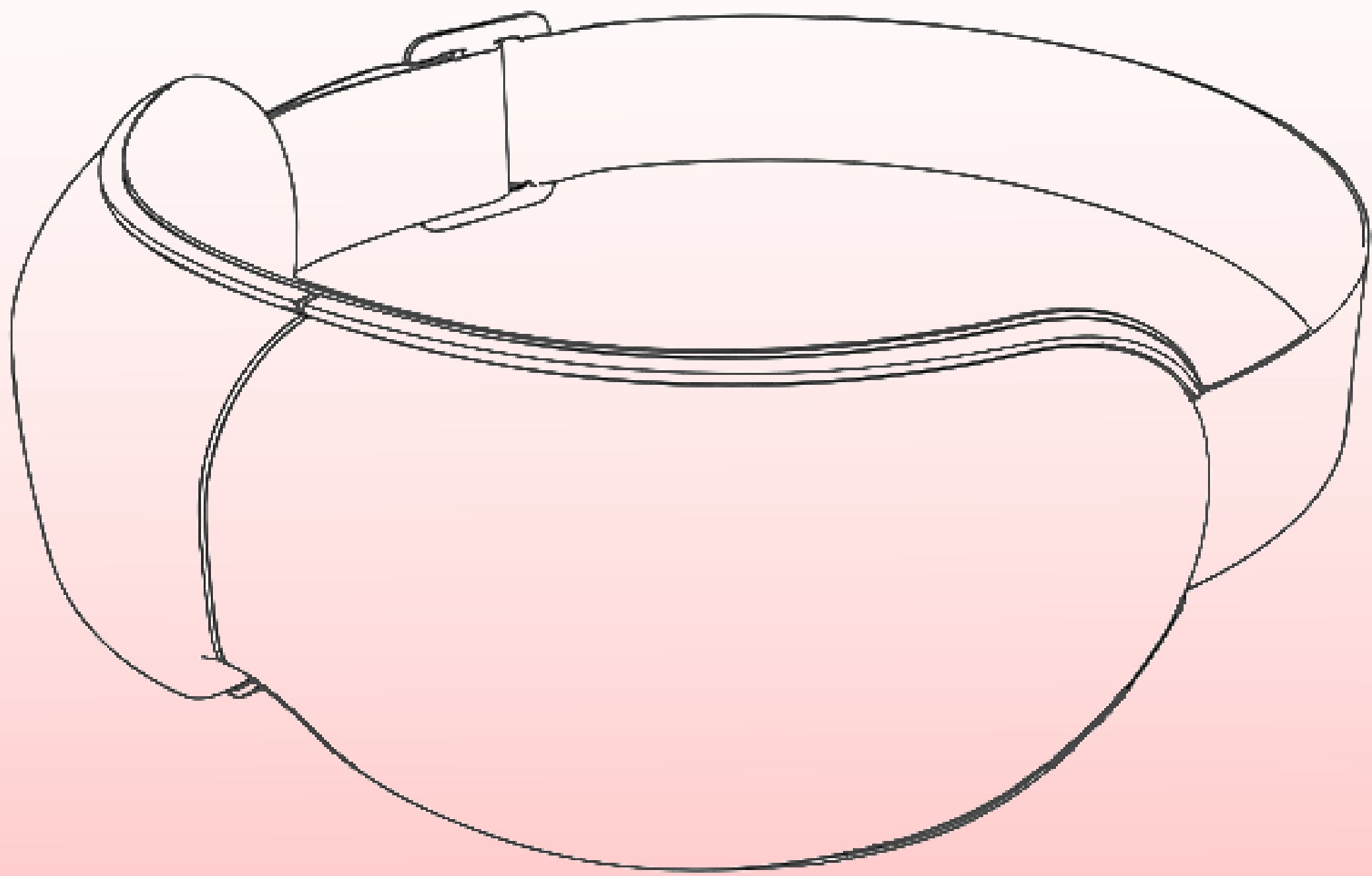

# Attentie:

Zorg ervoor dat u de hele handleiding doorneemt en begrijpt. Handel vervolgens alleen naar aanleiding van de handleiding.

LET OP, gebruik dit product niet als u een oogziekte heeft zoals Glaucoom, cataract en netvliesloslating. Als u ooit aan uw ogen bent geopereerd, dan mag u dit product niet gebruiken.

- LET OP! Maak het apparaat schoon met water, met watten met alcohol.
- LET OP! Haal het product niet uit elkaar.
- Dit product kan heet worden, mensen die gevoelig zijn voor hitte zullen extra voorzichtig moeten zijn.
- Dit product is niet bedoeld voor mensen die fysiek zwak zijn, sloom reageren, en verstandelijk gehandicapt, behalve als het veilig gebruikt wordt onder begeleiding van iemand die verantwoordelijkheid neemt voor de veiligheid. Onbeheerde jonge kinderen en gehandicapte personen mogen dit product niet gebruiken. Zorg ervoor dat het apparaat uit de buurt blijft van kinderen.
- Dit product is bedoeld voor persoonlijke verzorging, en vervangt dus geen medische verzorging of medische apparaten.
- LET OP! Haal dit product niet uit elkaar. Stoot of knijp niet in de interne lithiumbatterij en stel het niet bloot aan vuur. Niet gebruiken bij ernstige zwelling.
- Gebruik het apparaat niet wanneer de batterij in contact is gekomen met water.
- Bewaar het apparaat niet in warme ruimtes vanwege de Lithium batterij.

- Raadpleeg een dokter wanneer je een gevoelige huid hebt, allergische reacties of Orthopedische biomaterialen op het gezicht.
- Verwijder uw contactlenzen, haarknipjes en andere haar accessoires voor gebruik.
- Start het apparaat wanneer u hem op heeft gezet, om schade te voorkomen aan de air bag.
- Gebruik het apparaat niet in warme ruimtes of ruimte met een hoge luchtvochtigheid. Gebruik het niet in de zon en bij gascorrosie.
- Dit product zorgt ervoor dat u niet kan zien. Dus gebruik het niet tijdens het lopen of rijden.
- Gebruik alleen de meegeleverde oplader (5V/1A) om het apparaat op te laden.
- U moet uw ogen dicht hebben tijdens de massage.
- Na de massage, is uw zicht wacht, dit wordt langzaam weer scherp wanneer u uw ogen sluit voor 1 minuut.
- Gebruik geen scherpe objecten voor dit product.


## Product structuur

### Draadloze BT-hoofdmotor


**GESP**

**AAN/UIT KNOP (Lang indrukken)**

**Programma switchen (Kort indrukken)**

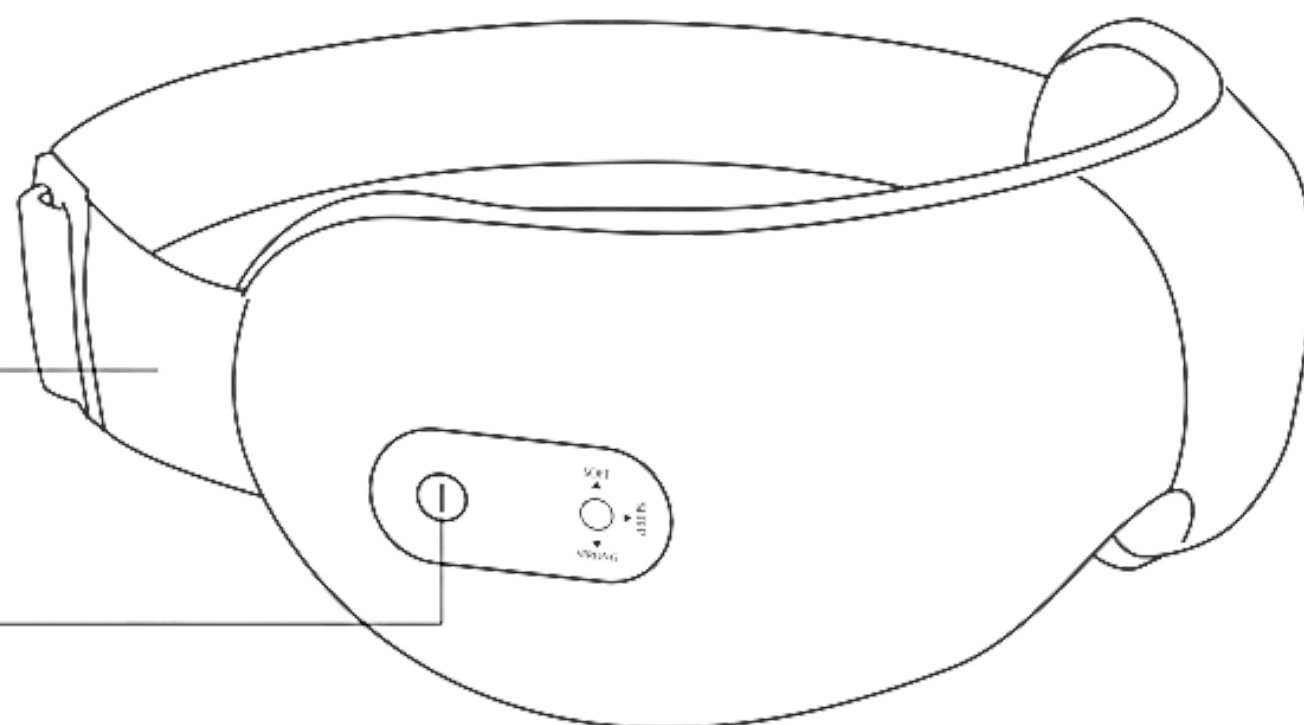


## Assecoires

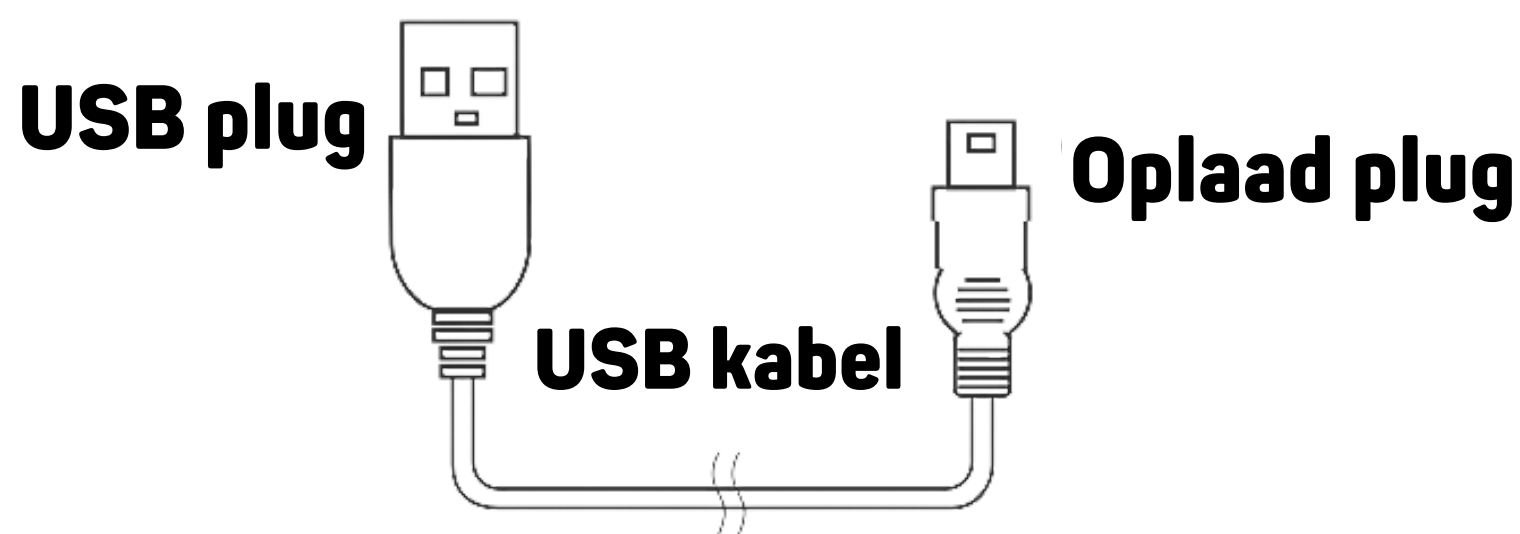

## Vorbereidingen voor gebruik -- opladen


- Voor gebruik, gebruik een 5V oplader
- Bevestig de USB plug in de adapter of andere apparaten,
- Bevestig de oplaad plug in het apparaat
- Tijdens het opladen zal het LED indicatielampje knipperen. De led-indicator van de voeding gaat branden nadat het opladen is voltooid.
- Het apparaat zal niet werken tijdens het opladen
- De oplaadtijd is 2-3 uur. Daarna zal het apparaat 1,5 uur meegaan.
- Verwijder de USB kabel wanneer het opladen is voltooid.

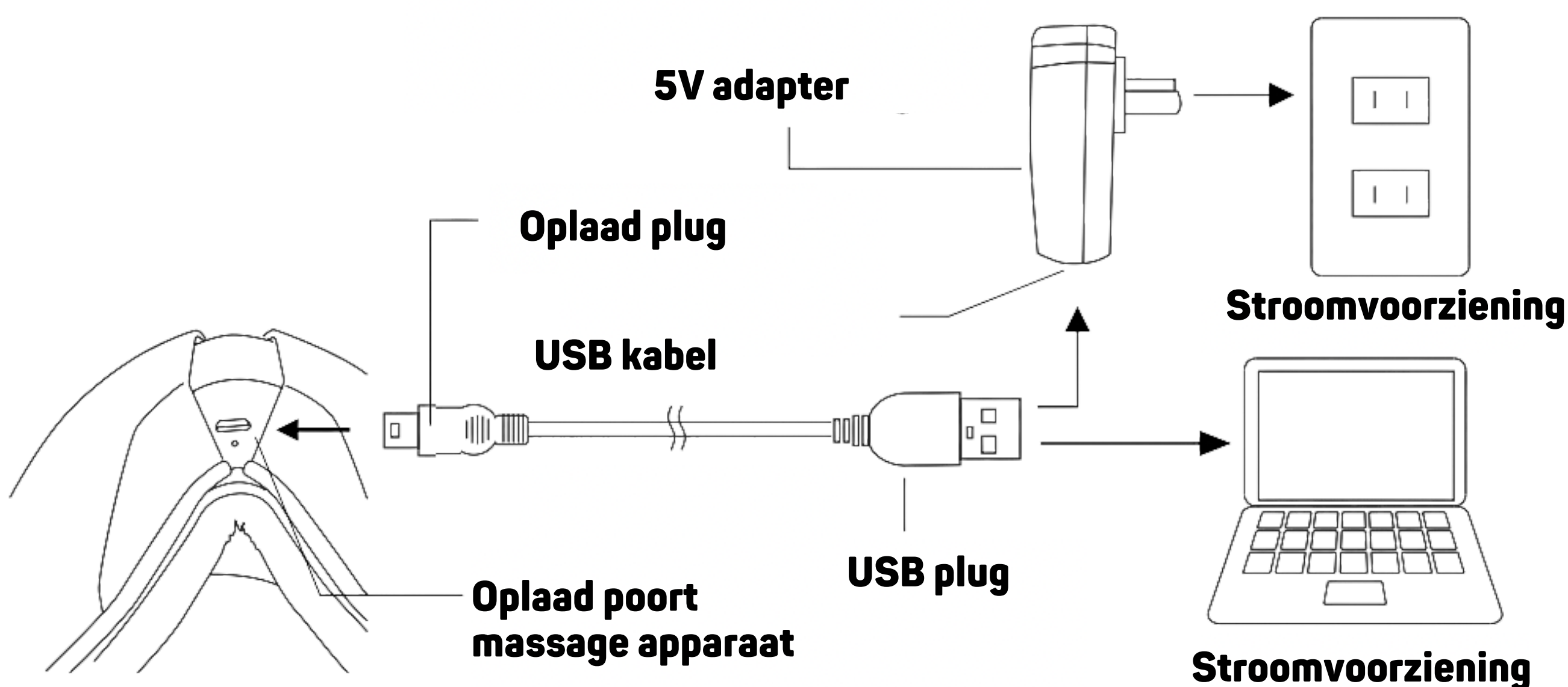

# Gebruik instructies

## Het apparaat dragen

Lijn de stoffen kapje uit met uw ogen, zet het apparaat op, verstel de elastische band, en zorg ervoor dat het apparaat comfortabel zit. Druk de aan/uit knop 3-5 seconde in om het apparaat aan te zetten.

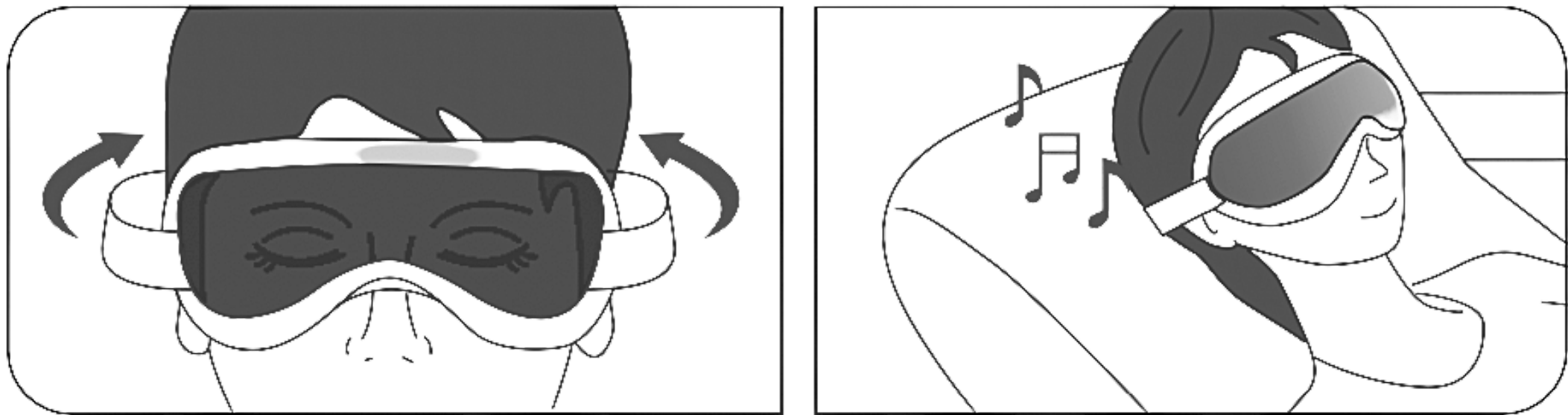

### **Attentie:**

Verwijder uw bril, contactlenzen, haarknipjes en schuifjes en alle andere haar accessoires voor gebruik om ongemak te voorkomen. Gebruik het apparaat niet met natte handen. Laat het product niet vallen en ga er niet op staan.

## Toets bediening

- Druk en houdt de aan/uit knop 3 seconden ingedrukt om het apparaat in/uit te schakelen.
- Druk kort op de aan/uit knop om van programma te switchen.

## Draadloze BT muziek

Pairing naam: Eye Massager

- Draadloze BT is standaard ingeschakeld.
- Het apparaat zal muziek afspelen wanneer het gestart is.

- Wanneer u uw BT apparaat koppelt zal het overschakelen naar de muziek van uw apparaat.
- Het gaat automatisch terug naar de ingebouwde muziek wanneer u het apparaat loskoppelt.


Let op: Wanneer u te lang naar luide muziek luistert kan het gehoorverlies veroorzaken.

## Massage programma's

Standaard: Zachte modus

luchtdruk + warmte + muziek (15 minuten)

Druk op de aan/uit knop om het programma te switchen: Een audio geluid zal laten weten dat u van programma switcht, de muziek stopt tijdens deze handeling, en gaat automatisch weer aan na 2 seconden.

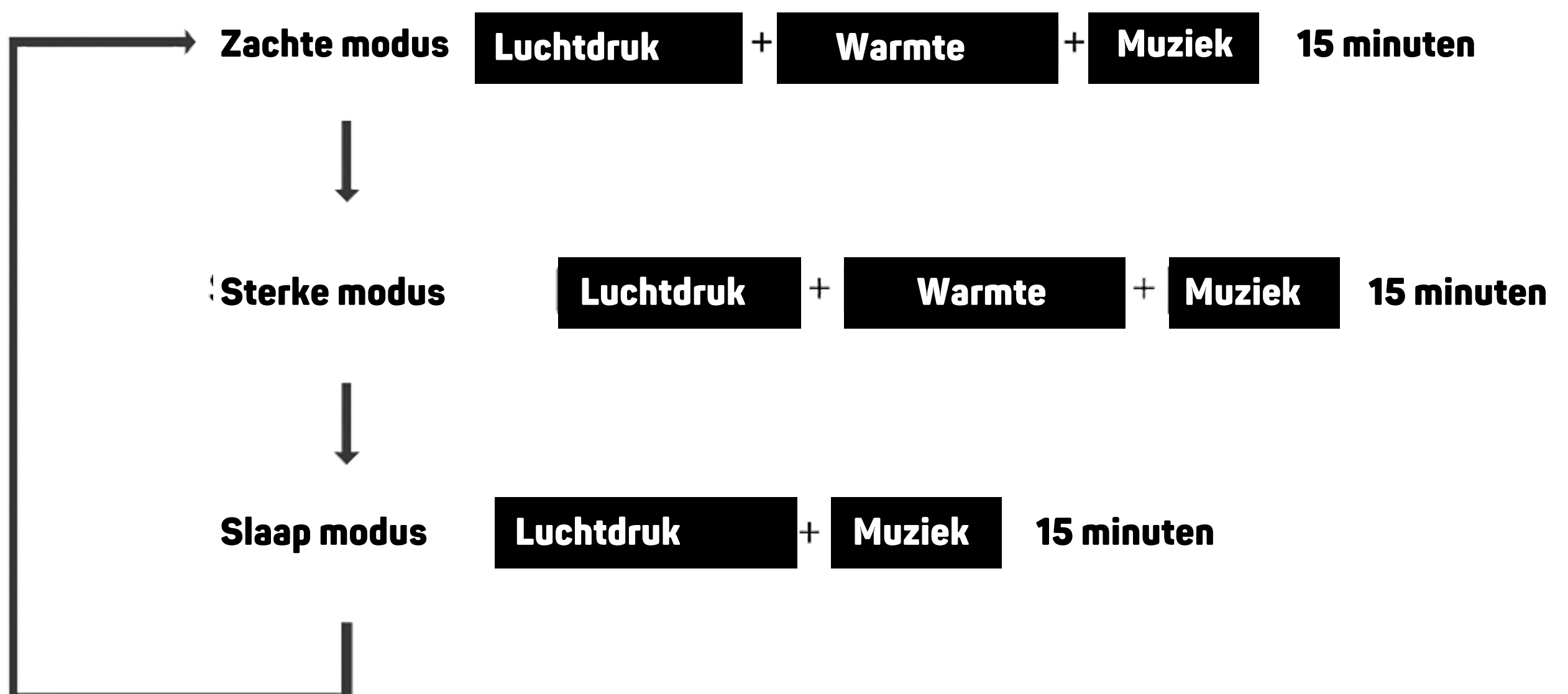


## Product kenmerken



**Warmte functie**




**Auto timer**

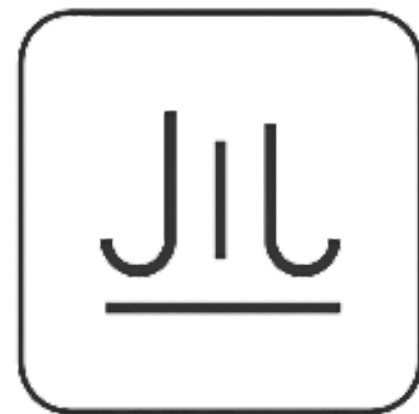

**Luchtdruk**



**Geluid  
notificaties**

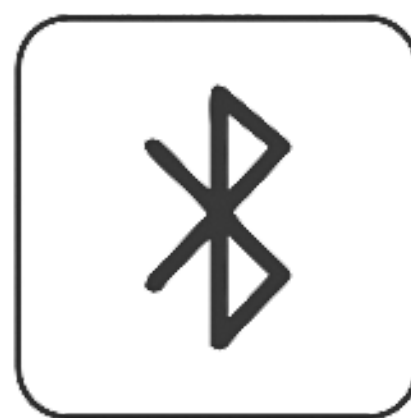

**Bluetooth**



**180 graden  
vouwbaar**

## Transport en opbergen

Temperatuur: -40 - 50 graden celcius (40-122 Fahrenheit)

Luchtvochtigheid: Minder dan 80%, geen corrosief gas, goede ventilatie.

Dit product is voorzien van anti-vibratie faciliteiten, dus geschikt voor lucht, treinen, snelweg en schip transport.

Wanneer de opslagperiode meer dan 3 maanden, zal u de doos moeten openen om te inspecteren en doe voor een half uur het apparaat aan.

# Veelgestelde vragen en problemen

Probleem	Mogelijke oorzaken	Oplossing
Er komt een mechanisch geluid of geluid uit het apparaat	Normaal geluid van luchtpomp die opblaast, motor werkt of luchtdruk	U hoeft niks te doen
Het apparaat schakelt automatisch uit. Het apparaat gaat niet aan. De knoppen werken niet. Luchtdruk is slecht.	Batterij is laag	Laad het apparaat op

- Wanneer er andere problemen zijn, verwijder het stroom en neem contact op het ons bedrijf.
- Haal het product niet uit elkaar om zelf het product te repareren. Ons bedrijf is niet aansprakelijk voor schade zie i zelf heeft aangericht.

## Schoonmaken en onderhoud

### **Attentie:**

Schakel het apparaat uit wanneer u het wilt schoonmaken, gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen om het product schoon te maken. Wanneer u het apparaat lang niet heeft gebruikt, gebruik een stofdoekjes om het product te beschermen.

## Garantie

U heeft een jaar garantie op dit product vanaf de aankoopdag.

U heeft geen garantie in de volgende situaties:

- Schade door verkeerd gebruiken of opbergen
- Schade door het proberen te repareren of het uit elkaar halen van het product



# Product kenmerken

- Compact & draagbaar gezicht massage therapie systeem
- Verschillende oog massage modi
- Helpt bij het verlichten van vermoeide ogen, droge ogen, wallen, sinusdruk, hoofdpijn, stressverlichting en helpt om te slapen.
- 3 massage modi: zacht, sterk en slaap modus
- Acupressuur: gesimuleerde drukpulsen
- Warmte functie: Warmte voor het verbeteren van bloedcirculatie, helpt donkere kringen te verlichten.
- Pneumatische modus: dubbele airbag, simuleert de druk van zachte handmassages
- Muziek: Draadloze oog massage met bijpassende muziek
- Met draadloze BT speaker om jouw eigen passende muziek af te spelen
- Slanke, next-gen modieuze bril-vizierstijl
- Simpele één knop activatie
- Ingebouwde oplaadbare batterij
- Muisstille operatie
- Met USB kabel
- Verstelbare hoofdband
- Universele maat voor alle leeftijden
- Perfect voor gebruik na televisie kijken & achter de computer zitten, voor het slapen

## **Draadloze BT connectie**

- Ingebouwde BT voor draadloos streamen
- Werkt alleen met smartphones
- Draadloze BT netwerk naam: "Eye Massager"
- Draadloze BT bereik: 30 meter
- Draadloze BT versie: 5.0

## **In de verpakking**

- Digitale oog massage apparaat
- USB oplaadkabel

## **Technische specificaties**

- Constructie materialen: ABS, zachte stof
- Aangeraden massage sessie tijd: 10, 15, 20 minuten
- Oog massage druk: 65 kPa
- Oplaadbare batterij: 3.7 V Lithium, 1200mAh
- Stroom voorziening: 5V DC, 1A (USB)
- USB kabel lengte: 1 meter
- Product afmetingen ( l x b x h): 4 x 21 x 10 cm