


Verwijder de batterij gedurende vijf seconden, tenzij uw protocol voorschrijft dat de batterij niet mag worden verwijderd. Plaats de batterij daarna terug om de zelftest na plaatsen van de batterij uit te voeren, waarmee de werking van de HeartStart wordt gecontroleerd.* Als de test is voltooid, controleert u of het groene 'Gereed'-lampje knippert.

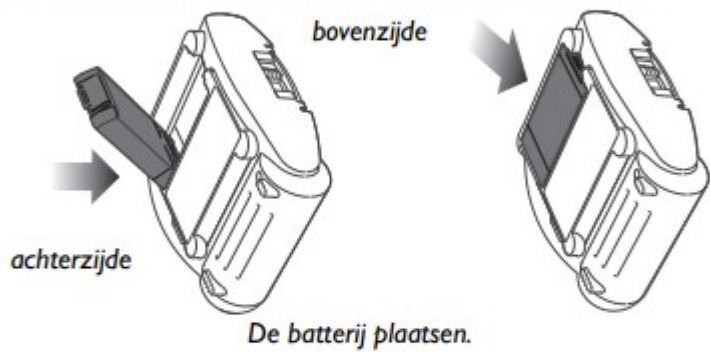

De HeartStart voert automatisch een zelftest uit na plaatsen van de batterij. Druk op de oranje schokknop als daarom wordt gevraagd. Wacht totdat de zelftest helemaal is uitgevoerd. Wanneer de zelftest is voltooid, geeft de HeartStart een overzicht van de resultaten. Ook wordt er aangegeven dat u bij noodgevallen op de groene aan/uit-knop moet drukken. (Druk alleen bij een echt noodgeval op de groene knop.) De HeartStart wordt dan uitgeschakeld en de stand-bymodus wordt geactiveerd. Het groene 'Gereed'-lampje knippert; dit geeft aan dat de HeartStart klaar is voor gebruik.†