



Snel aan de slag met de Ovulatietest (LH) Digital

Wanneer kun je beginnen met ovulatietesten? Gebruik de ovulatietest (LH) voor het bepalen van de dag dat je de grootste kans hebt om zwanger te worden. Om de startdag te bepalen voor de ovulatietest, check Tabel 1 in de bijsluiter van het pakket.

Wat heb je nodig:

- De verpakking met de Monitor (folie HDR500 monitor)
- Een folie verpakking LH
- De urine van de vrouw waarbij de LH piek vastgesteld moet worden.



Stap 1. Pak een folieverpakking met de tekst **LH**. Haal de teststick uit de verpakking. Haal ook de Monitor uit de verpakking. Plaats de stick met de letters **LH** naar boven in de Monitor totdat je een klik voelt (*zie foto 1*).

Snel aan de slag met de Zwangerschapstest (HCG)

Wanneer kun je beginnen met zwangerschapstesten? Je krijgt de meest betrouwbare testuitslag als je de zwangerschapstest (HCG) uitvoert vanaf de dag dat je overtijd bent. Ga je vóór die datum testen, bewaar dan altijd 1 zwangerschapstest voor de dag dat je overtijd bent.

Wat heb je nodig:

- De verpakking met de Monitor (folie HDR500 monitor)
- Een folie verpakking HCG
- De urine van de vrouw waarbij een zwangerschap vastgesteld moet worden.



Stap 1. Pak een folieverpakking met de tekst **HCG**. Haal de teststick uit de verpakking. Haal ook de Monitor uit de verpakking. Plaats de stick met de letters **HCG** naar boven in de Monitor totdat je een klik voelt (*zie foto 1*).

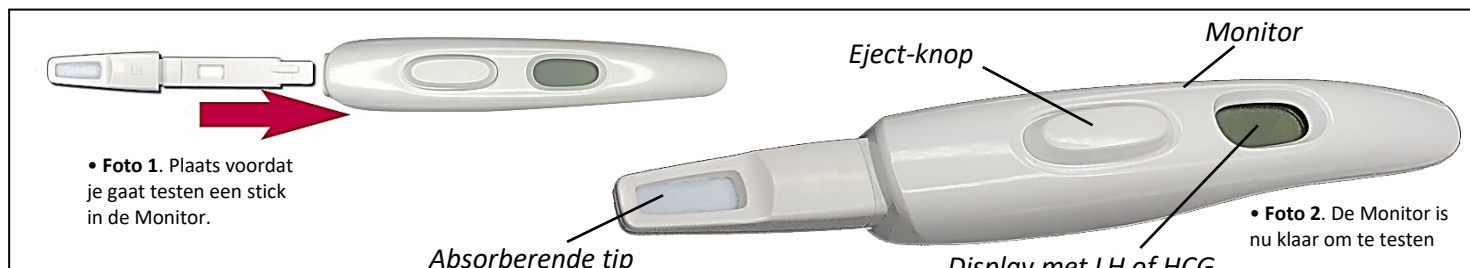


Foto 1. Plaats voordat je gaat testen een stick in de Monitor.

Foto 2. De Monitor is nu klaar om te testen

Belangrijk. De Monitor laat 3 piepjes horen en op de display knippert **HCG** en **LH**. Wacht enkele ogenblikken tot de Monitor nogmaals 3 keer piept en de display de tekst **LH** of **HCG** continu weergeeft. De Monitor is nu klaar om de test uit te voeren (*zie foto 2*). De Monitor schakelt de display na enkele minuten uit als je te lang wacht met de urine. Druk dan op de *eject-knop*, verwijder de stick en plaats hem opnieuw in de Monitor.

Let op. Het is belangrijk dat de stick in de Monitor zit **voordat** je deze in de urine houdt. Doe geen losse sticks zonder Monitor in de urine.

Stap 2. Vang wat urine op in een schoon en droog bekertje. Kijk naar **foto 3**. Houd de absorberende tip van de Monitor gedurende 20 seconden in de urine. Je kunt ook gedurende 20 seconden de absorberende tip in je urinestraal houden. Op de display begint de tekst te knipperen. Plaats de monitor op een vlakke ondergrond met de display naar boven.

Ovulatietest (vervolg)

Stap 3. Wacht circa 5 minuten op het testresultaat. Haal tijdens het wachten de teststick niet uit de Monitor.

Stap 4. De Monitor piept 3 keer als hij klaar is en het testresultaat weergeeft. De display geeft één van de volgende testresultaten weer:



Bekijk de betekenis van je testresultaat in Tabel 2 van de bijsluiter.

Stap 5. Verwijder de teststick uit de Monitor door op de witte *eject-knop* te duwen. De stick mag bij het huishoudelijk afval. De Monitor mag worden opgeborgen tot de volgende test.



Foto 3. De Monitor met stick 20 seconden in de urine houden

Zwangerschapstest (vervolg)

Stap 3. Wacht circa 5 minuten op het testresultaat. Haal tijdens het wachten de teststick **niet** uit de Monitor.

Stap 4. De Monitor piept 3 keer als hij klaar is en het testresultaat weergeeft. De display geeft één van de volgende testresultaten weer:



Bekijk de betekenis van je testresultaat in Tabel 2 van de bijsluiter.

Stap 5. Verwijder de teststick uit de Monitor door op de witte *eject-knop* te duwen. De stick mag bij het huishoudelijk afval. De Monitor mag worden opgeborgen tot de volgende test.