


Doppler handleiding

Een doppler wordt gebruikt door aanstaande moeders om het hartje van hun kindje te horen in de buik. Het is ideaal om vanuit huis te doen zonder enige kennis of ervaring.



Het inschakelen van de doppler is mogelijk door op de aan/uitknop te drukken.

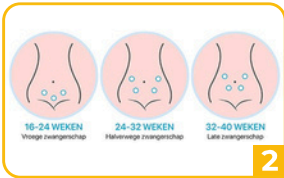

Zoek vervolgens de positie van de foetus. Voel eerst met de hand om de plek van de foetus in te schatten.



Zorg ervoor dat je een ruime hoeveelheid gel op de voorplaat van de sonde aanbrengt.



Zorg ervoor dat de voorplaat van de sonde op de meest geschikte plek wordt geplaatst om het hart van de foetus te detecteren.



De hartslag van het kindje wordt weergegeven op het lcd-scherm.



Nadat je de doppler hebt gebruikt, kun je deze uitzetten. Houd de aan/uitknop een paar seconden ingedrukt en laat los.

Let op!

- Wanneer de zwangere vrouw een horizontale positie aanneemt en de positie van de foetus normaal is, kan de sonde op de positie van de onderste middenlijn van de navel geplaatst worden. Dit zorgt ervoor dat je het meest heldere geluid krijgt.
- Let niet op de weergegeven hartslag totdat het geluid van het hartje goed hoorbaar is.
- Om een beter resultaat te krijgen, dien je de sonde op de meest optimale detectiepositie te zetten.