



WoPeeH®-pocket

Women's Peeing Help

Plashuilmiddel voor vrouwen die staan



Omdat het nodig is... omdat het handig is... of gewoon omdat je het wilt...

Gebruiksaanwijzing

1. Open WoPeeH-pocket (Fig. 1)

Verwijder de dop van de invoeropening. Trek (1), draai (2) en trek (3) het verlengstuk aan de voorkant helemaal open.

Figuur 1



Figuur 2



Figuur 3



2. Open je kleding

Maak je kleding open en duw je slip opzij (laat je broek niet zakken).

3. Duw WoPeeH tegen je aan (Fig. 1)

Houd je WoPeeH met één hand vast en plaats de invoeropening helemaal tegen je lichaam aan. Duw de achterkant **direct achter de vagina** tegen je huid aan.

4. Plassen (Fig. 3)

Richt de voorkant recht naar voren en naar beneden. Je kunt nu plassen. ^{*1}

5. Druppels verwijderen

Als je klaar bent dan schuif je je WoPeeH langs je lichaam naar voren en verwijder je alle achtergebleven druppels. (WC-papier niet nodig!)

*1 Als plassen niet lukt kan het zijn dat je te hard duwt of dat de WoPeeH te ver naar voren is geplaatst. Verminder de druk of verplaats de WoPeeH een beetje naar achteren en probeer het opnieuw.

Belangrijk bij gebruik

- Let op: Gebruik **niet te veel kracht** bij het openen. Je kunt dan het pinnetje van het verlengstuk beschadigen.
- Let op: Probeer WoPeeH-pocket eerst uit in een vertrouwde omgeving (bv. bad of douche).
- Let op: Besteed extra aandacht aan het **uitplassen van de laatste urine**. Oefen een paar keer om je blaas volledig te kunnen legen.
- Let op: WoPeeH-pocket is uitsluitend geschikt voor **uitwendig gebruik**.
- Let op: WoPeeH-pocket en het zakje zijn **geen** kinderspeelgoed.

Reinigingsadvies

Spoel je WoPeeH én de dop direct na gebruik af met schoon water. Als er geen schoon water in de buurt is: schud dan je WoPeeH goed uit en sluit hem af. Spoel de WoPeeH én de dop goed schoon zodra dit kan. Gebruik regelmatig een mild reinigingsmiddel voor een goede hygiëne.

Bewaarsadvies

Als je WoPeeH voor langere tijd niet gebruikt wordt, reinigen met een mild reinigingsmiddel en goed laten drogen. Bij voorkeur open bewaren.

Verkrijgbare kleuren



Plastuitje WoPeeH-pocket

Is een plastuitje dat je kunt afsluiten met een dop. Is bedoeld voor je persoonlijke hygiëne en geschikt voor langdurig gebruik. Is makkelijk te reinigen en gemaakt van een stevige en milieuvriendelijke kunststof. ^{*1}

*1 Polypropyleen kan makkelijk worden hergebruikt en geeft bij verbranding geen schadelijke stoffen af.



WoPeeH®-pocket

Women's Peeing Help

Aide à la miction debout pour les femmes!



parce que c'est pratique... parce que c'est nécessaire... ou simplement parce que vous le voulez!

Manuel d'utilisation

1. Ouvrez la WoPeeH-pocket (Fig. 1)

Retirez le **bouchon** de l'ouverture d'entrée; tirez (1), tournez (2) et tirez (3) pour ouvrir complètement l'extension avant.

Figure 1

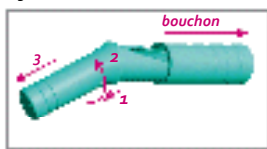


Figure 2


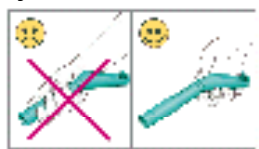


Figure 3

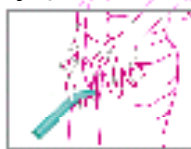

2. Ouvrez vos vêtements

Ouvrez vos vêtements

3. et écarter votre slip (sans avoir besoin de baisser votre pantalon) et tirez de côté votre slip

4. Placez la WoPeeH (Fig. 2)

Tenez votre WoPeeH d'une main, glissez la dans votre culotte et placez extrémité arrière contre votre corps. Poussez l'ouverture d'entrée **directement derrière le vagin** complètement contre la peau.

5. Uriner (Fig. 3)

Pointez la sortie simplement vers l'avant et le bas. Maintenant, tu peux faire pipi. ^{*1}

6. Essuyer les gouttes

Lorsque vous avez terminé, faites glisser doucement vers l'avant le long de votre corps pour retirer les gouttelettes restantes.

*1 Si vous ne pouvez pas uriner, peut-être vous poussez trop fort ou votre WoPeeH est trop en avant. S'il vous plaît réduisez la pression ou glissez-la un peu vers l'arrière et réessayez.

Important lors de l'utilisation!

- Attention: Veuillez ouvrir doucement votre WoPeeH** car trop de force peut endommager la broche dans la partie avant.
- Attention:** Nous vous recommandons d'essayer WoPeeH-pocket dans un environnement familier (par exemple une baignoire ou une douche).
- Attention:** notez l'**écoulement de la dernière urine**. Vous devrez peut-être faire plusieurs exercices pour vider complètement votre vessie.
- Attention:** WoPeeH-pocket est à **usage externe uniquement**.
- Attention:** WoPeeH-pocket et la pochette **ne sont pas** des jouets pour enfants!

Conseils de nettoyage

Rincez votre WoPeeH et le bouchon à l'eau claire immédiatement après utilisation. S'il n'y a pas d'eau propre à proximité: secouez bien votre WoPeeH et fermez-le. Rincez soigneusement le WoPeeH et le bouchon dès que possible. Utilisez régulièrement un détergent doux pour une bonne hygiène.

Conseils de stockage

Si votre WoPeeH n'est pas utilisé pendant une période prolongée: nettoyez-la avec un détergent doux et laissez-la bien sécher. De préférence en position ouverte.

Couleurs disponibles



WoPeeH-pocket

Est un appareil urinaire pour femmes, qui peut être fermé avec un bouchon. Est destiné à votre hygiène personnelle. Est facile à nettoyer pour vous assurer de pouvoir le réutiliser souvent. Est en polypropylène, un plastique écologique ^{*2}

*2 Le polypropylène ne pollue pas lorsqu'il est brûlé et peut être facilement réutilisé

