

Aluminium Rollator RA-RL016Q



Gebruikers- en onderhoudsinstructies



N.B. Dit apparaat dient te worden geïnstalleerd door een bekwaam persoon.

Maximale belading:

136kg*

Maximale gebruikersgewicht:

136kg*

Overschrijd in geen geval het maximale gebruikersgewicht – dit kan de gebruiker in gevaar brengen.

*** Om twijfel te voorkomen: indien een gebruiker 130 kg weegt, mag er niet meer dan 6 kg bagage gedragen worden.**

VOOR GEBRUIK

- Verwijder voorzichtig alle verpakkingsmaterialen. Gebruik geen mes of andere scherpe instrumenten, dit kan het product beschadigen.
- Controleer of het product zichtbare schade heeft. Als u schade ziet, of u vermoedt een fout, gebruik het product dan niet, maar contacteer uw leverancier.

BEOOGD GEBRUIK

De rollator is ontworpen om u te assisteren tijdens het lopen en voor het dragen van kleine artikelen middels het gebruik van de bijgeleverde tas.

De tas is speciaal voor uw rollator ontworpen, gelieve alleen deze tas voor uw rollator te gebruiken.

Gebruik of combineer geen andere tassen of manden van andere fabrikanten.

Wanneer u de rollator niet gebruikt, kunt u deze eenvoudig inklappen en opbergen tot u de rollator weer wilt gebruiken.

KENMERKEN

- Gebruiksvriendelijke lusvormige remhendels met parkeerrem
- Eenvoudige remkabelafstelling
- Zacht kunststof en massieve wielen
- Draaibare voorwielen
- Vouwslot mechanisme
- In hoogte verstelbaar
- Ergonomische, drukverlagende handgrepen
- Wandelstokhouder

MONTAGE INSTRUCTIES

Verwijder voorzichtig alle verpakkingsmaterialen, inclusief de kartonnen kokers die de gekartelde buis, onderdeel van de remafstelling, bedekken. Controleer het product grondig op schade of eventuele fouten.



Als u schade ziet, of u vermoedt een fout, gebruik het product dan niet, maar contacteer uw leverancier.



MONTAGE INSTRUCTIES (vervolg)

De rollator wordt volledig gemonteerd in ingevouwen stand afgeleverd. Om de rollator uit te vouwen volgt u de volgende instructies.

Stap 1:

Ontvouw de rollator door de handgrepen van elkaar weg te drukken. (zie fig. 1)

Stap 2:


Druk de zitting naar beneden (zie fig. 2) en controleer hierbij dat de armen onder de zitting in de haken klikken (zie fig. 3). **GEBUIK DE ROLLATOR NIET ALS DE ARMEN NIET VOLLEDIG IN DE HAKEN ZIJN GEKLIKT.**

Stap 3:

Klap de achterpoten omlaag door beide zijden van de rode vergrendeling naar achteren te trekken (zie fig. 4) en breng poot in positie. Herhaal stap 3 voor de andere poot. Als u de poot in de juiste positie hebt gebracht, hoort u deze vastklikken. **GEBUIK DE ROLLATOR NIET ALS DE POTEN NIET VEILIG IN POSITIE ZIJN VASTGEKLIKT.**


Stap 4:

Klap de voorwielen omlaag door de rode vergrendeling in te drukken (zie fig. 5) en breng het wiel in positie. Herhaal stap 4 voor het andere voorwiel. Als u het wiel in de juiste positie hebt gebracht, hoort u deze vastklikken. **GEBUIK DE ROLLATOR NIET ALS DE WIELEN NIET VEILIG IN POSITIE ZIJN VASTGEKLIKT.**

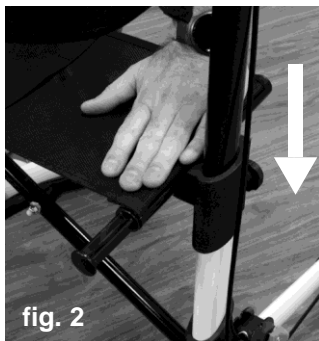

HOOGTE AFSTELLING

fig. 6

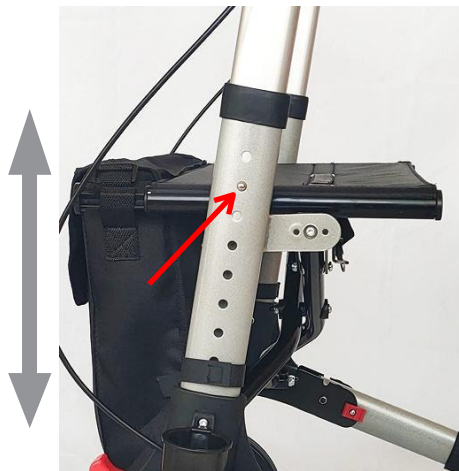

De hoogte van de handgrepen kunnen omhoog of omlaag worden gezet voor het comfort van de gebruiker.

Om de handgrepen in hoogte te verstellen, drukt u de zilveren sluitpin in (zie fig. 6). Breng de handgrepen op de gewenste hoogte. U zult een klik horen als de handgreep in een van de hoogteposities is vastgeklikt. (zie fig. 6)

CONTROLEER OF BEIDE HANDGREPEN OP DEZELFDE HOOGTE ZIJN AFGESTELD VOOR U DE ROLLATOR GEBRUIKT

GEBRUIK DE ROLLATOR NIET VOORDAT DE HANDGREPEN IN EEN VAN DE HOOGTEPOSITIES ZIJN VASTGEKLIKT

BEDIENING VAN DE REMMEN

fig. 7



1. Om te remmen, knijpt u de lusvormige remhendels zacht en tegelijk in (zie fig. 7). Zo vertraagt en stopt de rollator.

fig. 8



2. De remmen op uw rollator hebben een parkeerfunctie (zie fig. 8) Om de parkeerfunctie te gebruiken, drukt u beide lusvormige remhendels tegelijk omlaag. U zult voelen dat de hendels zacht vastklikken in positie. De remmen staan nu in parkeerstand.


3. Om de parkeerrem te ontgrendelen, knijpt u in de remmen. U voelt een zachte klik wanneer de rollator uit parkeerstand komt.

REMAFSTELLING

Het remsysteem van uw rollator dient met enige regelmaat opnieuw te worden afgesteld.

Om de remmen af te stellen, draait u eerst Moer B losser. Daarna draait u Moer A in of uit. Wanneer u de rem juist hebt afgesteld, draait u Moer B weer vast.

Indien verdere afstelling nodig is, draait u de vergrendelschroef los en trekt u de kabel ongeveer een millimeter naar beneden. Draai vervolgens de vergrendelschroef vast. De remmen kunnen nu verder afgesteld worden door Moer B los te draaien en Moer A in of uit te draaien. (zie fig. 9)

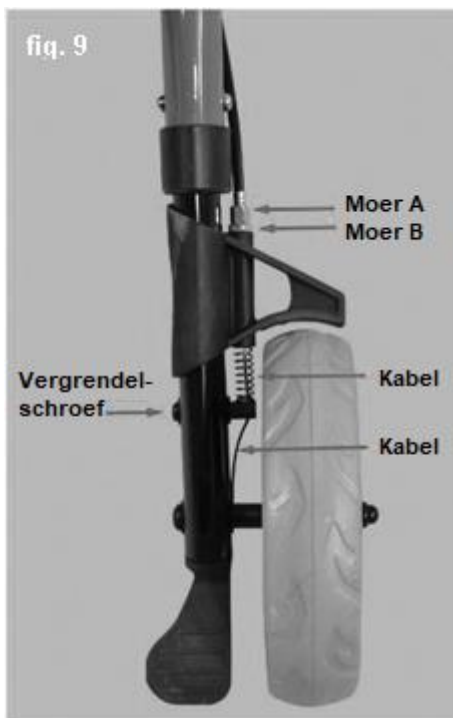

HERGEBRUIK

Indien u het product door iemand anders laat gebruiken of het product doorverkoopt, controleer dan alle componenten vooraf grondig.

Inclusief:

- Beschadigde, gebogen en/of gescheurde bevestigingen, poten of andere kokers.
- Losse of versleten remschoentjes.
- Uitgesleten afstelposities.
- Losse hendels.
- Losse of versleten wielen en wielbevestigingen.
- Gespleten, gladde en/of versleten rubbers.

Vervang alle beschadigde, ontbrekende en/of versleten onderdelen. Indien u twijfelt, neem dan contact op met uw leverancier voor ondersteuning.

ONDERHOUD EN VERZORGING & UW VERPLICHTING

1. Gebruik de rollator alleen voor de doelen waarvoor deze is bedoeld: hulp bij het lopen. Het is bedoeld de rollator alleen te gebruiken op standaard paden en stoepen of in huis, niet op onverharde paden, ruig terrein of slechte paden met bijvoorbeeld kuilvorming. Bij gebruik van de rollator op dergelijk terrein kunt u in onveilige situaties terecht komen en kan u uw rollator onherstelbaar beschadigen.
2. Houd uw rollator schoon door middle van een vochtige doek met eventueel een mild wasmiddel. Gebruik in geen geval een oplosmiddelhoudend of schurend schoonmaakmiddel, dit kan uw rollator beschadigen. Tevens vervalt uw garantie.
3. Veeg alle oppervlakken met een droge doek af en gebruik een waterafstotend smeermiddel, zoals WD40, op alle metalen verbindingen.
4. Controleer alle wielen en het inklapmechanisme op een correcte werking. Controleer tevens of de wielen volledig vrij kunnen draaien, met extra aandacht voor de voorwielen, controleer hierbij ook de rotatie van de wielen en de bevestiging aan het frame.



Stop met het gebruik van de rollator indien een van de wielen moeilijk draait of niet goed aan het frame is bevestigd, of indien u het vermoeden heeft van een schade of andere fout.

5. Maandelijkse controle – Controleer op losse onderdelen. Controleer de afstelling van uw remmen (fig. 9). Controleer de zwenkwielen.
6. Monteer geen onderdelen of accessoires van andere fabrikanten aan of op de rollator. Indien u hier toch voor kiest, vervalt uw garantie en kan het uw veiligheid in gevaar brengen.
7. We raden aan uw rollator elke dag visueel na te kijken. Daarnaast raden we minstens iedere drie maanden onderhoud voor uw rollator aan. Mocht de rollator door meerdere personen worden gebruikt raden wij een korter onderhoudsinterval aan.

ONDERHOUD

Gelieve het product regelmatig te controleren.

GARANTIE

Dit product heeft een garantie van 12 maanden op fabrieksfouten vanaf de dag van aankoop. Misbruik en schade worden niet gedekt. Deze garantie heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

SPECIFICATIE

Hoogte tot handgreep (mm)	785-960
Zittinggrootte (mm)460(B) x 250(L)
Zittinghoogte (mm)535
Voor-/ achterwiel grootte (inch).....	8
Maximum gebruikersgewicht (kg).....	136
Netto gewicht (kg)	8.2
Bruto gewicht (kg).....	9
Afmetingen verpakking (mm).....	600(L) x 270(W) x 350(H)