



KIANOF™ LED Therapy Lamp

USER MANUAL

XZ-1902



Wattage: 8W-11W
Voltage: 12V



Onderhoud

Zo nu en dan moet het apparaat gereinigd worden.

- Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat terecht komt! Alleen met een droge of licht vochtige doek reinigen. Voor elke reiniging moet het toestel uitgeschakeld, van het stroomnet gescheiden en afgekoeld zijn.
- Apparaat niet in de vaatwasmachine reinigen! Gebruik voor de reiniging een licht bevochtigde doek.
- Het toestel mag in aangesloten toestand niet met vochtige handen vastgenomen worden; er mag geen water op het toestel spatten. Het toestel mag alleen in volledig droge toestand gebruikt worden.
- Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen en dompel het apparaat nooit in water.
- De lampen zullen na verloop van tijd minder helder branden. Om het maximale vermogen te handhaven, raden wij u aan om ze om de twee of drie jaar te vervangen. Vervangende lampen zijn bij uw Lumiedistributeur verkrijgbaar.

Inhoud

- Daglichtlamp
- Adapter
- Handleiding

Let op: Haal het apparaat uit het plastic. Controleer of het apparaat beschadigd is of fouten bevat. Gebruik het apparaat niet wanneer u beschadigingen of fouten aan het apparaat vaststelt. Neem in dat geval contact op met de klantenservice of met de leverancier.

Hoe lang?

Ieder mens is verschillend, dus plaats de daglichtlamp van KIANOF binnen handbereik en begin met 30 minuten per dag. Sommige mensen vinden dit voldoende voor effectieve behandeling van SAD. U kunt de behandelingsduur desgewenst elke dag verlengen totdat u een voor u geschikte behandelingsduur gevonden. Afstand Duur:

- Tot 20 cm Half uur per dag**
- Tot 40 cm 1 uur per dag**
- Tot 60 cm 2 uur per dag**

U kunt uw dagelijkse dosis lichttherapie in één keer nemen, of de lamp in de loop van de dag zo af en toe gebruiken voor een cumulatief effect. Als u het prettiger vindt om verder van de Brazil vandaan te zitten, ontvangen uw ogen minder licht en moet u de lamp langer gebruiken. Het kan geen kwaad als u de lamp langer dan de aanbevolen tijd gebruikt. Als u wat last heeft van uw ogen, kan het helpen om de lamp wat verder van u af te gebruiken of deze even uit te schakelen.


Wat de daglichtlamp van KIANOF uniek maakt is dat de lamp gebruikt kan worden op 50 cm afstand met een gebruiksduur van 30-45 minuten. Het unieke aspect is dat de lichtintensiteit niet wordt verminderd maar dat de krachtige daglichtlamp op een afstand van 50 cm, 10.000 lux uitstraalt.

Uiteraard kan er altijd gekozen worden de lamp nog verder van u af te zetten en langer te gebruiken. Nadat u de lamp een aantal keer hebt gebruikt, zult u merken wat voor u prettig is en het beste werkt. Voor het meest optimale effect wordt geadviseerd om de 50/30-45 regel aan te houden (50cm met 30-45 minuten). In feite geldt de regel als volgt: Hoe dichterbij de lichtbron is, hoe korter de toepassingstijd.

Waarschuwing

Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing aandachtig door.

- Let erop dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt van kinderen of huisdieren. Zij kunnen erin stikken!
- Houd bij gebruik van de lamp de aanbevolen afstand van 20-60 cm aan tussen uw gezicht en de lamp. De duur van de lamp is afhankelijk van de afstand. Na de eerste keer gebruik, is het mogelijk dat u last krijgt van hoofdpijn of pijn achter de ogen. Dit zal verdwijnen na regelmatig gebruik, zodra uw zenuwstelsel went aan de nieuwe stimulatie.
- De daglichtlamp is alleen voor de bestraling van het menselijke lichaam bestemd.
- Voor het gebruik moet nagegaan worden of het toestel en het toebehoren geen zichtbare schade vertonen en al het verpakkingsmateriaal verwijderd werd. Gebruik het in geval van twijfel niet en neem contact op met uw leverancier of op het opgegeven klantendienstadres.
- Let eveneens op een stabiele stand van de daglichtlamp.
- Het toestel mag alleen op de op het typeplaatje opgegeven netspanning aangesloten worden.
- Dompel het toestel niet in het water en gebruik het niet in natte ruimtes.
- Niet bij hulpeloozen, kinderen onder 3 jaar of voor warmte ongevoelige personen (personen met ziekelijke huidveranderingen), na het innemen van pijnverzachende medicamenten, alcohol of druks gebruiken.
- Bewaar het verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen
- Het toestel mag in opgewarmde toestand niet af- of toegedekt of verpakt bewaard worden.
- Koppel altijd de netvoeding los en laat het apparaat afkoelen voordat u het aanraakt.

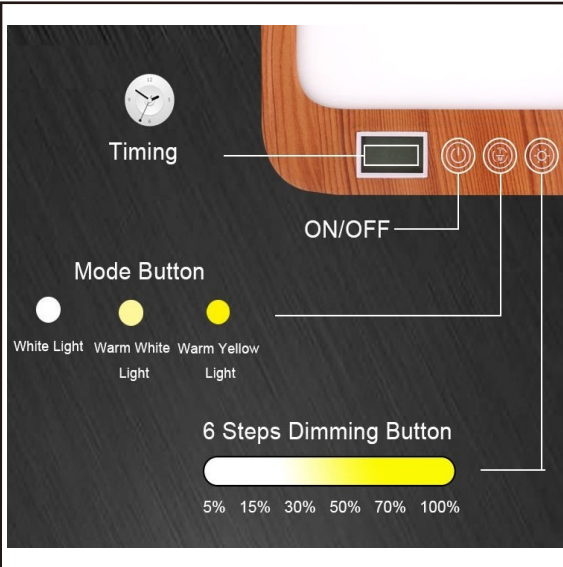

Tijd inschakelen

De KIANOF lamp heeft ook nog een extra optie "de zonsondergang modus". Een timer van 20 minuten zal activeren en de lamp zal van zeer fel naar minder fel gaan. Dit is de zonsondergang modus, kortom sluimermodus van 20 minuten. Het licht gaat dus langzaam uit. Het licht wordt zachter in die 20 minuten waardoor je in slaap kan vallen zonder dat je je zorgen hoeft te maken om de lamp.

Let op! Houd bij gebruik van de lamp de aanbevolen afstand van 20-60 cm aan tussen uw gezicht en de lamp. De duur van de lamp is afhankelijk van de afstand. Na de eerste keer gebruik, is het mogelijk dat u last krijgt van hoofdpijn of pijn achter de ogen. Dit zal verdwijnen na regelmatig gebruik, zodra uw zenuwstelsel went aan de nieuwe stimulatie.

Tijd inschakelen

- Druk lang op de kleurtemperatuuroets (middelste toets) om de tijdstelling in te voeren, de tijd kan worden ingesteld door herhaaldelijk te (blijven) drukken op de toets.
- Druk lang op de kleurtemperatuuroets om de daglichttijd te verlengen.
- Druk lang op de helderheidstoets om de daglichttijd te verkorten
- Druk kort op de aan/uit toets om de tijd te bevestigen.

Voorbeeld: U wil graag 10 minuten daglichttijd instellen

Druk kort, herhaaldelijk op de kleurtemperatuuroets tot er 10 minuten wordt aangegeven in het scherm. Druk vervolgens op de aan/uit knop om deze keuze te bevestigen. Om de tijd te verlengen, houd de kleurtemperatuuroets ingedrukt tot de gewenste tijdsduur. De tijd verkorten kan door de helderheidstoets ingedrukt te houden tot de gewenste tijd.

Tijd annuleren

Druk op de aan/uit knop om de daglichtlamp uit te schakelen

Wat te doen bij problemen

- **Aan/Uit-toets uitgeschakeld**
Schakel de Aan/Uit-toets in.
- **Geen stroom**
Sluit de netstekker op de juiste wijze aan.
Het netsnoer is defect. Neem contact op met de klantenservice.
- **De levensduur van de leds is overschreden. Leds defect.**
Neem bij reparaties contact op met de klantenservice

Funcie knoppen

- Aan/Uit
- Kleurtemperatuur (wit, oranje, geel)
- Helderheid
- Timer



KIANOF™

Neem gerust contact met ons op als er vragen zijn, wij zullen u binnen de 12 uur (op werkdagen) antwoorden. KIANOF™ is een geregistreerd handelsnaam, we doen er alles aan om u het ideaal van hoogwaardige producten en diensten te bieden.

100% niet-goed-geld-terug garantie! Wij hebben al heel veel tevreden klanten. Wij staan volledig achter de kwaliteit van onze producten en daar zijn wij uiteraard trots op! Ben je toch niet helemaal tevreden met je aankoop? Dat vinden wij natuurlijk jammer! Wij zullen dan uiteraard het betaalde bedrag direct terugstorten. Deze garantie is niet overdraagbaar. Het bewijs van aankoop is vereist.

Made in China

