

## KLEURENKAART



Beneden de wettelijke  
limiet



Boven de wettelijke  
limiet

## ALCOHOLTESTER VOOR EENMALIG GEBRUIK



### Detectiedrempel

0.25mg/l alcohol uitgeademde lucht  
gelijk aan 0.5g per liter bloed



**VignetBestellen.nl**



**VignetBestellen.nl**

### CONFORM:

- ✓ Norm NF X20-702
- ✓ Decreet 2015-775
- ✓ REACH reglement

**Niet bewaren boven de 40°C**

**Vermijd langdurige  
bloomstelling aan licht**



**turdus**

TESTERS OF CAPACITY

Vervaardigd door [www.turdus.fr](http://www.turdus.fr)

### Instructies:

Voor gebruik: Gebruik de tester bij een temperatuur tussen 15° en 40°C. Bij een temperatuur lager dan 15°C warmt u het buisje op in uw hand. Wacht 20 minuten na consumptie van alcoholhoudende drank of voedsel. Als u rookt, wacht 5 minuten na het roken van de laatste sigaret. Het maximale alcoholgehalte in het bloed wordt ongeveer 1 uur na het laatste alcoholgebruik bereikt.

### Gebruik:

- 1 - Druk de witte dopjes aan beide zijden stevig in om het aluminium membraan te perforeren.
- 2 - Adem diep in.
- 3 - Blaas langzaam en gelijkmatig uit in de aangegeven richting.
- 4 - Stop met blazen zodra de rode rechthoek helemaal wit is geworden.



### Resultaat aflezen:

- 1 - Wacht tot de witte rechthoek weer rood geworden is.
- 2 - Bij aanwezigheid van alcohol worden de gele kristallen groen. Indien de groene kristallen op of boven de zwarte ring uitkomen, hebt u de wettelijke drempel van 0,25mg alcohol per liter uitgeademde lucht gelijk aan 0,5g alcohol per liter bloed overschreden. U mag niet rijden!
- 3 - Na 10 minuten is het niet meer mogelijk een resultaat af te lezen.



Het resultaat van deze test kan in geen geval worden gebruikt tegen de uitslag van een test die verkregen is uit officiële controles. Noch de fabrikant, noch de distributeur zijn verantwoordelijk voor de beslissingen die door de gebruiker van de test genomen worden. Chemische ademtesters zijn indicatoren voor de alcoholspiegel in het bloed, maar zijn geen meetinstrument. Bij een alcoholgehalte in het bloed dicht bij de wettelijke limiet, kan een goede interpretatie van het resultaat moeilijk zijn. In geval van twijfel over uw resultaat adviseren wij u om niet te rijden.

### Voorzorgsmaatregelen:

Dit product is van glas en derhalve breekbaar. Gebruik de test niet als de aluminium membranen al zijn geperforeerd, als het glas gebarsten of gebroken is, of als de kristallen al groen zijn. Het buisje tijdens gebruik niet in de richting van andere personen richten. Niet inademen en niet inslikken. Bij aanraking van de inhoud van het buisje met de ogen of de huid, direct spoelen met water. Na gebruik weggooien in een prullenbak. Bij verkeerd gebruik of misbruik van het product zijn de fabrikant en distributeurs niet aansprakelijk. Buiten bereik van kinderen houden.