

Handleiding ForDig Dementieklok

Allereerst gefeliciteerd met de aanschaf van de ForDig dementieklok. Wij wensen u veel gebruiksgemak met deze klok. Mocht u na het lezen van deze handleiding nog vragen hebben neemt u dan contact op via info@aycommerce.com

Nadat u de klok uit de verpakking heeft gehaald en de beschermfolie op het scherm heeft verwijderd kunt u middels de standaard aan de achterzijde een plek kiezen waar de klok komt te staan. U kunt er ook voor kiezen om de klok aan de muur te hangen. Wij leveren hiervoor niet het bevestigingsmateriaal.

Nadat u de netstroom lader in het stopcontact heeft gestoken is de klok direct klaar voor gebruik. De dag, dagdeel, tijdstip en datum zal direct in beeld verschijnen. Mocht u onverhoopt een keer de netstroom lader uittrekken dan blijven de instellingen behouden middels de back up batterij in de klok.

Let op: De klok past zich niet automatisch aan bij zomer- en wintertijd, kijkt u daarom goed om de instellingen goed staan en pas bij het ingaan van de zomer- en wintertijd de klok aan.

Aan de achterzijde van de klok vindt u diverse knoppen.

Aan/uit knop:

- Met deze knop kunt u de klok aan of uit zetten. Wij adviseren de klok aan te laten staan, het kan echter handig zijn bij het slapen gaan.

Menu:

- Met deze knop gaat u naar het menu, klik nog een keer op de knop en u gaat weer terug naar het basisscherm.

Aanpassings knop:

Nadat u via de knop menu in het menu bent gekomen kunt u deze knoppen gebruiken om wijzigingen door te voeren. U kunt de knoppen boven en onder gebruiken om door het menu te scrollen. Nadat u op de juiste instelling terecht bent gekomen kunt u middels de knoppen links/rechts en boven /onder wijzigingen doorvoeren afhankelijk van de instelling. De play knop in het midden gebruikt u om te bevestigen.

- **Tijdinstelling:** Wijzigen van tijd. Dit staat bij aanschaf normaal gezien op de juiste tijd echter houdt u er rekening mee dat de klok geen rekening houdt met zomer- en wintertijd.

- Datum instellen: Wijzigen van datum
- Tijd-Modus: 24 uur of 12 uur modus
- Datummodus: Kies dag-maand-jaar modus of maand-dag jaar
- Taal: Maak een keuzen uit Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Duits, Italiaans
- Grensvlak duur UI: Bij het instellen van tijd bij deze optie zal de klok elke 5-10-15-20-30 seconden overspringen naar een tweede scherm waar dag en dagdeel worden aangegeven.
- Helderheid-day: Stel de helderheid van het scherm in tussen 1-15 waarbij 15 maximaal is.
- Helderheid-night: Stel de helderheid van het scherm in tussen 1-15 waarbij 15 maximaal is.
- Kleurmodus: Kies voor witte of gele kleurenmodus. De achtergrond is altijd zwart.
- Ochtend Tijdstelling: Kies hier vanaf welk tijdstip het basisscherm ochtend aangeeft als dagdeel indicatie.
- Middag Tijdstelling: Kies hier vanaf welk tijdstip het basisscherm middag aangeeft als dagdeel indicatie.
- Avond Tijdstelling: Kies hier vanaf welk tijdstip het basisscherm avond aangeeft als dagdeel indicatie.
- Nacht Tijdstelling: Kies hier vanaf welk tijdstip het basisscherm nacht aangeeft als dagdeel indicatie.
- Alarm Frequentie: Kies hier wanneer de ingestelde alarmen actief zijn. U heeft de keuze uit: Uit, Eenmalig, Elke dag, Ma tot Vr, Zondag
- Morning Medicatie Herinnering: Stel een herinnering in als er medicijnen genomen moeten worden in de ochtend. Het alarm gaat op de ingestelde tijd af.
- Middag Medicatie Herinnering: Stel een herinnering in als er medicijnen genomen moeten worden in de ochtend. Het alarm gaat op de ingestelde tijd af.
- Avond Medicatie Herinnering: Stel een herinnering in als er medicijnen genomen moeten worden in de ochtend. Het alarm gaat op de ingestelde tijd af.
- Alarm Tijd 1 tm 5: Stel het alarm in voor een activiteit of andere belangrijke zaken. U kunt hier geen persoonlijke boodschap instellen.

De klok beschikt ook over een USB upgrading ingang, deze optie kunt u niet gebruiken.