

**Gebruiksaanwijzing:**

De EarScratcher kan gebruikt worden voor het verwijderen van oorsmeer of bij jeuk. De earscratcher is zo gemaakt dat u uw trommelvlies niet kunt beschadigen. De gehoorgang is een gevoelig orgaan. Manipuleer dus héél voorzichtig met de earscratcher. Breng de roestvrij stalen lusurette voorzichtig naar binnen en maak schrapende bewegingen langs de gehoorgang waarbij schilfers en oorvuilte naar buiten gebracht wordt. Veeg af langs een tissue.

- **Alléén** voor volwassenen.
- **Niet** gebruiken bij oorloop, pijn en ontsteking.
- **Niet** gebruiken als je geopereerd bent aan het oor.
- **Niet** gebruiken als je weet dat er aangeboren afwijkingen aan je oor zijn
- **Stop** bij pijn of bloedverlies. Indien er bloedvlies is stopt dit meestal binnen 5 minuten.
- **Eén** earscratcher per persoon. Dit in verband met infectiegevaar.
- **Schoonmaken** met alcohol of gewoon water en zeep.
- **Geén verbetering:** ga naar uw arts.